

EUR^{MEYRA}CHAIR^{VARIO}



ERSATZTEILLISTE
EUROCHAIR-VARIO
Modell 1.750

D

MEYRA[®]
ORTOPEDIA
Wir bewegen Menschen

EUROCHAIR-VARIO / c

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
Bestellbeispiel	6
01 Rahmen	
-Code 352; Rahmenlänge mittel (D)	7
05 Druckbremse	
-Code 305; Druckbremse festverschraubt	8
-Code 680; Druckbremse für Fahrer zusätzlich	8
-Code 650; Druckbremsen (Paar) einseitig betätigt	9
-Code 681; Druckbremse mit abklappbaren Bremshebel	10
06 Fahrwerk	
Lenkgabel	
-Code 455; Kunststoffgabel lang	11
Lenkräder	
-Code 151/154/161/164/325/645	11
Antriebsräder	
-Antriebsräder - Bereifung	12
-Greifreifen - Greifreifenüberzüge	12
-Hand-und Speichenschutz (incl. Bef. Mat.)	13
-Code 651; abnehmbare Räder (Steckachse)	13
-Antriebsrad für Druckbremse	14
-Antriebsrad für Trommelbremse	14
-Code 706; Trommelbremse abnehmbare Räder mit 2 Hebel für Begleitperson	16
-Code 746; Rangierrollen in Verbindung mit abnehmbaren Rädern	17
-Code 747; Rangierrollen in Verbindung mit abnehmbaren Rädern, ungebremst	17
-Code 871; Doppelgreifreifen	18
07 Rücken	
-Rückengurte verstellbar	19
-Code 621; Rücken ohne Lumbalknick	19
-Code 622; Rücken mit Lumbalknick	20
-Rückengurte standard	21
-Code 502; Höhenverstellbare Schiebegriffe	22
-Code 814; Querliegende Schiebestange	22
-Code 903; verstärkte Rückenrohraufnahme	23
-Code 820; in Höhe der Armlehne abklappbare Rückenlehne	23
08 Sitz	
-Version 1; Sitzgurte geschraubt	25
-Version 2; Sitzgurte gesteckt	25
09 Seitenteil	
-Code 70; Seitenteil lang, abschwenkbar, abnehmbar	26
-Code 107; Seitenteil abschwenkbar, höhenverstellbar, abnehmbar	26
-Code 577; Abklappbares Seitenteil mit Kunststoffeinsatz Stahl	27
10 Beinstützen	
-Code 52; Amputations-Beinstütze	28
-Code 92; abnehmbare höhenverstellbare Beinstütze, abschwenkbar	29
-Code 93; abnehmbare Beinstützen abschwenkbar (für Rundrohr)	30
-Code 93; abnehmbare Beinstützen abschwenkbar (für Sechskantrohr)	30
-Code 798; Fußplatten winkelvestellbar bis ± 60 Grad (ab ca. Mai 06)	31
-Code 128-798; Unterschenkellänge kurz – Fußplatten winkelvestellbar bis 60 Grad	31
-Code 805; Fußplatten Kunststoff geteilt (bis ca. April 06)	32
-Code 805; Fußplatten Kunststoff geteilt (ab ca. Mai 06)	32
-Code 808; Fußplatten winkelvestellbar (bis ca. April 06)	33
12 Scheren	
-Scheren	34
-Code 350/53; Sitzbreite 50/53	35
17 Stützrollen	
-Code 691; Einsteckbare Stützrollen	36
-Code 728; abschwenkbare Stützrolle	37

20 Sitzkissen

-Sitzkissen	38
-------------	----

Zubehör

-Zubehör	39
----------	----

EUROCHAIR-VARIO / c

Einleitung

Für Ihre Bestellung von Ersatzteilen sind genaue Angaben erforderlich. Nur so ist gewährleistet, dass Ihnen das richtige Ersatzteil zugestellt wird. Alle MEYRA-ORTOPEDIA -Rollstühle werden nach dem MEYRA-ORTOPEDIA -Baukastensystem gefertigt. Ihr Fahrzeug gliedert sich demnach in Baugruppen auf. Zur leichteren Auffindung des gesuchten Ersatzteiles ordnen Sie dieses in die entsprechende Baugruppe ein.

Baugruppenübersicht

Baugruppe 01: Rahmen	Baugruppe 12: Schere
Baugruppe 03: Lenkung	Baugruppe 15: Elektrische Anlage
Baugruppe 04: Antrieb	Baugruppe 16: Arbeitstisch
Baugruppe 05: Druckbremse	Baugruppe 17: Stützrollen
Baugruppe 06: Fahrwerk	Baugruppe 20: Sitzkissen
Baugruppe 07: Rücken	Baugruppe 24: Sonstige Codierungen
Baugruppe 08: Sitz	Baugruppe 26: Verkleidung
Baugruppe 09: Seitenteil	Baugruppe 98: Zubehör und Kleinteile
Baugruppe 10: Beinstütze	Baugruppe 99: Schaltpläne

Im Inhaltsverzeichnis sind die verschiedenen Ausführungen einer Baugruppe aufgeführt; somit finden Sie schnell und sicher das gesuchte Ersatzteil.

Hinweis:

In der Baugruppenübersicht sind auch Baugruppen enthalten, die nicht für Ihr Modell zutreffend sind.

Haftung / Garantie bei Fremdprodukten

Verwenden Sie keine Fremdprodukte als Ersatz- oder Zubehörteile für MEYRA-ORTOPEDIA -Rollstühle. Diese können die Betriebssicherheit des Rollstuhles beeinträchtigen, auch dann, wenn die Fremdprodukte durch eine TÜV-Abnahme oder eine behördliche Genehmigung (Allgemeine Betriebserlaubnis) geprüft sind, da der Prüfumfang nicht immer ausreicht.

MEYRA-ORTOPEDIA übernimmt keine Haftung oder Garantie für Fremdprodukte als Ersatz oder Zubehörteile sowie für Schäden und Unfälle, die durch deren Auswechslung oder Einbau eintreten.

Sicherheitshinweise bei Verwendung von Ersatzteilen

- Beim Austausch von Teilen nur das dem Rollstuhl-Modell und Code-Nr. entsprechende Bauteil verwenden.
- Überprüfen Sie nach Erhalt des bestellten Ersatzteiles die Richtigkeit der Lieferung!
- Nur autorisierte Fachhändler oder Fachwerkstätten dürfen Reparaturen am Rollstuhl durchführen
- Führen Sie nach Reparatur des Rollstuhles eine Probefahrt durch. Achten Sie auf ungewöhnliche Fahrgeräusche und überprüfen Sie:
 - die Bremsfähigkeit
 - die Lenkfähigkeit
 - den Geradeauslauf

Verwendete Abkürzungen

In den Stücklisten finden Sie folgende Abkürzungen:

AT bedeutet Austauschteile

Mit Buchstaben angezogene Teile (Artikel oder Normteile) sind nach Sichtprüfung wiederverwendbar!

Besonderheiten

Positions-Nr. mit Buchstaben versehen, beziehen sich auf nicht dargestellte Teile (z.B. für die gegenüberliegende Seite).

Bestellbeispiel

Gehen Sie für ihre benötigten Bestellbeispiele wie folgt vor:

- 1. Typ/Modell**
Entnehmen Sie die Typ-Nr. der Betriebsanleitung, dem Lieferschein oder dem Typenschild unter Typ bzw. neben Modell.
- 2. Baujahr und Fahrzeug-Nr.**
Lesen Sie das Baujahr sowie die Fahrzeug-Nr. vom Typenschild ab, z.B.:
Baujahr: 97/12
Fz-I-Nr.: 5678901
- 3. Baugruppe**
Ordnen Sie das defekte Teil einer Baugruppe zu (siehe Baugruppen-Übersicht).
- 4. Code-Nr.**
Vergleichen Sie die Code-Nummern vom Lieferschein mit der Code-Auflistung der entsprechenden Baugruppe. Code-Nr.: 626 Rückengurthöhe 30cm
- 5. Darstellung der gewählten Baugruppe mit entsprechender Code-Nr. aufschlagen**
Im Inhaltsverzeichnis ist hinter der Code-Nr. die Seite angegeben, auf der Sie die gesuchte Darstellung und Stückliste finden.
- 6. Artikel-Nr.**
An dem zu bestellenden Ersatzteil ist eine Positions-Nr. angezogen, mit der Sie aus der Stückliste die entsprechende Artikel-Nr. ablesen können.
- 7. Stückzahl festlegen**
Anzahl der zu ersetzenden Bauteile festlegen.

Bemerkung:
Die in der Stückliste angegebenen Stückzahlen entsprechen der Anzahl der in der Baugruppe (linke und rechte Rollstuhlseite) verwendeten Bauteile.
- 8. Benennung festlegen**
Aus der Stückliste die entsprechende Benennung ablesen.
- 9. Farbe festlegen**
Entnehmen Sie die Farbcodierung dem Lieferschein.
- 10. Ersatzteil-Bestellung:**
Für eine korrekte Bestellung geben Sie alle Daten an.

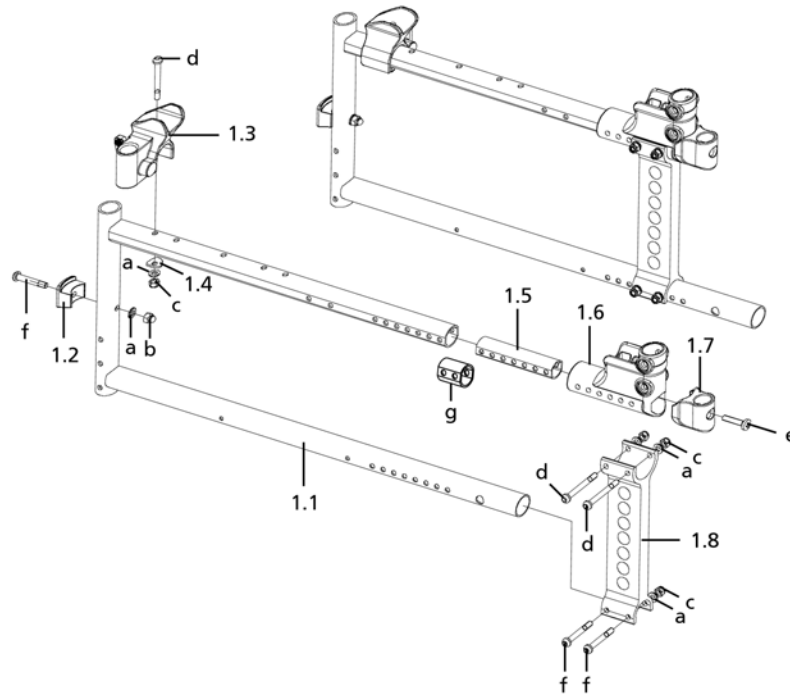
Achten Sie bei Ihrer Bestellung auf die richtigen Bestellangaben; nur so ist gewährleistet, dass Ihnen das richtige Ersatzteil zugestellt wird.

Achtung!

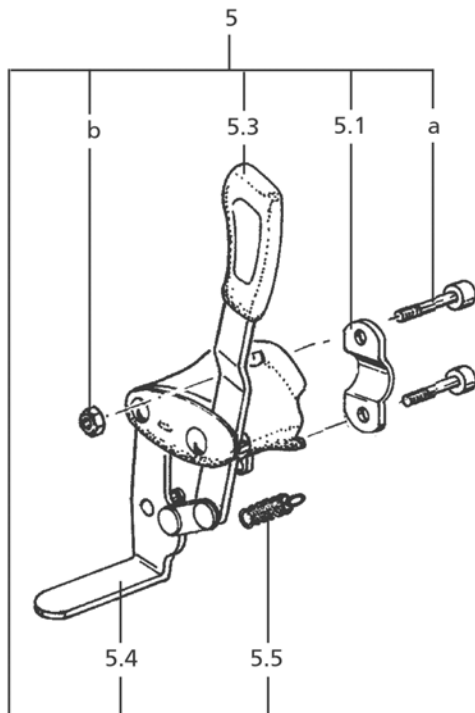
Nachträgliche Veränderungen an dem Rollstuhl sowie Kundenvereinbarungen, die die Instandzusetzende Baugruppe betreffen, sind bei einer Ersatzteilbestellung anzugeben.

Wichtiger Hinweis!

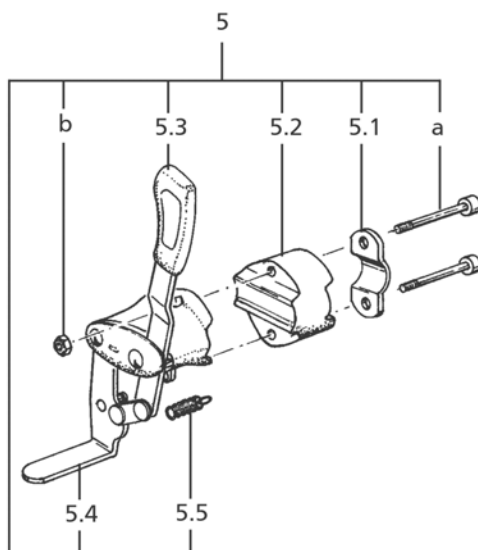
Bei jeder Veränderung, die am Rollstuhl vorgenommen wird, sollten vom Fachhändler die entsprechende Code-Nr. sowie das Datum der Änderung der Betriebsanleitung des entsprechenden Rollstuhles beigefügt werden. So gibt es bei späteren Ersatzteilbestellungen keine falschen Bestellangaben. **Original- MEYRA-ORTOPEDIA -Ersatzteile!**

EUROCHAIR-VARIO / c
Baugruppe: Rahmen

U-Bg.: Code 352; Rahmenlänge mittel (D)

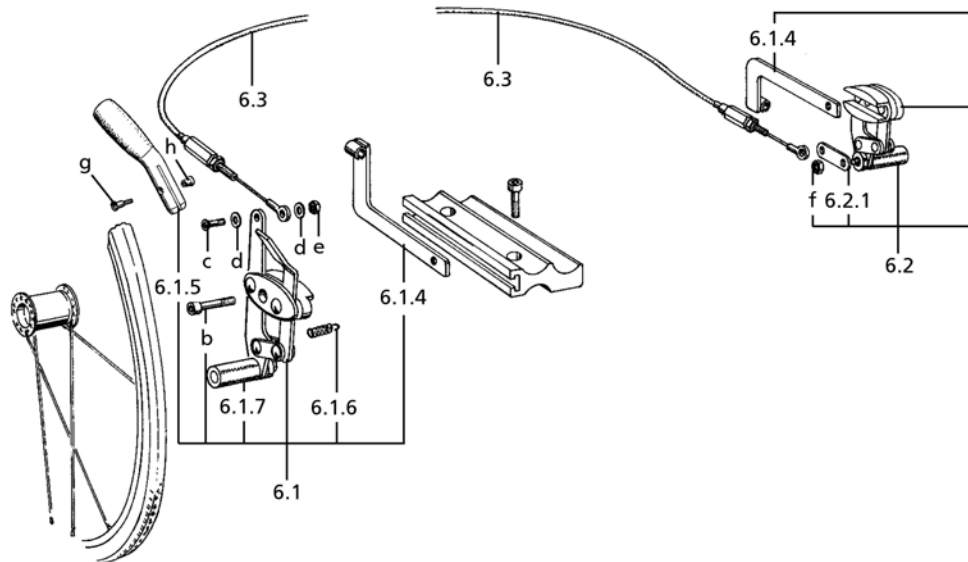
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
1.1	1 057 176	2	VORDERRAHMEN CODE 352
1.2	205 214 306	2	RASTBOLZENAUFNAHME
1.3	1 039 443	1	RIEGELFÜHRUNG RECHTS
1.3a	1 039 441	1	RIEGELFÜHRUNG LINKS
1.4	1 044 522	2	SCHEIBE
1.5	1 057 185	2	VERSTÄRKUNGSPROFIL
1.6	1 057 183	2	RÜCKENROHRAUFNAHME
1.7	1 057 184	2	LAGERBOCK
			->(Hintere Seitenteilaufnahme)
1.8	1 057 180	2	VARIOPLATTE
a	207 330 200	12	SCHEIBE DIN 125 B 6,4
b	207 320 000	2	HUTMUTTER M 6 DIN 986
c	207 320 100	10	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M6
d	205 598 300	6	LIN.-SCHRAUBE M6X50 SO MIT INNENSECHSK.
e	207 602 700	2	SCHNEID-SCHRAUBE M 6 X 30
f	205 597 400	6	LINSENSCHRAUBE M 6X40 10.9 A3T M. INNENSECHSKANT
g	1 057 904	2	DISTANZPROFIL (VON CODE 788 AUF 619)
			->(für Sitzgurttiefe 46cm)
-	205 214 906	4	SCHERENFIXIERUNG


U-Bg.: Code 305; Druckbremse festverschraubt

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
5	1 056 789	1	BREMSE RECHTS MONT.
5a	1 056 788	1	BREMSE LINKS MONT.
5.1	1 041 044	2	ROHRSCHELLE
5.3	1 052 924	2	BREMSGRIFF
5.4	1 056 786	1	BREMSE RECHTS
5.4a	1 056 785	1	BREMSE LINKS
5.5	206 300 000	2	ZUGFEDER D/1 D/8 25,5LANG DRAHT 1C DIN 2076-1.0600
a	207 120 800	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 25 DIN 912 8.8
b	207 322 000	4	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M5


U-Bg.: Code 680; Druckbremse für Fahrer zusätzlich

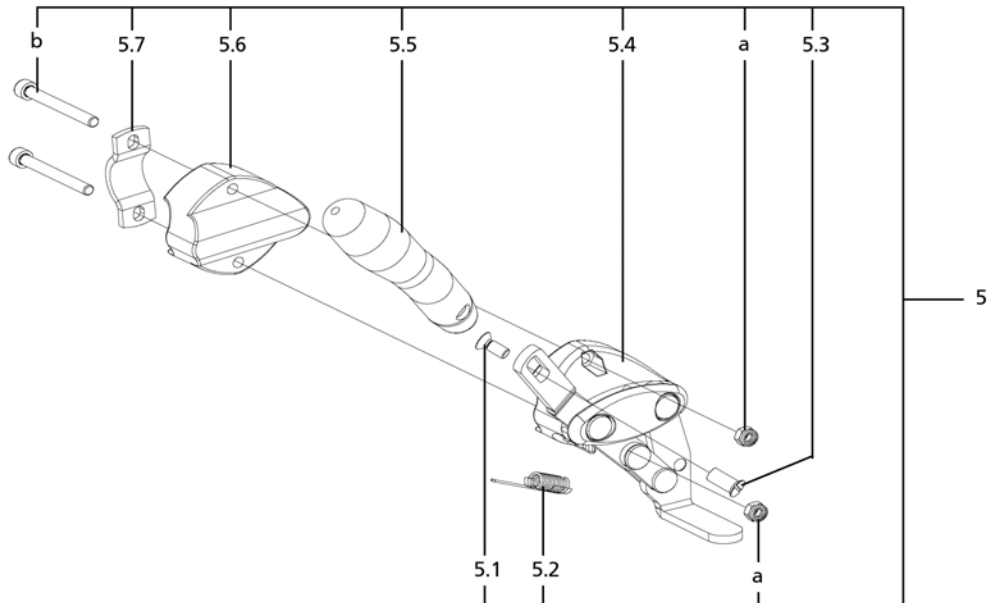
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
5	1 056 791	1	BREMSE RECHTS MONT.
5a	1 056 790	1	BREMSE LINKS MONT.
5.1	1 041 044	2	ROHRSCHELLE
5.2	1 056 787	2	ADAPTER PA 6 MIT 30 % GF
5.3	1 052 924	2	BREMSGRIFF
5.4	1 056 786	1	BREMSE RECHTS
5.4a	1 056 785	1	BREMSE LINKS
5.5	206 300 000	2	ZUGFEDER D/1 D/8 25,5LANG DRAHT 1C DIN 2076-1.0600
a	207 302 500	4	ZYLINDERSCHRAUBE M5x45 SCHWARZ DIN 912/8.8
b	207 322 000	4	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M5

EUROCHAIR-VARIO / c
Baugruppe: Druckbremse

U-Bg.: Code 650; Druckbremsen (Paar) einseitig betätigt

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
6.3	1 052 727	1	BOWDENZUG SB 38-43 L=840MM
-	1 052 728	1	BOWDENZUG SB 45-53 L=930MM
6.1.5	1 054 296	1	BREMSEGRIFF RECHTS
6.1.6	206 300 000	2	ZUGFEDER D/1 D/8 25,5LANG DRAHT 1C DIN 2076-1.0600
6.1.7	1 051 006	2	BREMSBOLZEN L=42 MM BREMSAUFL. (GES.-LG.=54,5MM)
6.2.1	1 052 730	1	BEGRENZUNGLASCHE
b	207 351 200	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6 X 25 DIN 7984 - 8.8 A3T VC 3 BESCH.
c	207 381 600	2	LINSENSCHRAUBE M 5 X 16 MIT INNEN-6KT ISO7380 10.9 A3T
d	207 330 100	4	SCHEIBE DIN 125 B 5,3
e	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M5
f	207 320 100	4	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M6
g	205 597 200	1	HÜLSENMUTTER M5 SCHWARZ
h	207 344 200	1	SENKSCHRAUBE M 5X12 DIN 965
-	206 954 200	1	KABELBAND T 30 SCHWARZ
-	207 303 300	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 5X16X D.912
-	207 330 200	4	SCHEIBE DIN 125 B 6,4
-	205 597 400	4	LINSENSCHRAUBE M 6X40 10.9 A3T M. INNENSECHSKANT
-	1 059 802	1	BREMSHALTERUNG LINKS BEI CODE 706
-	1 059 803	1	BREMSHALTERUNG RECHTS BEI CODE 706
-	1 059 804	1	BREMSHALTERUNG LINKS
-	1 059 805	1	BREMSHALTERUNG RECHTS

U-Bg.: Code 650; Druckbremsen (Paar) einseitig betätigt

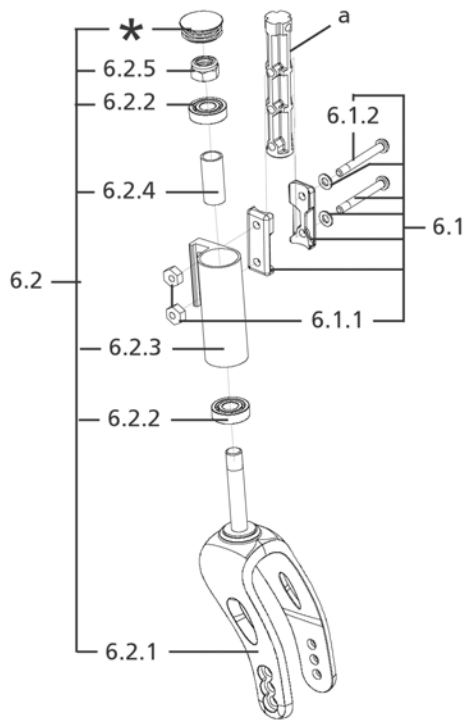
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	1 059 806	1	Code 60; Bedienung entgegengesetzt der Normalausführung (links) EINHANDBREMSE CODE 60-650 BREMSHEBEL ABKLAPPBAR LINKS
6.1	1 052 742	1	BREMSE RECHTS KPL. CODE 60-650
6.2	1 059 800	1	BREMSE LINKS KPL. CODE 60-650
6.1.4	1 052 739	2	FÜHRUNG RECHTS
-	1 059 807	1	Code 74; Bedienung Normalausführung (rechts) EINHANDBREMSE CODE 74-650 BREMSHEBEL ABKLAPPBAR RECHTS
-	1 059 801	1	BREMSE RECHTS KPL. CODE 74-650
-	1 052 737	1	BREMSE LINKS KPL. CODE 74-650
-	1 052 739	2	FÜHRUNG RECHTS


U-Bg.: Code 681; Druckbremse mit abklappbaren Bremshebel

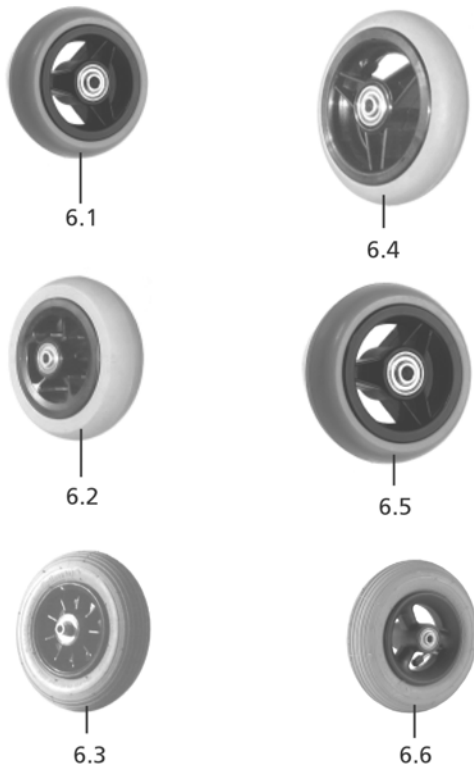
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 059 815	1	DRUCKBREMSE MIT ABKLAPPBAREN BREMSHEBEL - 1 PAAR CODE 681-706
5	1 059 810	1	BREMSE LINKS MIT ABKLAPPBAREN BREMSHEBEL CODE 681-706
5a	1 059 811	1	BREMSE RECHTS MIT ABKLAPPBAREN BREMSHEBEL CODE 681-706
5.1	207 344 200	2	SENKSCRAUBE M 5X12 DIN 965
5.2	206 300 000	2	ZUGFEDER D/1 D/8 25,5LANG DRAHT 1C DIN 2076-1.0600
5.3	205 597 200	2	HÜLSENMUTTER M5 SCHWARZ
5.4	1 059 808	1	BREMSE LINKS KPL.
5.4a	1 059 809	1	BREMSE RECHTS KPL.
5.5	1 054 295	1	BREMSGRIFF LINKS
5.5a	1 054 296	1	BREMSGRIFF RECHTS
5.6	1 056 787	2	ADAPTER PA 6 MIT 30 % GF
5.7	1 041 044	2	ROHRSCHELLE
a	207 322 000	4	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M5
b	207 302 500	4	ZYLINDERSCHRAUBE M5x45 SCHWARZ DIN 912/8.8

U-Bg.: Code 681; Druckbremse mit abklappbaren Bremshebel

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 059 814	1	DRUCKBREMSE MIT ABKLAPPBAREN BREMSHEBEL - 1 PAAR CODE 681
–	1 059 812	1	BREMSE LINKS
–	1 059 813	1	BREMSE RECHTS
5.1	207 344 200	2	SENKSCRAUBE M 5X12 DIN 965
5.2	206 300 000	2	ZUGFEDER D/1 D/8 25,5LANG DRAHT 1C DIN 2076-1.0600
5.3	205 597 200	2	HÜLSENMUTTER M5 SCHWARZ
5.4	1 059 808	1	BREMSE LINKS KPL.
5.4a	1 059 809	1	BREMSE RECHTS KPL.
5.5	1 054 295	1	BREMSGRIFF LINKS
5.5a	1 054 296	1	BREMSGRIFF RECHTS
5.7	1 041 044	2	ROHRSCHELLE
a	207 322 000	4	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M5
–	207 120 800	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 25 DIN 912 8.8

EUROCHAIR-VARIO / c
Baugruppe: Fahrwerk

U-Bg.: Code 455; Kunststoffgabel lang

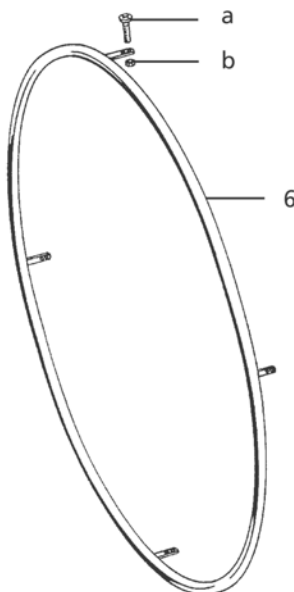
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
6.1	5 006 266	1	ANSCHRAUBSATZ STEUERKOPF (M6 ANBINDUNG)
6.1.1	205 598 200	4	EXZENTERMUTTER
6.1.2	205 598 300	4	LIN.-SCHRAUBE M6X50 SO MIT INNENSECHSK.
6.2.2	206 502 900	4	RILLENKUGELLAGER DIN 625 6001 2 ZR
6.2.4	1 032 458	2	DISTANZROHR
6.2.3	1 062 060	1	STEUERKOPF RECHTS VORMONTIERT
6.2.3a	1 062 061	1	STEUERKOPF LINKS VORMONTIERT
6.2.5	207 322 200	2	SICHERUNGSMUTTER DIN 980/8 M 12 X 1,5
a	1 057 901	2	VERSTÄRKUNGSBOLZEN D=19,8MM L=130MM ALU VERSION
*	5 005 457	1	KLEINTEILESATZ (KUNSTSTOFFGLEITER)
Code 455; Kunststoffgabel lang			
-	1 062 691	1	FAHRWERK CODE 455 (M6 ANBINDUNG)
6.2	1 062 585	1	RADGABEL RECHTS MONT.
6.2a	1 062 586	1	RADGABEL LINKS MONT.
6.2.1	1 057 883	2	LENKGABEL MIT ACHSE
Umbausatz			
-	1 059 883	1	NACHRÜSTSATZ HEMIADAPTER CODE 4906 FÜR M 6 ANBINDUNG


U-Bg.: Code 151/154/161/164/325/645

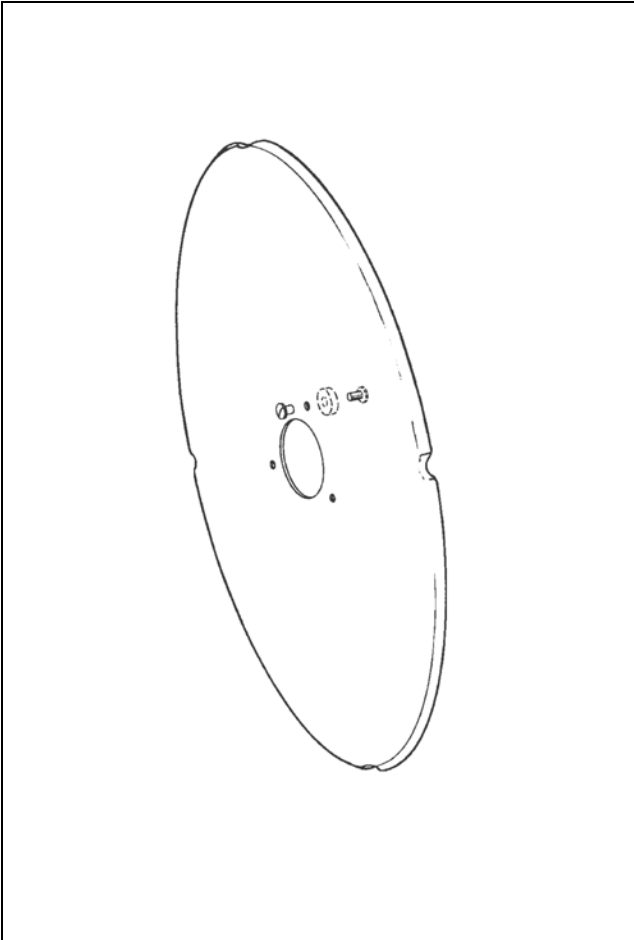
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	209 005 300	2	LENKRADBOLZEN 8X51,5
-	209 005 400	2	LINSEN-FLANSCHKOPFSCHR. M6X12
Code 151; Lenkrad ø100 Vollgummi			
-	1 057 897	1	FAHRWERK MONT. CODE 151
6.1	8 013 904	2	4"RAD D=100MM/B=30MM NL=45MM FELGE SCHWARZ
Code 154; Lenkrad ø142 Vollgummi Soft			
-	1 057 896	1	FAHRWERK MONT. CODE 154
6.2	206 249 906	2	RAD 140 X 37 CODE 154 NABENLÄNGE 45 MM 3024
Code 161; Lenkrad 175 x 36 PU - Schaum			
-	1 057 895	1	FAHRWERK MONT. CODE 161
6.3	206 271 800	2	LENKRAD 7 x 1 3/4" PU CODE 161 (175 X 40) NL 45 MM
Code 164; Lenkrad 7" Vollgummi			
-	1 057 894	1	FAHRWERK MONT. CODE 164
6.4	206 272 106	2	LENKRAD 175X27 GW 45 MM (7"VG)
Code 325; Lenkrad ø125 Vollgummi			
-	1 057 893	1	FAHRWERK MONT. CODE 325
6.5	8 013 912	2	5"RAD D=125MM/B=30MM NL=45MM,FELGE SCHWARZ
Code 645; Lenkrad 7x1 3/4" Luftbereifung			
-	1 054 289	1	FAHRWERK MONT. CODE 645 7 X 1 3/4 " LUFTBEREIFUNG
6.6	1 054 290	2	RAD 7 X 1 3/4" (200X50) LUFTBEREIFUNG NABE 45 MM 3011
-	206 110 500	2	SCHLAUCH 200 X 50 (7 X 1 3/4) AV 90°/30°
-	206 101 702	2	DECKE GRAU 7"X 1 3/4"


U-Bg.: Antriebsräder - Bereifung

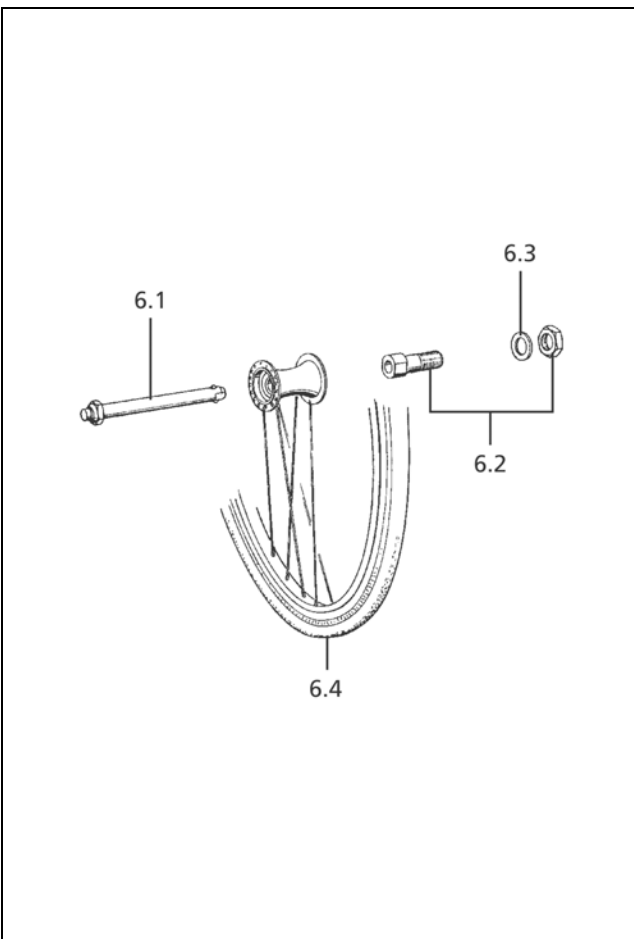
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	206 122 200	2	FELGENBAND 20" 22"
-	206 122 300	2	FELGENBAND 24"
			Code 474-486; Radgröße 22x1" - Standard-Luftbereifung (Normalprofil)
-	0	2	205118702
-	206 113 200	2	SCHLAUCH 22 X 1" AV GERADE
			Code 476-486; Radgröße 24x1" - Standard-Luftbereifung (Normalprofil)
-	206 117 102	2	DECKE 24 X 1" GRAU HOCHDRUCK ETRO 25-540/541
-	206 113 200	2	SCHLAUCH 22 X 1" AV GERADE
			Code 474-902; Pannensichere PU-Bereifung
-	206 119 502	2	BEREIFUNG 22 x 1" CODE 474-902
			Code 476-902; Pannensichere PU-Bereifung
-	206 119 602	2	BEREIFUNG 24 x 1" CODE 476-902
			Code 61-486; Radgröße 24x1 3/8" - Standard-Luftbereifung (Normalprofi)
-	206 115 102	2	DECKE 24 X 1 3/8 GRAU RILLENPROFIL 37-540
-	206 109 400	2	SCHLAUCH 24"X 1 3/8" 37-540 AV GERADE
			Code 67-486; Radgröße 22x1 3/8" - Standard-Luftbereifung (Normalprofi)
-	206 115 202	2	DECKE 22 X 1 3/8" GRAU ETRTO-NR: 37-489
-	206 108 800	2	SCHLAUCH 22 X 1 3/8 AV GERADE
			Code 61-902; Pannensichere PU-Bereifung
-	206 118 902	2	DECKE 24 x 1 3/8 GRAU PU
			Code 67-902; Pannensichere PU-Bereifung 22"
-	206 119 102	2	DECKE 22 X 1 3/8 GRAU PU


U-Bg.: Greifreifen - Greifreifenüberzüge

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	207 536 400	8	KOMBI-SCHRAUBE DIN 933M5x10-Z1-8.8A3T
-	207 805 100	8	VIERKANTMUTTER M5 SW10
			Code 494; Greifreifen Aluminium
6	8 100 833	2	GREIFREIFEN 22" ALU MIT MONTAGETEILEN
6	1 052 726	2	GREIFREIFEN 24" ALU CODE 217 (SILBERFARBEN)
			Code 495; Greifreifen Stahl verchromt
6	1 042 511	2	STAHL-GREIFREIFEN 22" 0845
6	1 042 510	2	STAHL-GREIFREIFEN 24" 0844
			Code 166; Greifreifenüberzüge Silikon schwarz glatt
-	205 144 406	2	GREIFREIFEN-ÜBERZUG 22"SILIKON SCHWARZ-GLATT CODE 67-166 0605
-	205 144 506	2	GREIFREIFEN-ÜBERZUG 24"SILIKON SCHWARZ-GLATT CODE 61-166 0606
			Code 167; Greifreifenüberzüge Silikon schwarz gerillt
-	205 144 606	2	GREIFREIFEN-ÜBERZUG 24"SILIKON SCHWARZ - GERILLT C.61-167 0607
			Code 168; Tetraplegiker-Silikongreifreifen 24"
-	205 641 000	2	TETRAPLEG.-GREIFREIFEN 24" FÜR CODE 168 4 HALTER 0870

EUROCHAIR-VARIO / c
Baugruppe: Fahrwerk

U-Bg.: Hand-und Speichenschutz (incl. Bef. Mat.)

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Radgröße 22"
-	1 024 104	1	HAND U. SPEICHENSCHUTZ 22" 1P. CODE 67-489 TRANSPARENT KPL.
			Radgröße 24"
-	1 024 100	1	HAND U. SPEICHENSCHUTZ 24"PAAR CODE 61-489 TRANSPARENT KPL.


U-Bg.: Code 651; abnehmbare Räder (Steckachse)

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
6.1	206 227 710	2	STECKACHSE MIT SICHERUNGSM.
6.1	206 226 530	2	STECKACHSE MIT SICHERUNGSM.
6.2	206 227 720	2	ADAPTER M. SECHSKANTMUTTER
-	1 056 787	2	ADAPTER PA 6 MIT 30 % GF
6.3	207 330 700	2	SCHIBE B 17 DIN 125 SCHW.GAL.VERZ. ST
-	1 065 738	2	DISTANZBUCHSE
6.4		0	siehe Seite Antriebsrad für Druck-/Trommelbremse

**U-Bg.: Antriebsrad für Druckbremse**

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
Radgröße 24"			
6.4	1 050 240	2	ANTRIEBSRAD 24 X 1 3/8" CODE 61-641/51-217-494-486-692 ->(Radgröße 24x1 3/8" - Standard -Luftbereifung [Normalprofil] - Aluminium Greifreifen)
6.4	1 050 241	2	ANTRIEBSRAD 24X1 3/8" PU CODE 61-641/51-217-494-902-692 ->(Radgröße 24x1 3/8" - PU - Bereifung - Aluminium Greifreifen)
6.4	1 031 694	2	ANTRIEBSRAD 24 X 1 3/8" CODE 61-641-495-486-692 ->(Radgröße 24x1 3/8" - Standard -Luftbereifung [Normalprofil] - Stahl Greifreifen)
6.4	1 043 663	2	ANTRIEBSRAD KPL.24X1 3/8" CODE 61-641-495-692-902 ->(Radgröße 24x1 3/8" - PU - Bereifung - Stahl-Greifreifen)
Radgröße 22"			
6.4	1 043 669	2	ANTRIEBSRAD 22"X1 3/8" KPL. CODE 67-486-494 ->(Radgröße 22x1 3/8" - Standard -Luftbereifung [Normalprofil] - Aluminium Greifreifen)
6.4	1 043 672	2	ANTRIEBSRAD KPL. 22X1 3/8" PU CODE 67-641-494-692-902 ->(Radgröße 22x1 3/8" - PU - Bereifung - Aluminium-Greifreifen)

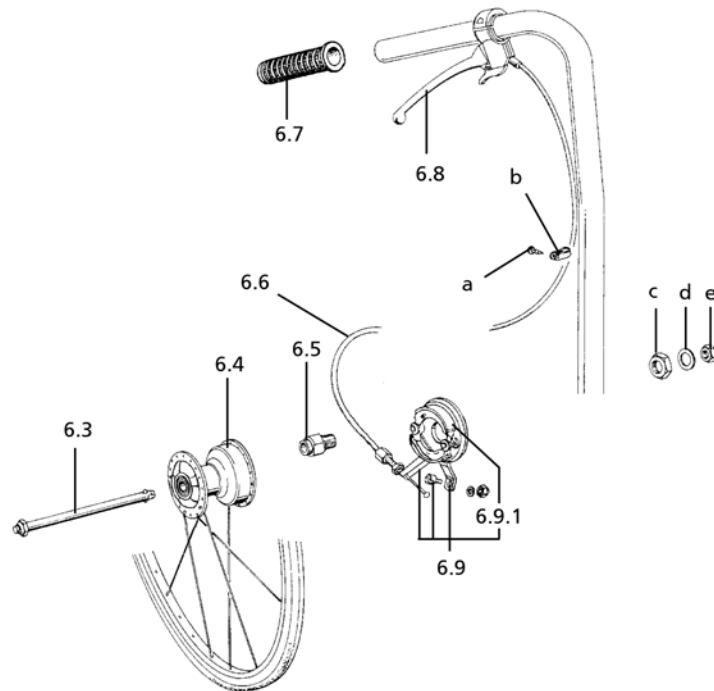
**U-Bg.: Antriebsrad für Trommelbremse**

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
Radgröße 24"			
6.1	1 050 242	2	ANTRIEBSRAD 24X1 3/8" TR.BR. CODE:61-683/05-217-494-486-692 ->(Radgröße 24x1 3/8" - Standard -Luftbereifung [Normalprofil] - Aluminium Greifreifen)
6.1	1 050 243	2	ANTRIEBSRAD 24X1 3/8" TR.BR.PU CODE:61-683/05-217-494-902-692 ->(Radgröße 24x1 3/8" - PU - Bereifung - Aluminium Greifreifen)
6.1	1 035 030	2	ANTRIEBSRAD 24 X 1 3/8" TR.BR. CODE:61-683-495 ->(Radgröße 24x1 3/8" - Standard -Luftbereifung [Normalprofil] - Stahl Greifreifen)
6.1	1 043 509	2	ANTRIEBSRAD 24X1 3/8" TR.BR.PU CODE:61-902-692-495 ->(Radgröße 24x1 3/8" - PU - Bereifung - Stahl-Greifreifen)

EUROCHAIR-VARIO / c
Baugruppe: Fahrwerk

U-Bg.: Antriebsrad für Trommelbremse

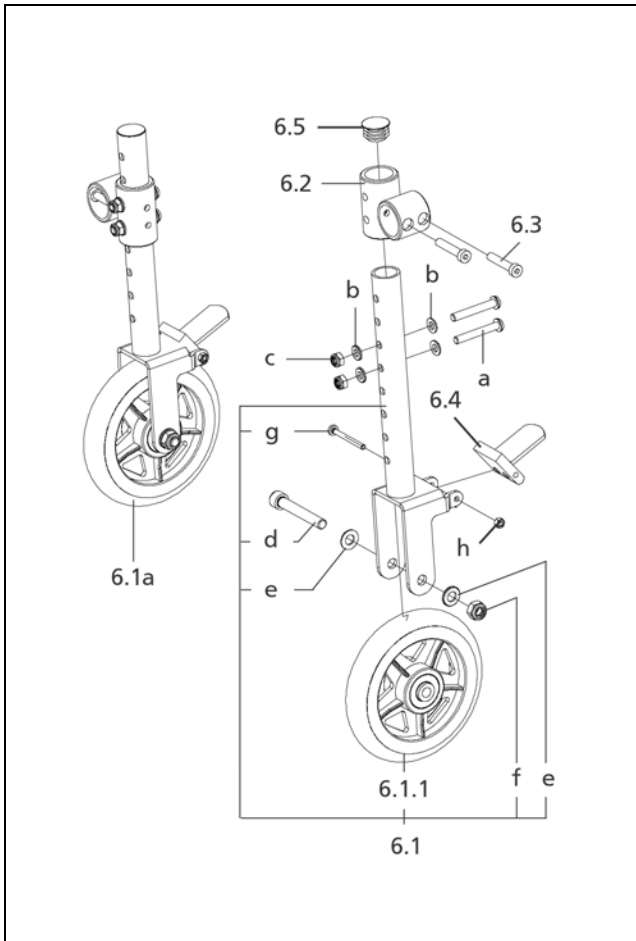
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
Radgröße 22"			
6.1	1 040 359	2	ANTRIEBSRAD KPL. 22X1 3/8" CODE 67-486-494-683/687-692 ->(Radgröße 22x1 3/8" - Standard-Luftbereifung [Normalprofil] - Aluminium Greifreifen)
6.1	1 043 691	2	ANTRIEBSRAD 22X1 3/8" PU CODE:67-494-692-706-902 ->(Radgröße 22x1 3/8" - PU - Bereifung - Aluminium-Greifreifen)
6.1	1 035 096	2	ANTRIEBSRAD 22X1 3/8" TR.BR. ->(Radgröße 22x1 3/8" - Standard -Luftbereifung [Normalprofil] - Stahl Greifreifen)
6.1	1 043 690	2	ANTRIEBSRAD 22X1 3/8"TR.BR. PU CODE:67-495-692-902 ->(Radgröße 22x1 3/8" - PU - Bereifung - Stahl-Greifreifen)


U-Bg.: Code 706; Trommelbremse abnehmbare Räder mit 2 Hebel für Begleitperson

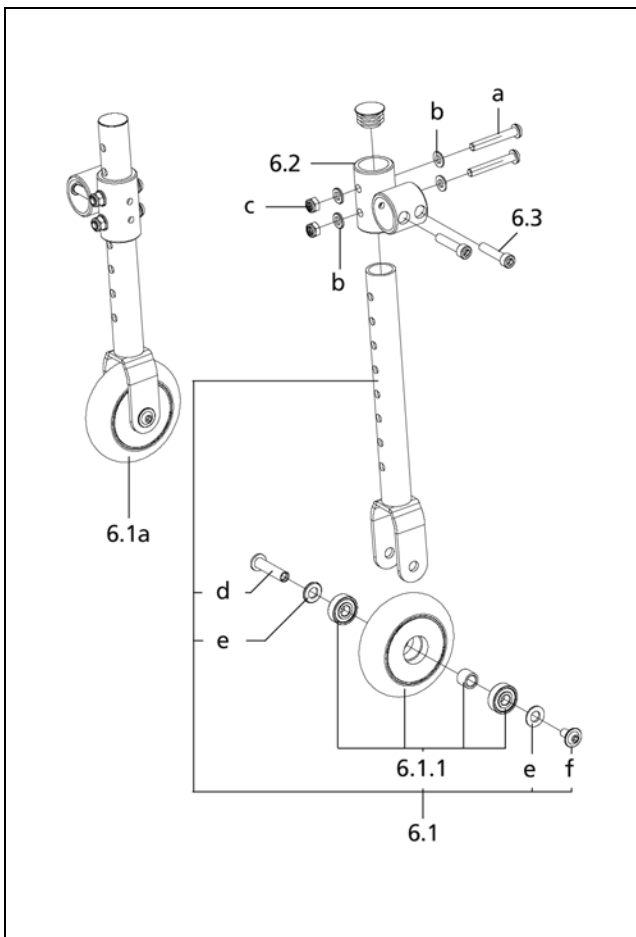
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
6.4	0	2	siehe Seite Antriebsrad für Druck-/Trommelbremse
			Code 680; Druckbremse für Fahrer zusätzlich
-	0	0	siehe Seite Druckbremse
			Code 706; Trommelbremse abnehmbare Räder mit 2 Hebel für Begleitperson
6.3	206 226 530	2	STECKACHSE MIT SICHERUNGSM.
6.9	5 005 538	1	BREMSSCHILD RECHTS MONT.
6.9a	5 005 539	1	BREMSSCHILD LINKS MONT.
6.9.1	205 901 800	2	BREMSBACKE MIT SPANNFEDER (VERSION 1 - BELAG GRAU)
6.6	206 662 100	2	BOWDENZUG VOLLST.
6.6	206 662 300	2	BOWDENZUG VOLLST. ->(für Code 502)
6.7	1 061 553	2	HANDGRIFF FÜR ROHR D=22MM L=108 MM - EINSEITIG OFFEN ->(für Code 685/687/706/707)
6.5	206 227 500	2	ADAPTER MIT SECHSKANTMUTTER
6.8	8 401 828	2	BETÄTIGUNGSHABEL MIT SPERRE
a	207 300 300	2	LINSENBLECHSCHRAUBE B 4,8X19 DIN 7981 SCHWARZ
b	205 017 300	2	BEFESTIGUNGSSCHELLE 203003101 H-NY 3V
d	207 330 600	2	SCHEIBE B 13 DIN 125
e	207 322 200	2	SICHERUNGSMUTTER DIN 980/8 M 12 X 1,5

U-Bg.: Code 706; Trommelbremse abnehmbare Räder mit 2 Hebel für Begleitperson

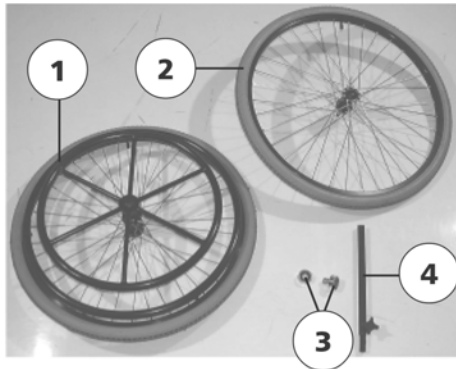
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	207 330 100	2	SCHEIBE DIN 125 B 5,3
-	207 320 100	4	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M6
-	207 330 200	6	SCHEIBE DIN 125 B 6,4
-	205 528 900	2	SPRING-STOP-6-KM. M 6 NR.SSN 003
-	207 300 200	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 12 DIN912 8.8
-	207 330 300	2	SCHEIBE B 8,4 DIN 125
-	5 006 281	1	UMBAUSATZ VON 651 AUF 706
			(nur für Code 26)
-	1 036 477	4	DISTANZSTÜCK
-	207 356 100	2	SENKCHR.M.INNENSECHSKT. M 8 X 40 8.8 A2R DIN7991

EUROCHAIR-VARIO / c
Baugruppe: Fahrwerk

U-Bg.: Code 746; Rangierrollen in Verbindung mit abnehmbaren Rädern

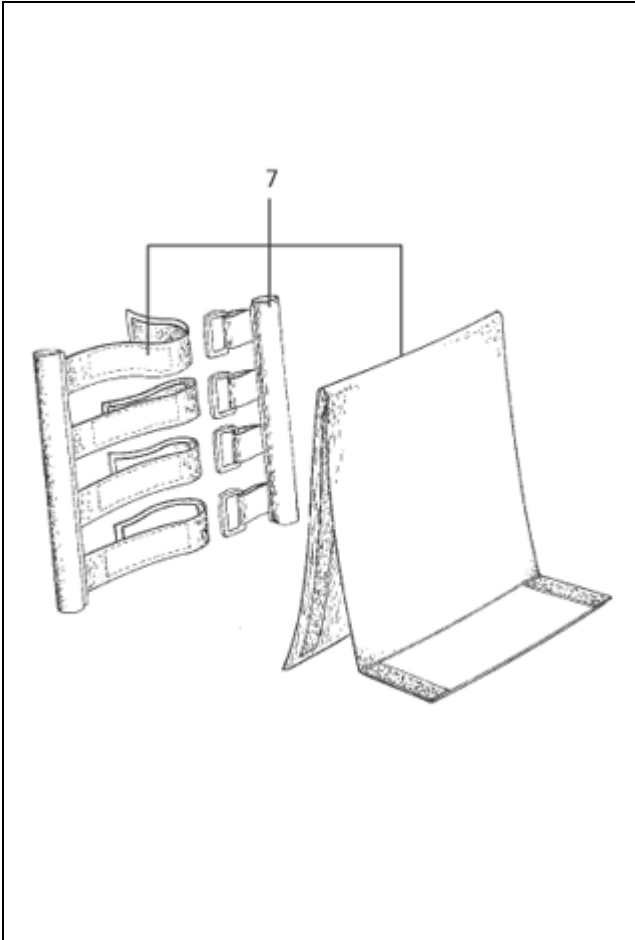
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	1 059 039	1	BREMSBARE RANGIERROLLEN - PAAR CODE 746
6.1	1 059 034	2	RANGIERROLLE KPL. 1 - STÜCK (HALTERUNG SEPARAT BESTELLEN!)
6.1.1	206 244 800	2	RAD 125 X 25 NABE 36MM VOLLGUMMIBEREIFUNG GRAU
6.2	1 058 146	2	RANGIERROLLENAUFNAHME
6.3	1 055 240	4	SONDERSCHRAUBE M6X33 8.8 A3T
6.4	1 006 865	2	BREMSHEBEL VOLLST.
6.5	205 047 400	2	RUNDSTOPFEN 22 SFL 22 X 1,5
a	207 380 300	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 40 DIN 7380 M. INNENSECHSK.
b	207 330 200	8	SCHIBE DIN 125 B 6,4
c	207 320 100	4	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M6
d	207 302 700	2	ZYLINDERSCHR. M8x55 DIN912/8.8 SCHW. GAL. VERZ.
e	207 330 300	4	SCHIBE B 8,4 DIN 125
f	207 320 200	2	SICHERUNGSMUTTER DIN 985 - M8 - 8 A3T
g	207 131 300	2	LINSENSCHRAUBE M4X40 DIN 7985
h	205 591 600	2	SPRING-STOP SECHSKANTMUTTER M4 SSN 003


U-Bg.: Code 747; Rangierrollen in Verbindung mit abnehmbaren Rädern, ungebremst

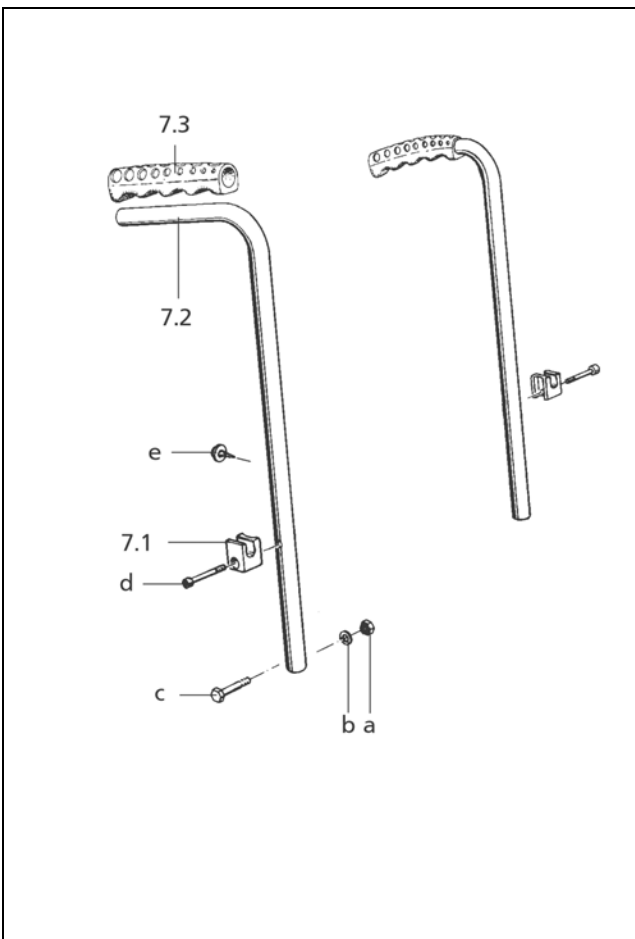
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	1 058 151	1	RANGIERROLLEN CODE 747 UNGEBREMST - 1 PAAR
6.1	1 058 150	2	RANGIERROLLE KPL. (OHNE AUFNAHME)
6.1.1	5 005 218	2	RAD 80 X 24 NABE 24MM
6.2	1 058 146	2	RANGIERROLLENAUFNAHME
6.3	1 055 240	4	SONDERSCHRAUBE M6X33 8.8 A3T
a	207 380 300	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 40 DIN 7380 M. INNENSECHSK.
b	207 330 200	8	SCHIBE DIN 125 B 6,4
c	207 320 100	4	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M6
d	1 057 081	2	LENKRADBOLZEN MIT LINSENKOPF UND INNENSECHSK. L=33MM D=8MM
e	207 330 300	4	SCHIBE B 8,4 DIN 125
f	209 005 400	2	LINSEN-FLANSCHKOPFSCHR. M6X12


U-Bg.: Code 871; Doppelgreifreifen

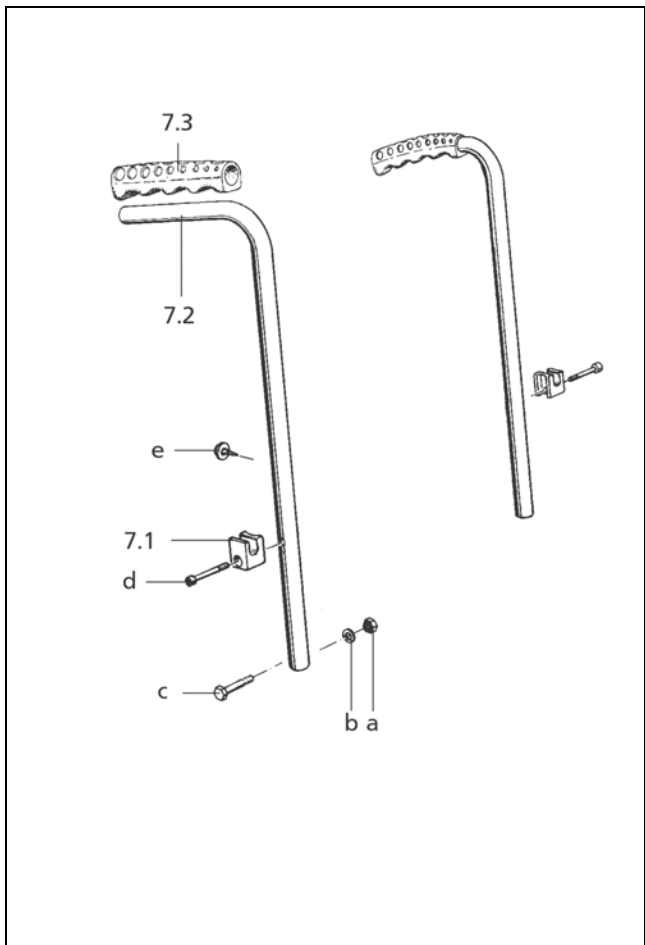
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
3	5 006 432	1	RADADAPTER SET FÜR CODE 871 (MIT UND OHNE BUND)
4	5 006 433	1	VERBINDUNGSSTANGE KPL. FÜR CODE 871
-	1 065 926	1	DOPPELGREIFREIFEN KPL. 24" CODE 61-871-902
1	5 006 428	1	RAD 24" MIT PU-BEREIFUNG UND DOPPELGREIFREIFEN FÜR CODE 871
2	5 006 429	1	RAD 24" MIT PU-BEREIFUNG OHNE GREIFREIFEN FÜR CODE 871
-	1 065 927	1	DOPPELGREIFREIFEN KPL. 22" CODE 67-871-902
1	5 006 430	1	RAD 22" MIT PU-BEREIFUNG UND DOPPELGREIFREIFEN FÜR CODE 871
2	5 006 431	1	RAD 22" MIT PU-BEREIFUNG OHNE GREIFREIFEN FÜR CODE 871

EUROCHAIR-VARIO / c
Baugruppe: Rücken

U-Bg.: Rückengurte verstellbar

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
7	1 062 693	1	RÜCKENGURT VERSTELLBAR CODE 38/40/43-628
-	1 062 582	1	RÜCKENGURT CODE 38-628 (AUCH FÜR CODE 26-43-638)
-	0	1	1062684
7	1 062 696	1	RÜCKENGURT VERSTELLBAR CODE 46/48-628
-	1 062 582	1	RÜCKENGURT CODE 38-628 (AUCH FÜR CODE 26-43-638)
-	0	1	1062686
7	1 062 698	1	RÜCKENGURT VERSTELLBAR CODE 350-628
7	1 062 583	1	RÜCKENGURT CODE 50-628 (AUCH FÜR CODE 26-48-638)
-	0	1	1062686
7	1 062 699	1	RÜCKENGURT VERSTELLBAR CODE 53-628
-	1 062 583	1	RÜCKENGURT CODE 50-628 (AUCH FÜR CODE 26-48-638)
-	0	1	1062687

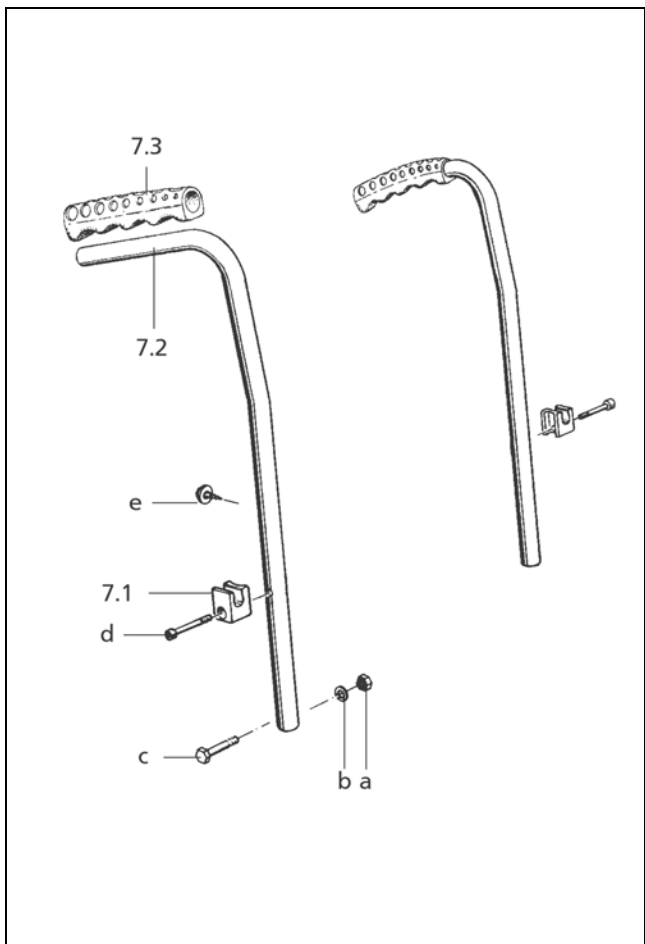

U-Bg.: Code 621; Rücken ohne Lumbalknick

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
7.1	205 016 906	2	SEITENTEILANLAGE SCHWARZ POLYAMID 6 RAL 9005
7.3	1 061 553	2	HANDGRIFF FÜR ROHR D=22MM L=108 MM - EINSEITIG OFFEN
a	207 320 100	4	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M6
b	207 330 200	4	SCHEIBE DIN 125 B 6,4
c	1 056 792	2	ANSATZSCHRAUBE M 6 MIT IN.6KT. 10.9 A3T (SONDERSCHRAUBE)
d	207 300 300	2	LINSENBLECHSCHRAUBE B 4,8X19 DIN 7981 SCHWARZ
e	207 317 500	2	BLECHSCHRAUBE DIN 7981 4,8X22 SCHWARZ
			Code 635/442/628/444; Rückengurthöhe 40/42/44cm
7.2	1 058 282	2	RÜCKENROHR OHNE LUMBALKNICK RH 40/42/44CM
-	1 058 283	2	RÜCKENROHR OHNE LUMBALKNICK RH 40/42/44CM CODE 706
			->(für Code 685/687/706/707; Trommelbremsvarianten Begleitperson)



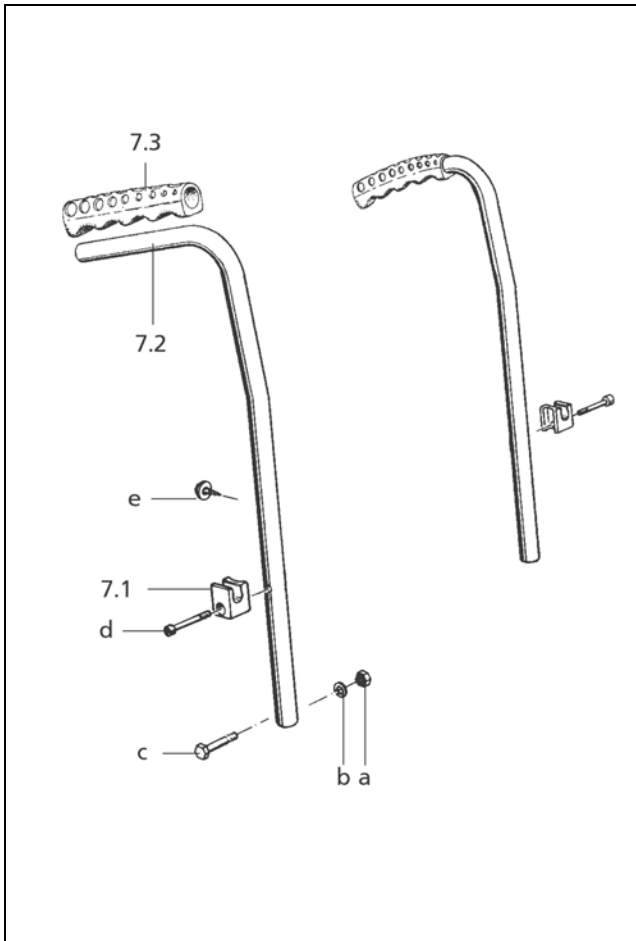
U-Bg.: Code 621; Rücken ohne Lumbalknick

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
Die nachfolgenden Artikelnummern beinhalten Rückenrohre und Rückengurte!			
Code 442; Rückengurthöhe 42cm Standardrücken			
7	1 058 291	1	RÜCKEN CODE 38-442-621
7	1 058 292	1	RÜCKEN CODE 40-442-621
7	1 058 293	1	RÜCKEN CODE 43-442-621
7	1 058 294	1	RÜCKEN CODE 46-442-621
7	1 058 295	1	RÜCKEN CODE 48-442-621
Code 628; Rückengurt verstellbar Höhe 42 cm			
7	1 058 316	1	RÜCKEN CODE 38-621-628
7	1 058 317	1	RÜCKEN CODE 40-621-628
7	1 058 318	1	RÜCKEN CODE 43-621-628
7	1 058 319	1	RÜCKEN CODE 46-621-628
7	1 058 400	1	RÜCKEN CODE 48-621-628
Code 635; Rückengurthöhe 40 cm			
7	1 058 284	1	RÜCKEN CODE 38-621-635
7	1 058 285	1	RÜCKEN CODE 40-621-635
7	1 058 286	1	RÜCKEN CODE 43-621-635
7	1 058 287	1	RÜCKEN CODE 46-621-635
7	1 058 288	1	RÜCKEN CODE 48-621-635

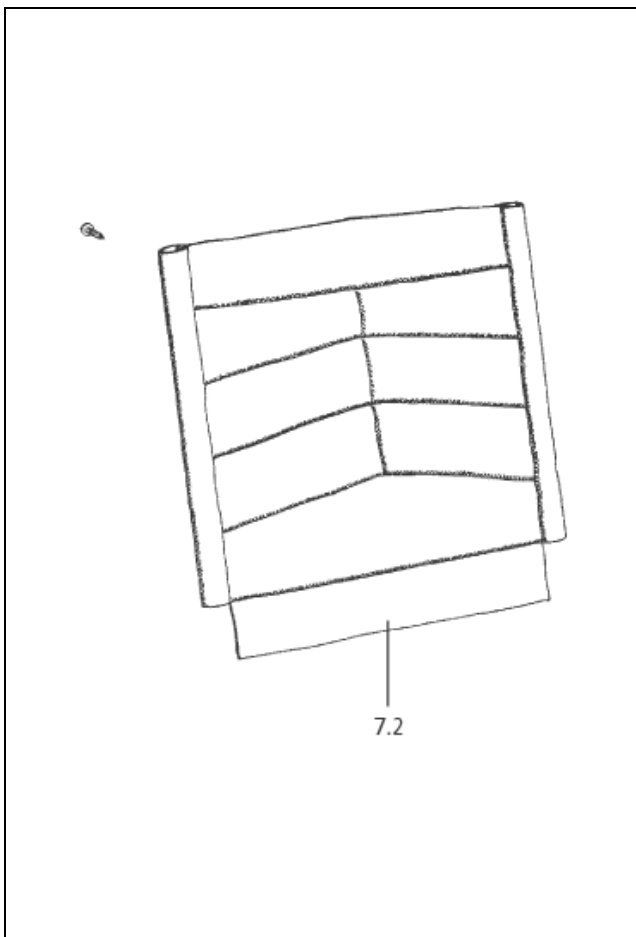


U-Bg.: Code 622; Rücken mit Lumbalknick

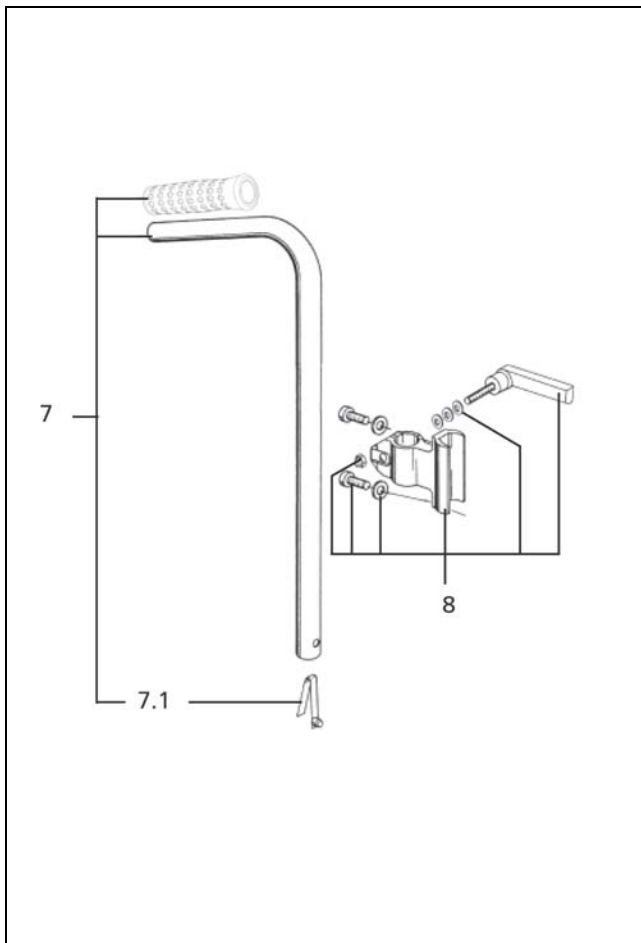
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
7.1	205 016 906	2	SEITENTEILANLAGE SCHWARZ POLYAMID 6 RAL 9005
7.3	1 061 553	2	HANDGRIFF FÜR ROHR D=22MM L=108 MM - EINSEITIG OFFEN
a	207 320 100	4	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M6
b	207 330 200	4	SCHEIBE DIN 125 B 6,4
c	1 056 792	2	ANSATZSCHRAUBE M 6 MIT IN.6KT. 10.9 A3T (SONDERSCHRAUBE)
d	207 300 300	2	LINSENBLECHSCHRAUBE B 4,8X19 DIN 7981 SCHWARZ
e	207 317 500	2	BLECHSCHRAUBE DIN 7981 4,8X22 SCHWARZ
Code 635/442/628/444; Rückengurthöhe 40/42/44cm			
7.2	1 057 187	2	RÜCKENROHR MIT LUMBALKNICK RH 42 CODE 622-442/628
-	1 057 102	2	RÜCKENROHR MIT LUMBALKNICK RH 42 CODE 622-442/628-706
->(für Code 685/687/706/707; Trommelbremsvarianten Begleitperson)			

EUROCHAIR-VARIO / c
Baugruppe: Rücken

U-Bg.: Code 622; Rücken mit Lumbalknick

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
Die nachfolgenden Artikelnummern beinhalten Rückenrohre und Rückengurte!			
Code 442; Rückengurthöhe 42cm Standardrücken			
7	1 057 103	1	RÜCKEN CODE 38-442-622
7	1 057 104	1	RÜCKEN CODE 40-442-622
7	1 057 105	1	RÜCKEN CODE 43-442-622
7	1 057 106	1	RÜCKEN CODE 46-442-622
7	1 057 107	1	RÜCKEN CODE 48-442-622
Code 628; Rückengurt verstellbar Höhe 42 cm			
7	1 057 932	1	RÜCKEN CODE 38-622-628
7	1 057 938	1	RÜCKEN CODE 40-622-628
7	1 057 955	1	RÜCKEN CODE 43-622-628
7	1 057 956	1	RÜCKEN CODE 46-622-628
7	1 057 957	1	RÜCKEN CODE 48-622-628
Code 635; Rückengurthöhe 40 cm			
7	1 057 109	1	RÜCKEN CODE 38-622-635
7	1 057 110	1	RÜCKEN CODE 40-622-635
7	1 057 111	1	RÜCKEN CODE 43-622-635
7	1 057 112	1	RÜCKEN CODE 46-622-635
7	1 057 113	1	RÜCKEN CODE 48-622-635

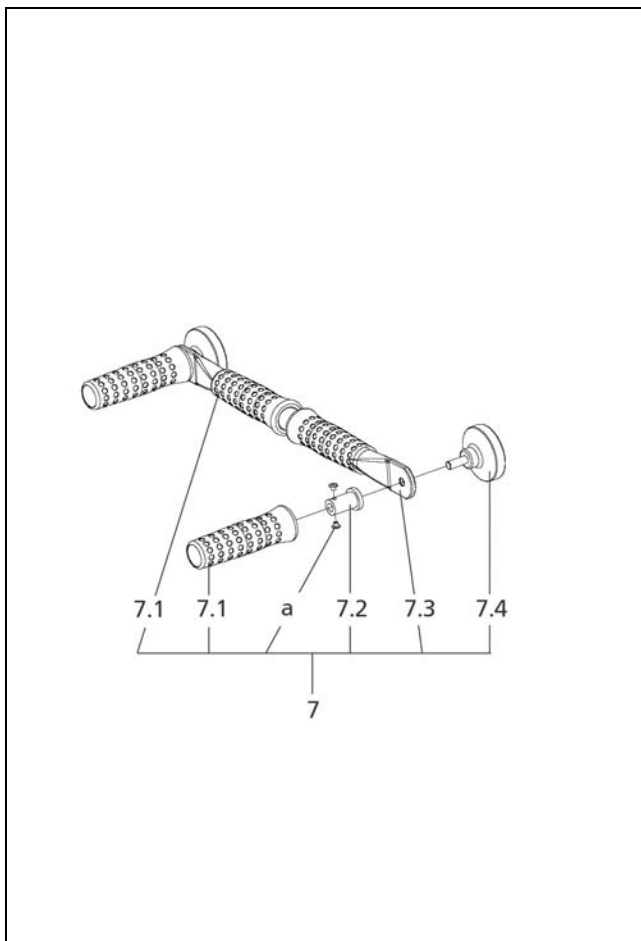

U-Bg.: Rückengurte standard

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
Code 635/442/444; Rückengurt standard 40/42/44cm			
7.2	1 057 096	1	RÜCKENGURT CODE 38-442-621/622
7.2	1 057 097	1	RÜCKENGURT CODE 40-442-621/622
7.2	1 057 098	1	RÜCKENGURT CODE 43-442-621/622
7.2	1 057 099	1	RÜCKENGURT CODE 46-442-621/622
7.2	1 057 100	1	RÜCKENGURT CODE 48-442-621/622



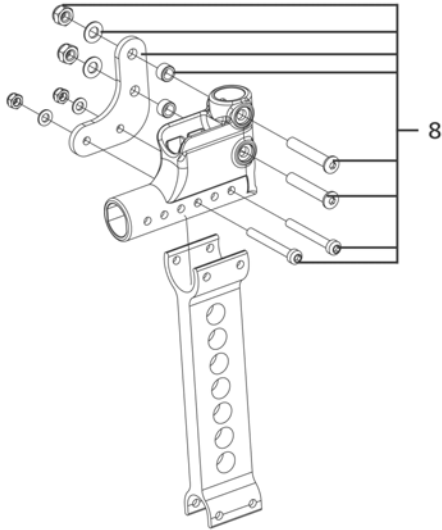
U-Bg.: Code 502; Höhenverstellbare Schiebegriffe

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
Code 502; Höhenverstellbare Schiebegriffe			
7	5 005 725	1	SCHIEBEROHR MONT. (1 STÜCK) FÜR CODE 502
-	1 061 553	2	HANDGRIFF FÜR ROHR D=22MM L=108 MM - EINSEITIG OFFEN
7	5 005 726	1	SCHIEBEROHR MONT. (1 STÜCK) FÜR CODE 502-687
7.1	1 000 709	2	EINRASTFEDER
8	5 005 727	1	BEFESTIGUNG MONT. (1 STÜCK) FÜR CODE 502
-	1 032 982	2	SCHIEBEGRIFFBEFESTIGUNG
-	205 111 800	2	KIPP-KLEMMHEBEL SCHWARZ M8X30
-	207 123 000	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 X 20 DIN 912 8.8 VERZ.VC3 BSCHICHTE
-	207 330 100	4	SCHEIBE DIN 125 B 5,3
-	207 324 100	2	HUTMUTTER DIN 986/5 M 8
-	207 330 300	6	SCHEIBE B 8,4 DIN 125
Code 621; Rücken ohne Lumbalnicker			
-	1 058 299	2	RÜCKENROHR KPL. CODE 442/628-502-621
-	5 006 354	1	SCHIEBEGRIFF MONT. RH 40/42 CM CODE 502-621-635/442
-	5 006 355	1	SCHIEBEGRIFF MONT. RH 40/42 CM CODE 502-621-635/442-706-707
Code 622; Rücken mit Lumbalnicker			
-	1 057 863	2	RÜCKENROHR KPL. CODE 442/628-502-622
-	5 006 267	1	SCHIEBEGRIFF MONT. RH 40/42 CM CODE 502-622-635/442
-	5 006 268	1	SCHIEBEGRIFF MONT. RH 40/42 CM CODE 502-622-635/442-706-707

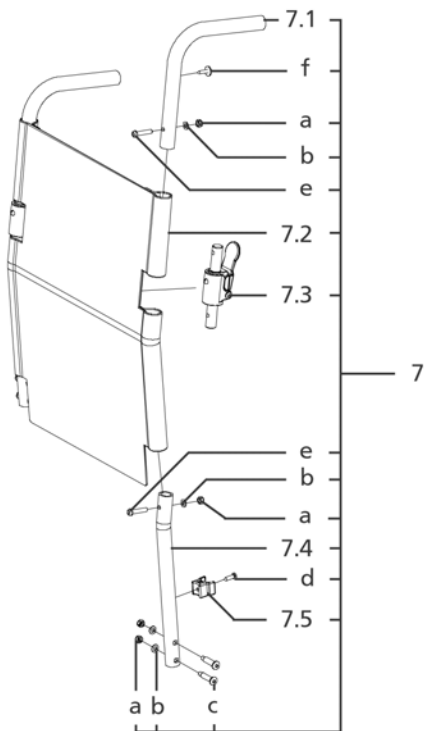


U-Bg.: Code 814; Querliegende Schiebestange

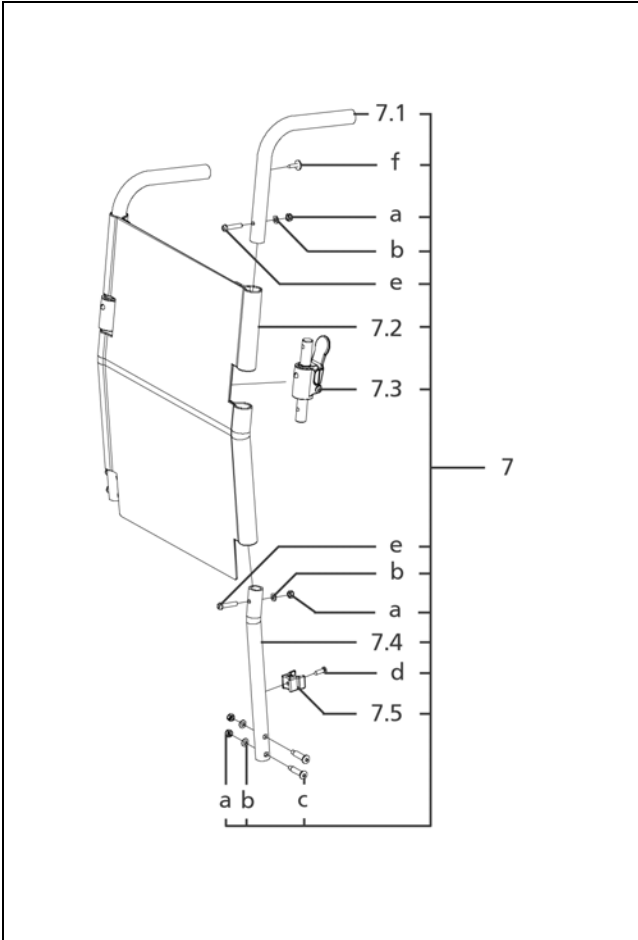
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
7.1	1 061 552	2	HANDGRIFF FÜR ROHR D=22MM L=108 MM - BEIDSEITIG OFFEN
7.2	1 063 498	2	GEWINDESTÜCK M8 FÜR ID=16,0 MM
7.4	205 021 500	2	HANDR.M.SCHR. D/55 M8X20 DIN 934 8.8 VZ
a	205 525 700	4	POP-BLINDNIET D/4 NR.307 474
7	1 063 499	1	QUERLIEGENDE SCHIEBESTANGE CODE 38-814
7.3	1 063 490	1	SCHIEBEROHR VOLLST.
7	1 063 500	1	QUERLIEGENDE SCHIEBESTANGE CODE 40-814
7.3	1 063 491	1	SCHIEBEROHR VOLLST.
7	1 063 501	1	QUERLIEGENDE SCHIEBESTANGE CODE 43-814
7.3	1 063 492	1	SCHIEBEROHR VOLLST.
7	1 063 502	1	QUERLIEGENDE SCHIEBESTANGE CODE 46-814
7.3	1 063 493	1	SCHIEBEROHR VOLLST.
7	1 063 503	1	QUERLIEGENDE SCHIEBESTANGE CODE 48-814
7.3	1 063 494	1	SCHIEBEROHR VOLLST.
7	1 063 504	1	QUERLIEGENDE SCHIEBESTANGE CODE 350-814
7.3	1 063 495	1	SCHIEBEROHR VOLLST.
7	1 063 505	1	QUERLIEGENDE SCHIEBESTANGE CODE 53-814
7.3	1 063 496	1	SCHIEBEROHR VOLLST.

EUROCHAIR-VARIO / c
Baugruppe: Rücken

U-Bg.: Code 903; verstärkte Rückenrohraufnahme

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
8	1 057 537	1	RÜCKENROHRAUFNAHMEVERSTÄRKUNG 1 SATZ

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

U-Bg.: Code 820; in Höhe der Armlehne abklappbare Rückenlehne

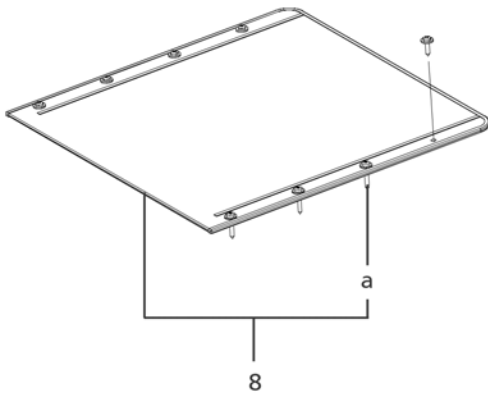
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 061 553	2	HANDGRIFF FÜR ROHR D=22MM L=108 MM - EINSEITIG OFFEN
7.1	1 058 410	2	RÜCKENOBERRÖHR
7.3	1 058 412	2	RÜCKENROHRGELENK
7.4	1 058 411	2	RÜCKENUNTERROHR
7.5	205 016 906	2	SEITENTEILANLAGE SCHWARZ POLYAMID 6 RAL 9005
a	207 320 100	8	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M6
b	207 330 200	8	SCHIBE DIN 125 B 6,4
c	1 056 792	4	ANSATZSCHRAUBE M 6 MIT IN.6KT. 10.9 A3T (SONDERSCHRAUBE)
d	207 300 300	2	LINSENBLECHSCHRAUBE B 4,8X19 DIN 7981 SCHWARZ
e	207 317 500	2	BLECHSCHRAUBE DIN 7981 4,8X22 SCHWARZ
f	207 380 200	4	LINSENSCHRAUBE M 6 X 30 DIN 7380 10.9 A3T



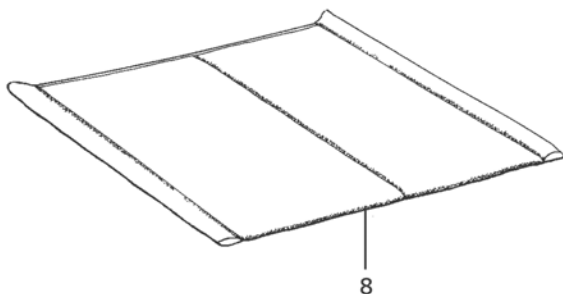
U-Bg.: Code 820; in Höhe der Armlehne abklappbare Rückenlehne

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
7	1 058 517	1	RÜCKEN CODE 38-442-820
7.2	1 058 865	1	RÜCKENGURT VOLLST. CODE 38-442-820
7	1 058 511	1	RÜCKEN CODE 40-442-820
7.2	1 058 866	1	RÜCKENGURT VOLLST. CODE 40-442-820
7	1 058 512	1	RÜCKEN CODE 43-442-820
7.2	1 058 867	1	RÜCKENGURT VOLLST. CODE 43-442-820
7	1 058 513	1	RÜCKEN CODE 46-442-820
7.2	1 058 868	1	RÜCKENGURT VOLLST. CODE 46-442-820
7	1 058 514	1	RÜCKEN CODE 48-442-820
7.2	1 058 869	1	RÜCKENGURT VOLLST. CODE 48-442-820
7	1 058 515	1	RÜCKEN CODE 350-442-820
7.2	1 058 870	1	RÜCKENGURT VOLLST. CODE 350-442-820
7	1 058 516	1	RÜCKEN CODE 53-442-820
7.2	1 058 871	1	RÜCKENGURT VOLLST. CODE 53-442-820

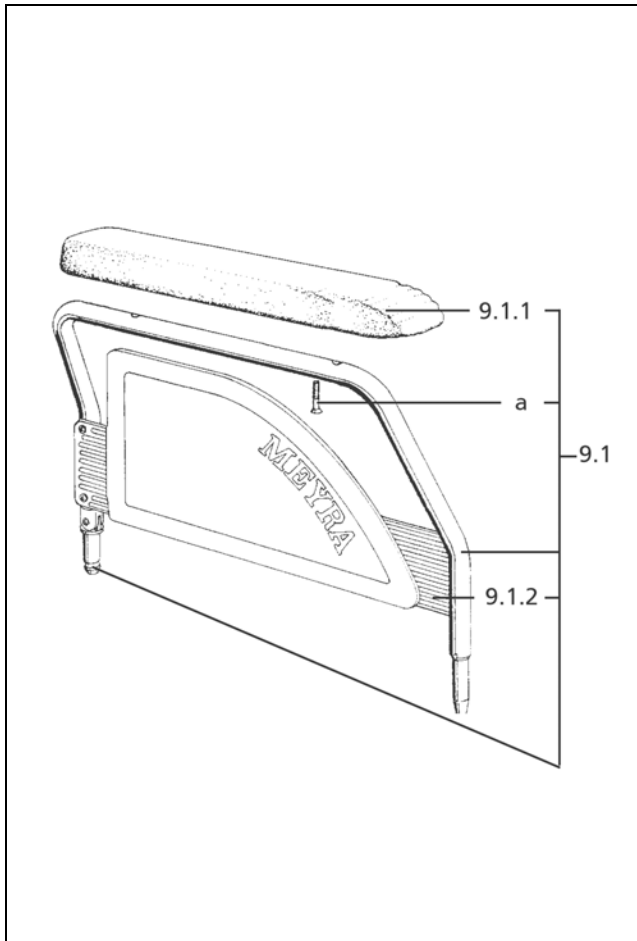


EUROCHAIR-VARIO / c
Baugruppe: Sitz

U-Bg.: Version 1; Sitzgurte geschraubt

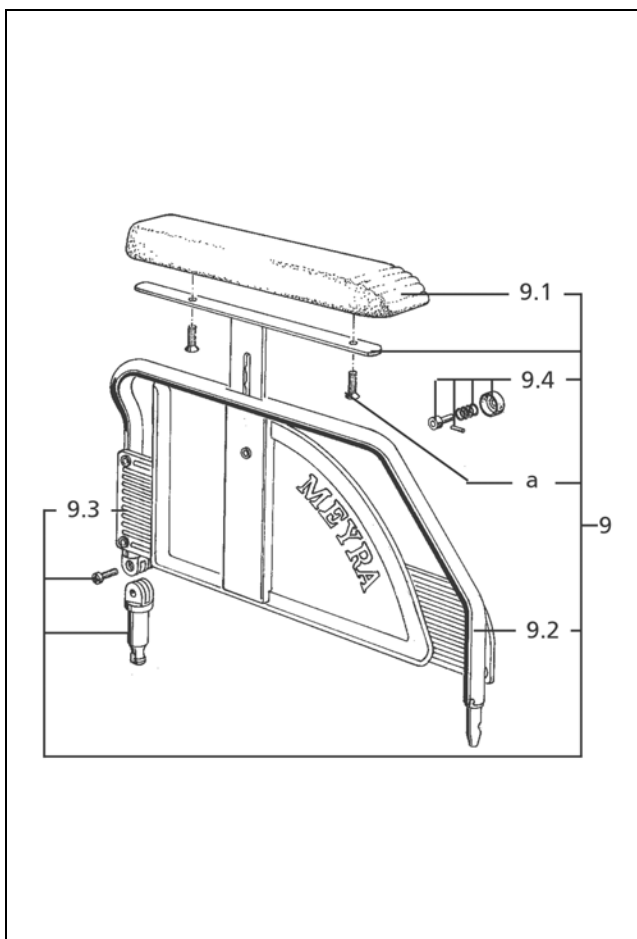
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
a	207 317 500	8	BLECHSCHRAUBE DIN 7981 4,8X22 SCHWARZ
-	205 020 700	2	PLASTIK-NIET D 4,2 SCHW.
			Code 615; Sitzgurttiefe 40cm
-	1 057 933	1	SITZ CODE 38-615
-	1 057 934	1	SITZ CODE 40-615
-	1 057 935	1	SITZ CODE 43-615
-	1 057 936	1	SITZ CODE 46-615
-	1 057 937	1	SITZ CODE 48-615
-	207 317 500	10	BLECHSCHRAUBE DIN 7981 4,8X22 SCHWARZ
-	1 058 147	2	SITZROHRVERLÄNGERUNG FÜR CODE 619
-	205 056 906	2	RUNDZUSCHNITT D6x420
			Code 619; Sitzgurttiefe 46cm
8	1 058 157	1	SITZ CODE 38-619
8	1 058 158	1	SITZ CODE 40-619
8	1 058 159	1	SITZ CODE 43-619
8	1 058 280	1	SITZ CODE 46-619
8	1 058 281	1	SITZ CODE 48-619
-	1 057 904	2	DISTANZPROFIL (VON CODE 788 AUF 619)
			->(von Sitzgurttiefe 43cm auf 46cm immer 2x 1057904 mitbestellen.)
			Code 788; Sitzgurttiefe 43cm
-	1 057 927	1	SITZ CODE 38-788
-	1 057 928	1	SITZ CODE 40-788
-	1 057 929	1	SITZ CODE 43-788
-	1 057 930	1	SITZ CODE 46-788
-	1 057 931	1	SITZ CODE 48-788


U-Bg.: Version 2; Sitzgurte gesteckt

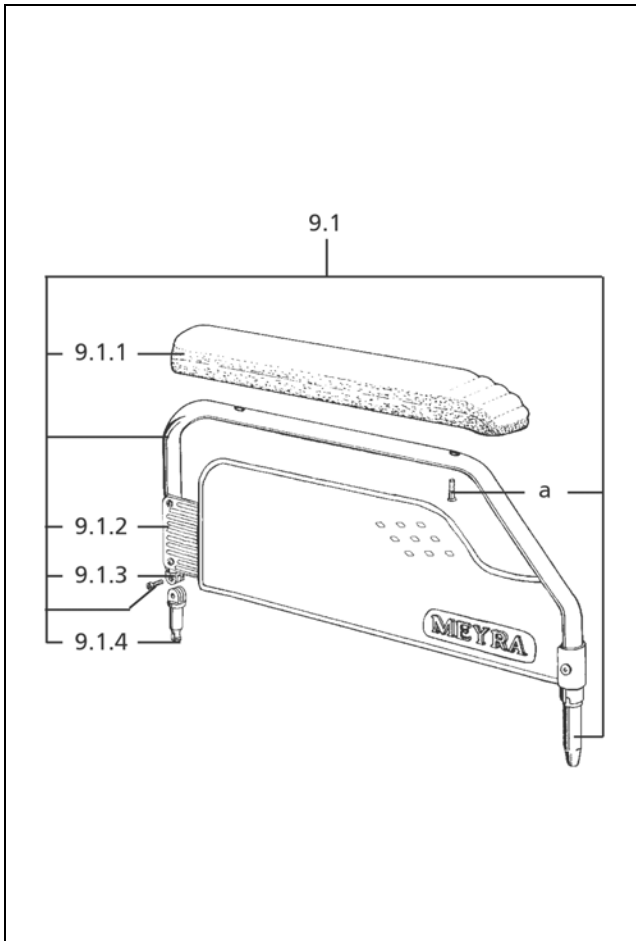
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	205 214 806	4	KUNSTSTOFF-GLEITER
-	1 039 715	2	ROHRZWISCHENSTÜCK
-	205 056 906	2	RUNDZUSCHNITT D6x420
			Code 615; Sitzgurttiefe 40cm
-	1 041 931	1	SITZ CODE 350-615
-	1 054 828	1	SITZ CODE 53-615
-	205 213 206	2	DISTANZBUCHSE
-	1 039 725	2	DISTANZROHR
-	205 057 006	2	RUNDZUSCHNITT D6x443
-	205 214 806	2	KUNSTSTOFF-GLEITER
-	1 039 714	2	VERLÄNGERUNGSROHR
			Code 619; Sitzgurttiefe 46cm
8	1 041 935	1	SITZ CODE 350-619
8	1 054 829	1	SITZ CODE 53-619
			Code 788; Sitzgurttiefe 43cm
-	1 041 933	1	SITZ CODE 350-788
-	1 054 830	1	SITZ CODE 53-788


U-Bg.: Code 70; Seitenteil lang, abschwenkbar, abnehmbar

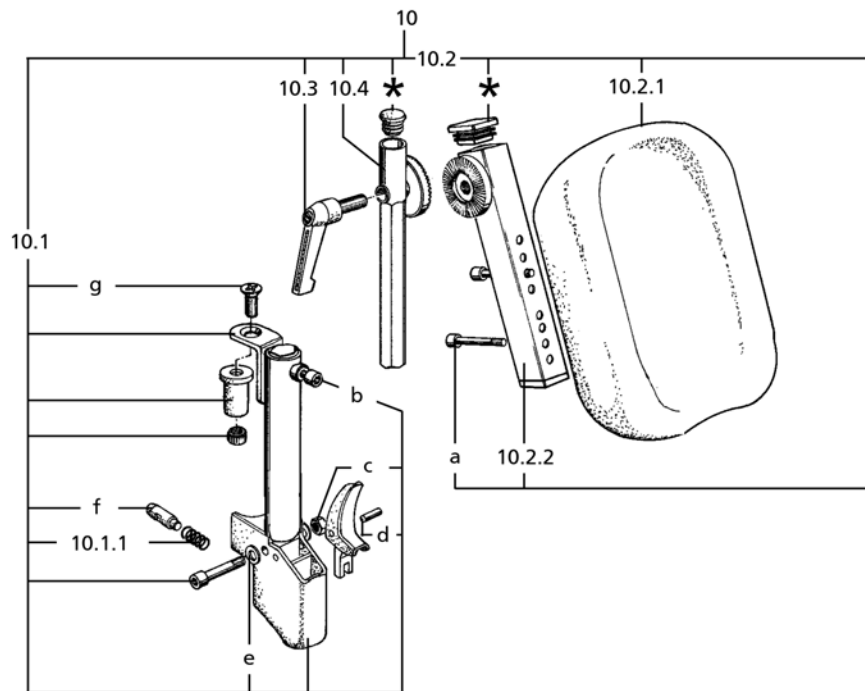
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	1 048 988	1	SEITENTEILE CODE 70 (PAAR)
9.1	1 048 984	1	SEITENTEIL RECHTS MONT. CODE 70
9.1a	1 048 987	1	SEITENTEIL LINKS MONT. CODE 70
9.1.1	1 036 479	1	ARMLEHNE RECHTS - POLSTER (L=360MM;B=56MM;H=26MM)
9.1.1a	1 036 473	1	ARMLEHNE LINKS -POLSTER (L=360MM;B=56MM;H=26MM)
9.1.2	205 215 906	1	SEITENTEIL RECHTS
9.1.2a	205 215 806	1	SEITENTEIL LINKS
a	207 119 700	4	LINSENKSCRAUBE M 6 X 35 DIN 966 4.8 MIT KREUZSCHLITZ
-	207 341 300	2	LINSENKSCRAUBE DIN 7985 M 5X25 4.8 A3T
-	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M5
-	205 525 700	4	POP-BLINDNIET D/4 NR.307 474
-	205 515 400	2	POP-BLINDNIET D/4 NR. 307472
-	205 571 600	4	POP-BLINDNIET D=4x22,5


U-Bg.: Code 107; Seitenteil abschwenkbar, höhenverstellbar, abnehmbar

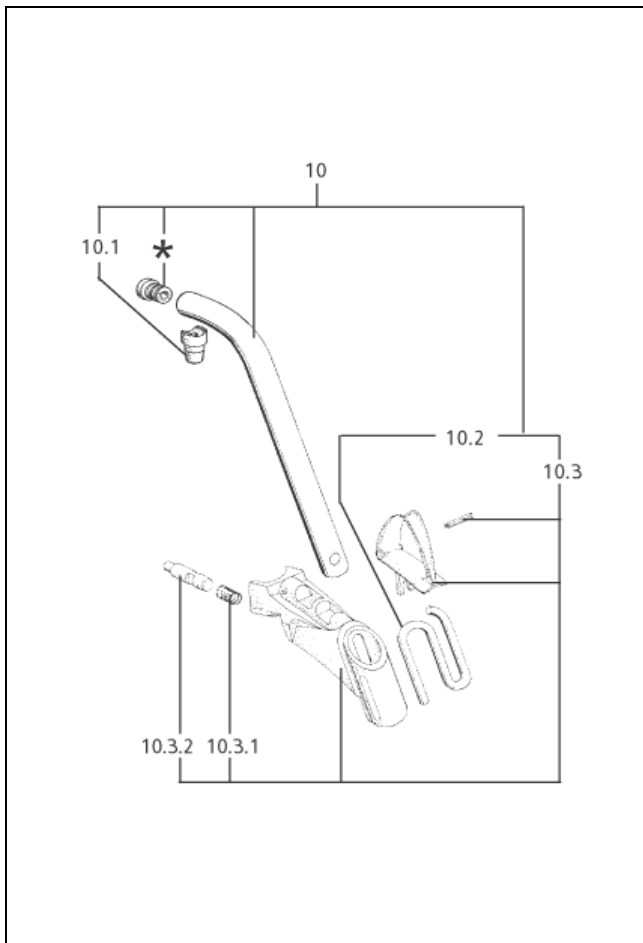
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	1 044 119	1	SEITENTEILE CODE 107 KPL.1PAAR
9	1 044 118	1	SEITENTEIL RECHTS MONT.
9a	1 044 113	1	SEITENTEIL LINKS MONT.
-	1 044 117	1	ARMLEHNE RECHTS MONT.
-	1 044 116	1	ARMLEHNE LINKS MONT.
9.1	1 039 107	1	ARMLEHNE RECHTS - POLSTER (L=307MM;B=60MM;H=26MM)
9.1a	1 039 106	1	ARMLEHNE LINKS - POLSTER (L=307MM;B=60MM;H=26MM)
9.2	1 042 119	1	SEITENROHRBÜGEL RECHTS
9.2a	1 042 118	1	SEITENROHRBÜGEL LINKS
9.3	205 222 806	1	SEITENTEIL RECHTS ABS SCHWARZ
9.3a	205 222 706	1	SEITENTEIL LINKS ABS SCHWARZ
9.4	5 005 740	2	AUSLÖSEHEBEL MONT.
a	207 580 100	4	SENKSCRAUBE M 6 X 12 DIN 965 4,8 A3K
-	205 571 600	4	POP-BLINDNIET D=4x22,5
-	205 515 400	2	POP-BLINDNIET D/4 NR. 307472
-	205 528 600	2	POP-BLINDNIET D/4X9,9

EUROCHAIR-VARIO / c
Baugruppe: Seitenteil

U-Bg.: Code 577; Abklappbares Seitenteil mit Kunststoffeinsatz Stahl

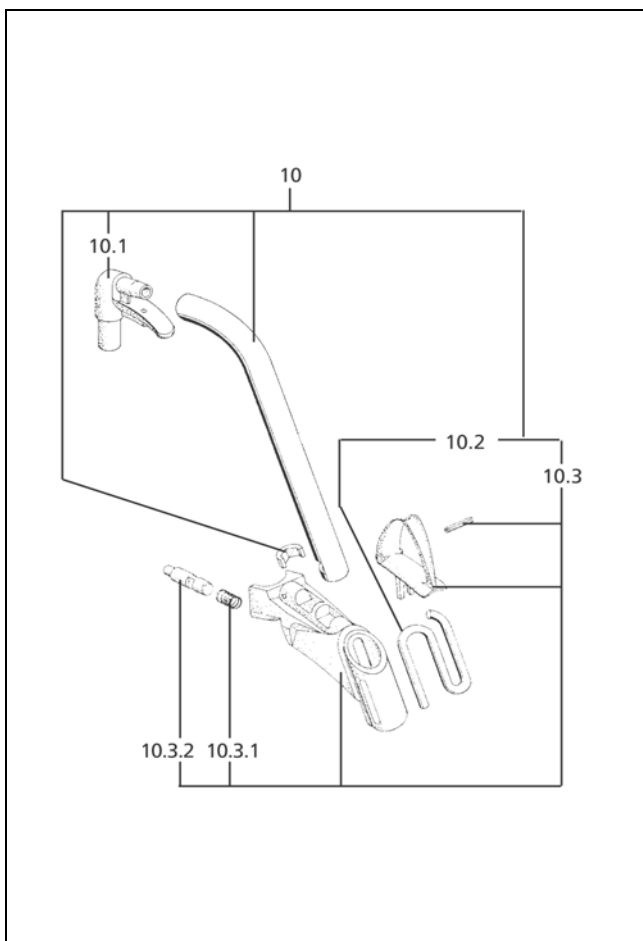
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	1 054 280	1	SEITENTEILE CODE 577 (PAAR)
9.1	1 052 959	1	SEITENTEIL RECHTS MONT. CODE 577
9.1a	1 052 958	1	SEITENTEIL LINKS MONT. CODE 577
9.1.1	1 039 107	1	ARMLEHNE RECHTS - POLSTER (L=307MM;B=60MM;H=26MM)
9.1.1a	1 039 106	1	ARMLEHNE LINKS - POLSTER (L=307MM;B=60MM;H=26MM)
9.1.2	1 052 950	1	SEITENTEIL RECHTS (NUR KUNSTSTOFFTEIL)
9.1.2a	1 052 945	1	SEITENTEIL LINKS (NUR KUNSTSTOFFTEIL)
9.1.3	1 052 948	2	GABELLAGERUNG OBEN (FÜR 15.8MM INNEND.)
9.1.4	205 221 906	2	GABELAUFNAHME UNTEN
-	1 052 947	2	FÜHRUNGSSPITZE
a	207 119 700	4	LINSENSENKSCRAUBE M 6 X 35 DIN 966 4.8 MIT KREUZSCHLITZ
-	207 341 300	2	LINSENSENKSCRAUBE DIN 7985 M 5X25 4.8 A3T
-	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M5
-	205 571 000	2	POP-BLINDNIET D=4 X 13,9 NR. 304 475
-	205 570 400	2	POP-BLINDNIET 4X10,3

**U-Bg.: Code 52; Amputations-Beinstütze**

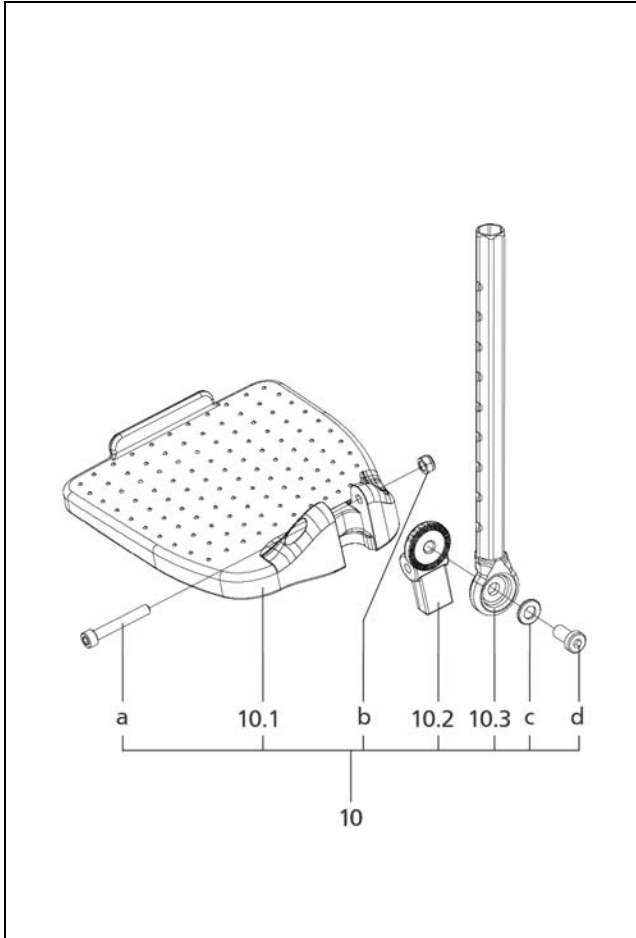
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	1 045 563	1	AMPUTATIONS-BEINSTÜTZE CODE 52
10	1 045 562	1	AMPUTATIONS-BEINSTÜTZE RECHTS MONT. CODE 52
10a	1 045 561	1	AMPUTATIONS-BEINSTÜTZE LINKS MONT. CODE 52
10.1	1 045 560	2	BEINSTÜTZHALTER MONT.
10.1.1	206 323 000	2	DRUCKFEDER D-151 A
10.2	5 005 808	2	WADENPOLSTER MONT.
10.2.1	205 104 006	2	WADENAUFLEGE SCHWARZ
10.2.2	1 045 544	2	AUFLAGEROHR
10.3	205 113 300	2	KIPP-KLEMMHEBEL M8X50
10.4	1 045 553	2	EINSTECKROHR
a	207 192 700	4	ZYLINDERSCHRAUBE M 5 x 35 DIN 912 10.9
b	207 193 300	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 8 X 12 DIN 912 8.8
c	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M6
d	207 907 500	2	KNEBELKERBSTIFT 3X24 DIN 1475
e	207 335 100	4	SCHEIBE B 6,4 DIN 9021
f	205 222 206	2	VERRIEGELUNGSBOLZEN
g	207 342 900	4	SENKSCHRAUBE DIN 965 M8X25 8.8
-	205 222 106	2	ENTRIEGLUNGSHABEL
-	207 302 200	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6X40 DIN912
*	5 005 457	1	KLEINTEILESATZ (KUNSTSTOFFGLEITER)


U-Bg.: Code 93; abnehmbare Beinstützen abschwenkbar (für Rundrohr)

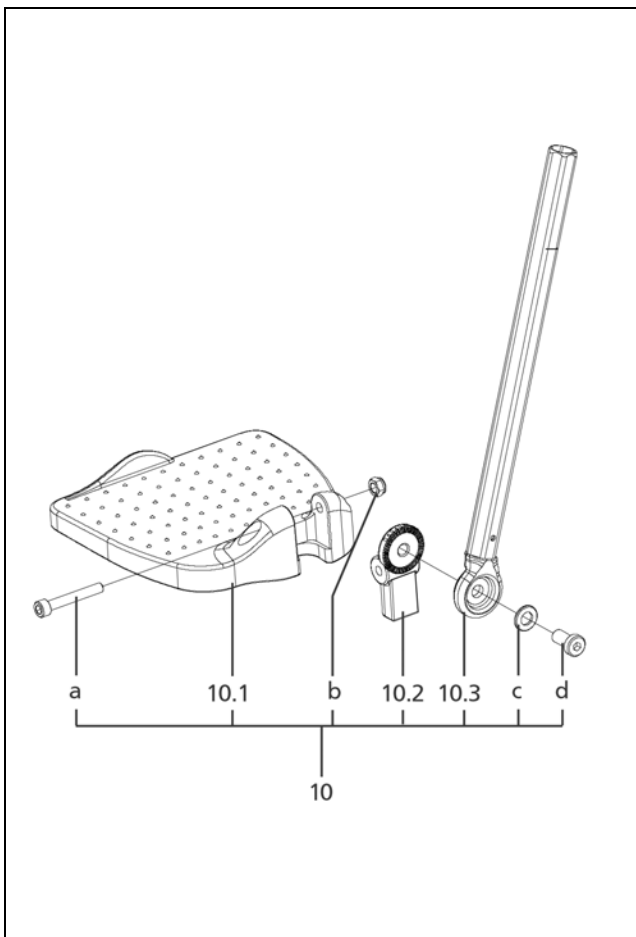
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	1 054 134	1	BEINSTÜTZE CODE 38-93 KPL.
-	1 044 499	1	BEINSTÜTZE CODE 40-93 KPL.
-	1 044 525	1	BEINSTÜTZENOBERTEILE - 1 PAAR CODE 43/48-93
-	1 044 526	1	BEINSTÜTZENOBERTEILE - 1 PAAR CODE 45-93 ->(für 45cm)
-	1 057 898	1	BEINSTÜTZOBERTEILE - 1 PAAR CODE 93-350 ->(für Sitzbreite 50cm)
-	1 057 899	1	BEINSTÜTZOBERTEILE - 1 PAAR CODE 53-93 ->(für Sitzbreite 53cm)
10	1 044 266	1	BEINSTÜTZROHR RECHTS MONT.
10a	1 044 267	1	BEINSTÜTZROHR LINKS MONT.
10.1	1 042 609	2	LAGERZAPFEN
10.2	1 039 515	2	BEINGURTSTIFT
-	1 003 026	1	BEINGURT SB 38/40
-	1 030 237	1	BEINGURT SB 43-50
10.3	1 039 505	2	BEINSTÜTZHALTER KPL.
10.3.1	206 323 000	2	DRUCKFEDER D-151 A
10.3.2	205 214 406	2	VERRIEGELUNGSBOLZEN
-	207 252 600	2	GEWINDESTIFT M8 X 10 DIN 915
-	207 602 800	2	SCHNEIDSCHRAUBE M5X20 DIN 7516
-	207 302 100	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6X35 DIN912
-	207 626 600	2	LINSENSCHR. DIN 7985 M 6 X 30 4.8 A3T
-	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M6
-	207 330 200	2	SCHEIBE DIN 125 B 6,4
*	5 005 457	1	KLEINTEILESATZ (KUNSTSTOFFGLEITER)


U-Bg.: Code 93; abnehmbare Beinstützen abschwenkbar (für Sechskantrohr)

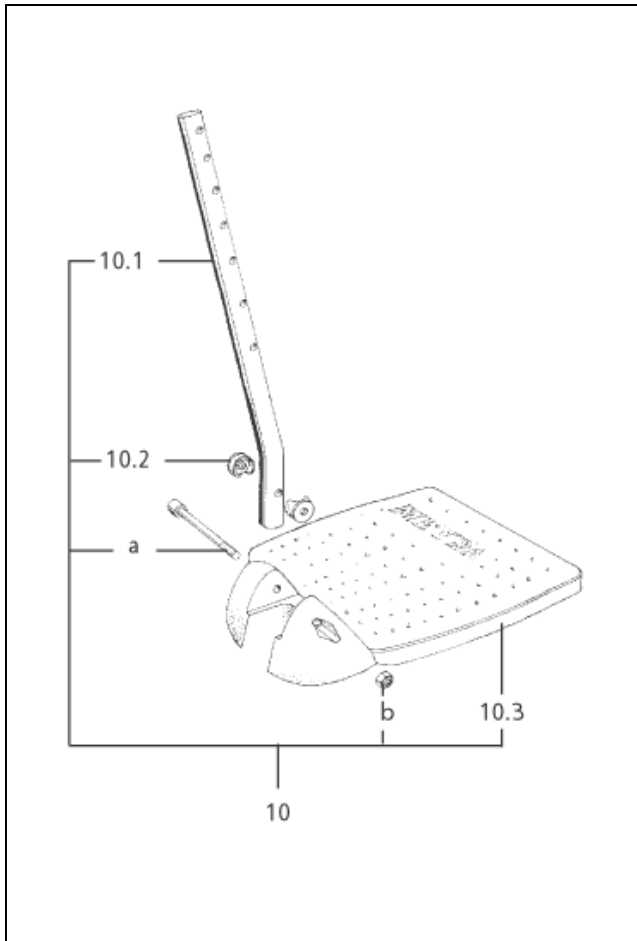
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	1 041 430	1	BEINSTÜTZE KPL. CODE 38/40-93
-	1 041 432	1	BEINSTÜTZOBERTEILE KPL. 1 PAAR CODE 43/46/48/350-93
-	1 054 683	1	BEINSTÜTZE KPL. CODE 53-93
10	1 039 507	1	BEINSTÜTZROHR RECHTS MONT.
10a	1 039 506	1	BEINSTÜTZROHR LINKS MONT.
10.1	205 214 506	2	LAGERZAPFEN
10.2	1 039 515	2	BEINGURTSTIFT
10.3	1 039 505	2	BEINSTÜTZHALTER KPL.
10.3.1	206 323 000	2	DRUCKFEDER D-151 A
10.3.2	205 214 406	2	VERRIEGELUNGSBOLZEN
-	205 047 700	2	VERSCHLUßKAPPE A8
-	207 602 800	2	SCHNEIDSCHRAUBE M5X20 DIN 7516
-	207 252 600	4	GEWINDESTIFT M8 X 10 DIN 915
-	1 003 026	1	BEINGURT SB 38/40 ->(Sitzbreite 38 bis 43cm)
-	1 030 237	1	BEINGURT SB 43-50 ->(ab Sitzbreite 48cm)

EUROCHAIR-VARIO / c
Baugruppe: Beinstützen

U-Bg.: Code 798; Fußplatten winkelverstellbar bis ± 60 Grad (ab ca. Mai 06)

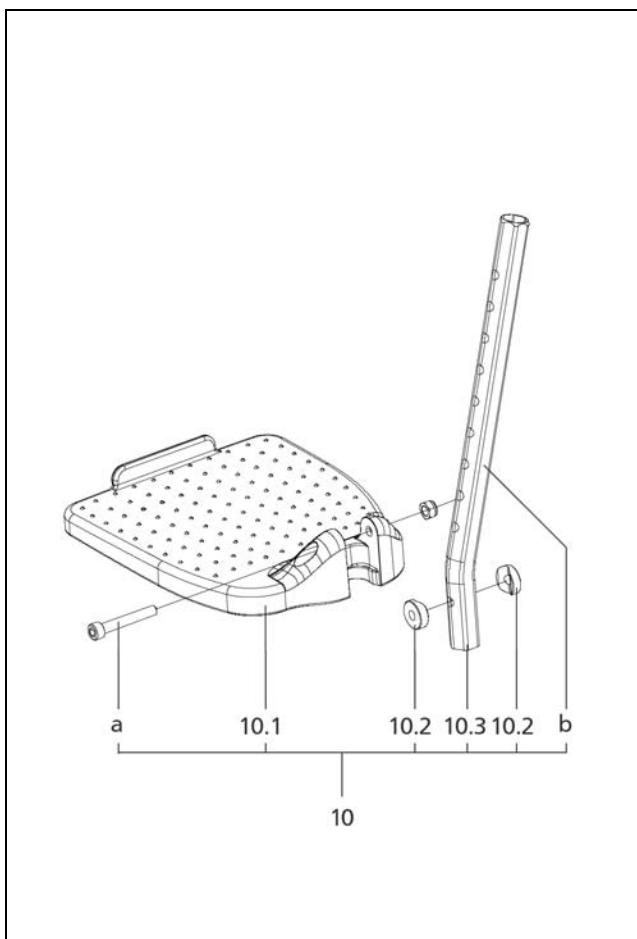
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
–	1 062 575	1	BEINSTÜTZENUNTERTEILE - 1 PAAR CODE 128-798
10	1 057 541	1	FUSSBRETT LINKS MONT. CODE 128-798
10a	1 057 542	1	FUSSBRETT RECHTS MONT. CODE 128-798
10.1	1 059 642	1	FUSSBRETT LINKS
10.1a	1 059 645	1	FUSSBRETT RECHTS
10.2	1 058 918	2	EINSATZ MIT VERZÄHNUNG
10.3	1 058 913	2	EINSTECKROHR VOLLST.
a	207 302 200	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6X40 DIN912
b	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M6
c	207 330 300	2	SCHEIBE B 8,4 DIN 125
d	207 353 000	2	ZYLINDERSCHRAUBE M8 X 16 DIN7984 8.8 A3T VC3


U-Bg.: Code 128-798; Unterschenkelänge kurz – Fußplatten winkelverstellbar bis 60 Grad

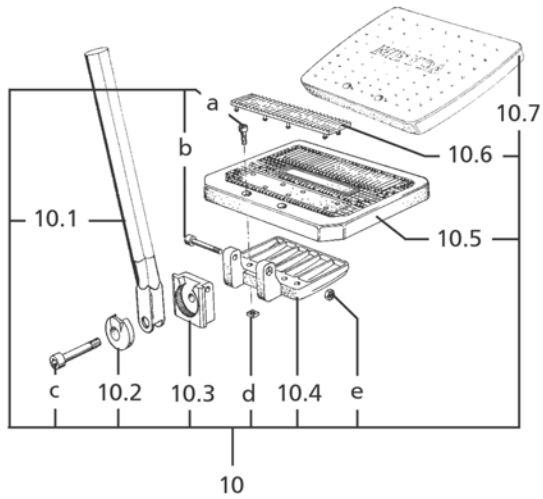
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
10.2	1 058 918	2	EINSATZ MIT VERZÄHNUNG
10.3	1 059 465	2	EINSTECKROHR VOLLST.
a	207 302 200	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6X40 DIN912
b	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M6
c	207 330 300	2	SCHEIBE B 8,4 DIN 125
d	207 353 000	2	ZYLINDERSCHRAUBE M8 X 16 DIN7984 8.8 A3T VC3
Sitzbreite 32 bis 38cm			
–	1 065 642	1	BEINSTÜTZENUNTERTEILE (PAAR) CODE 128-798 SB 32 BIS 38CM
10	1 065 640	1	FUSSBRETT LINKS MONT. CODE 128-798 SB 32 BIS 38CM
10a	1 065 641	1	FUSSBRETT RECHTS MONT. CODE 128-798 SB 32 BIS 38CM
10.1	1 063 570	1	FUSSBRETT KLEIN LINKS
10.1a	1 064 650	1	FUSSBRETT KLEIN RECHTS


U-Bg.: Code 805; Fußplatten Kunststoff geteilt (bis ca. April 06)

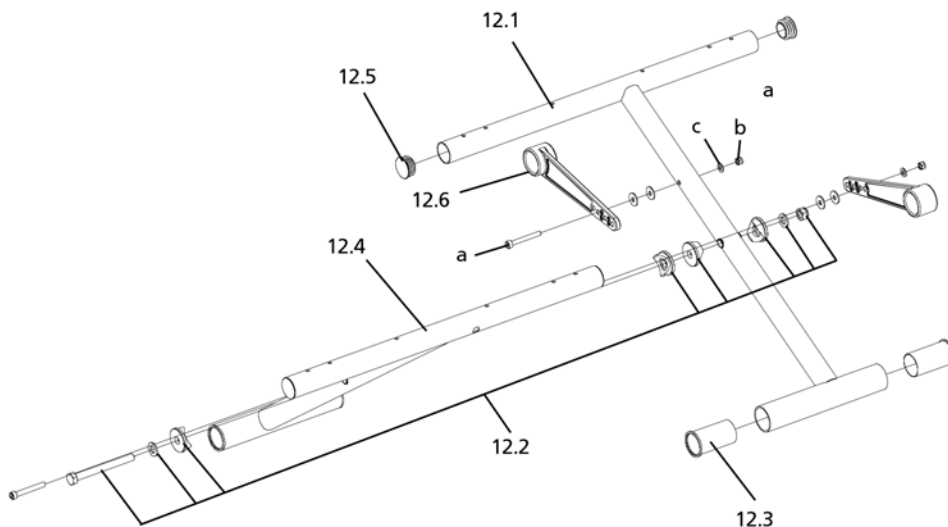
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
10.2	1 053 032	4	GELENKSCHEIBE
10.1	1 054 123	2	EINSTECKROHR
a	207 302 200	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6X40 DIN912
b	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M6
10.3	1 053 028	1	FUSSBRETT RECHTS FÜR CODE 38/40-805
10.3a	1 053 030	1	FUSSBRETT LINKS FÜR CODE 38/40-805
10.3	1 053 029	1	FUSSBRETT RECHTS FÜR CODE 43/45/46/48-805
10.3a	1 053 031	1	FUSSBRETT LINKS FÜR CODE 43/45/46/48-805


U-Bg.: Code 805; Fußplatten Kunststoff geteilt (ab ca. Mai 06)

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	1 059 649	1	EINSTECKROHRE CODE 805-128 1 PAAR
10	1 059 644	1	FUSSBRETT LINKS MONT. CODE 128-805
10a	1 059 646	1	FUSSBRETT RECHTS MONT. CODE 128-805
10.1	1 059 642	1	FUSSBRETT LINKS
10.1a	1 059 645	1	FUSSBRETT RECHTS
10.2	1 058 905	2	GELENKSCHEIBE
10.3	1 059 643	2	EINSTECKROHR (FÜR CODE 128)
a	207 302 200	2	ZYLINDERSCHRAUBE M 6X40 DIN912
b	207 320 100	2	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M6

EUROCHAIR-VARIO / c
Baugruppe: Beinstützen

U-Bg.: Code 808; Fußplatten winkelverstellbar (bis ca. April 06)

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
10.1	1 042 647	2	EINSTECKROHR
10.2	1 049 241	2	STOPFEN FÜR CODE 806-808
10.3	205 212 506	2	EINSATZ FÜR FUßPLATTE
10.4	1 042 646	2	FUßPLATTENHALTER
10.6	205 042 706	4	FUßBRETTBELAG EPDM SCHWARZ
a	207 301 700	4	ZYLINDERSCHRAUBE DIN 912 8.8 M 6 X 16
b	207 300 700	2	ZYLINDERSCHR. M 8 X 60 DIN912 8.8
c	207 352 600	2	ZYLINDERSCHRAUBE M8 X 33 DIN 7984
d	207 805 000	4	VIERKANTMUTTER M 6 DIN 562 04
e	207 320 200	2	SICHERUNGSMUTTER DIN 985 - M8 - 8 A3T
-	207 327 700	2	SECHSKANTMUTTER M 8 A3K DIN 439
10.5	205 042 806	1	FUßBRETT BREIT SCHWARZ PA 6 ->(gilt für Sitzbreite 38cm)
10.5	205 217 506	1	FUßBRETT MITTEL ->(gilt für Sitzbreite 40/43cm)
10.7	205 214 706	2	FUßBRETT GROß ->(gilt für Sitzbreite 46-53cm)

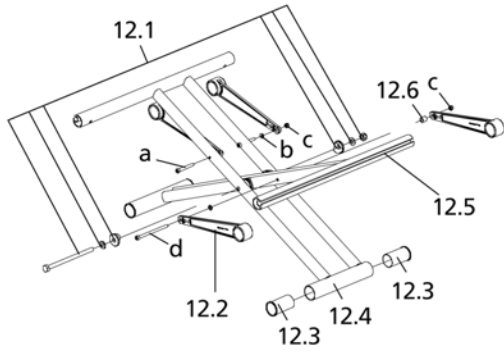


U-Bg.: Scheren

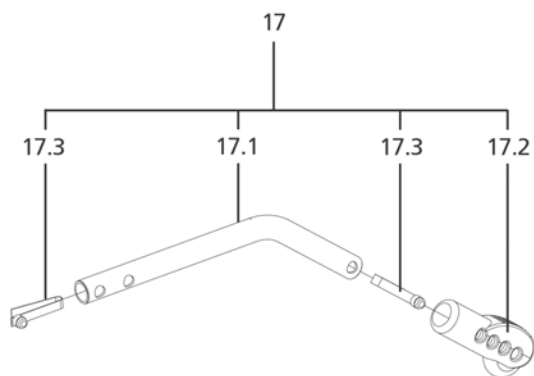
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	205 214 906	4	SCHERENFIXIERUNG
12.2	5 005 449	1	SCHERENVERSCHRAUBUNG KPL.
12.5	8 012 351	4	LAMELLENSTOPFEN, SCHWARZ SFL 25 F.ROHR 25/20-22
12.6	1 054 307	2	SCHERENSTREBE
-	205 221 106	4	SCHERENSTREBE -> Ab Sitzbreite 48 ist eine längere Scherenstrebe montiert.
12.3	205 215 006	4	BUCHSE
a	207 301 600	2	ZYLINDERSCHRAUBE M5X40 DIN 912 8.8
b	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M5
c	207 330 100	2	SCHEIBE DIN 125 B 5,3
Code 38; Sitzbreite 38cm			
-	1 057 841	1	SCHERE MONT. SB 38
12.4	1 057 671	1	VORDERE SCHERENHÄLFTE
12.1	1 057 672	1	HINTERE SCHERENHÄLFTE
Code 40; Sitzbreite 40cm			
-	1 057 842	1	SCHERE MONT. SB 40
-	1 057 673	1	VORDERE SCHERENHÄLFTE
-	1 057 674	1	HINTERE SCHERENHÄLFTE
Code 43; Sitzbreite 43cm			
-	1 057 843	1	SCHERE MONT. SB 43
-	1 057 675	1	VORDERE SCHERENHÄLFTE
-	1 057 676	1	HINTERE SCHERENHÄLFTE

U-Bg.: Scheren

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
Code 46; Sitzbreite 46cm			
-	1 057 844	1	SCHERE MONT. SB 46
-	1 057 677	1	VORDERE SCHERENHÄLFTE
-	1 057 678	1	HINTERE SCHERENHÄLFTE
Code 48; Sitzbreite 48cm			
-	1 057 845	1	SCHERE MONT. SB 48
-	1 057 679	1	VORDERE SCHERENHÄLFTE
-	1 057 840	1	HINTERE SCHERENHÄLFTE

EUROCHAIR-VARIO / c
Baugruppe: Scheren

U-Bg.: Code 350/53; Sitzbreite 50/53

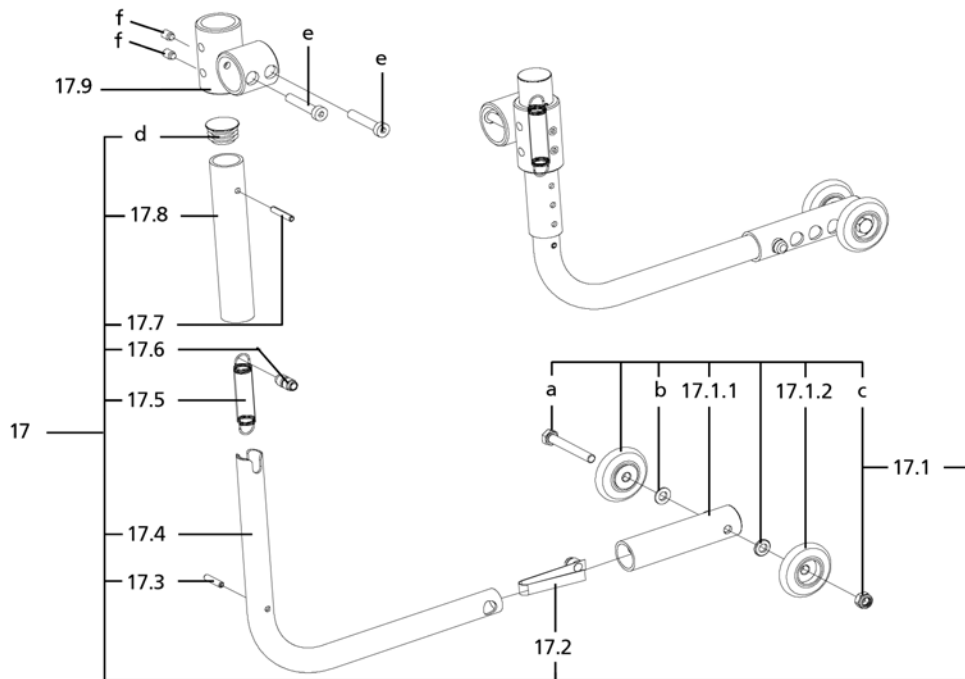
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
12.3	205 215 006	4	BUCHSE
-	205 214 906	4	SCHERENFIXIERUNG
-	5 005 574	1	SCHERENVERSCHRAUBUNG KPL.
-	1 041 408	1	DISTANZROHR
a	207 301 600	2	ZYLINDERSCHRAUBE M5X40 DIN 912 8.8
b	207 322 000	2	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M5
c	207 330 100	2	SCHEIBE DIN 125 B 5,3
Code 350; Sitzbreite 50cm			
-	1 041 409	1	SCHERE MONT. SB 50
12.4	1 041 406	1	SCHERENHÄLFTE AUßEN
12.5	1 041 404	1	SCHERENHÄLFTE INNEN
Code 53; Sitzbreite 53cm			
12.4	1 047 272	1	SCHERENHÄLFTE AUßEN CODE 53
15.5	1 047 273	1	SCHERENHÄLFTE INNEN CODE 53


U-Bg.: Code 691; Einsteckbare Stützrollen

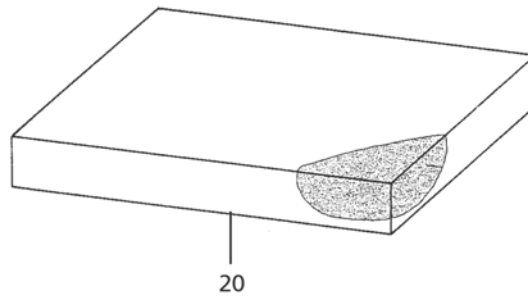
Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	1 062 311	2	AUFTRITTKAPPE L=45MM DI=24MM DA=34MM
-	1 062 312	2	STOPFEN MIT KERBE
-	1 059 825	1	STÜTZROLLEN CODE 691 - 1 PAAR (NEU SEIT 03/2006)
17	1 059 824	2	STÜTZROLLE MONT.
17.1	1 057 854	2	STÜTZROHR
17.2	1 058 838	2	STÜTZTEIL (FÜR ROHR D=21,0MM)
17.3	1 040 688	4	EINRASTFEDER

Code 173-691; Sitzhöhe 39cm

-	1 062 701	1	STÜTZROLLEN CODE 173-691 HEMI 1 PAAR
-	8 458 786	2	KLEMMSCHELLE F.STÜTZROLLE INNEN ALMGSI0,5 F25
-	8 458 778	2	KLEMMSCHELLE F.STÜTZROLLE AUß.ALMGSI0,5 F25 B80519
a	207 126 000	4	ZYLINDERSCHR. M 6 X 25 DIN 912 8.8 M.VC 3 BESCH

EUROCHAIR-VARIO / c
Baugruppe: Stützrollen

U-Bg.: Code 728; abschwenkbare Stützrolle

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
-	1 058 876	1	ABSCHWENKBARE STÜTZROLLEN CODE 728 - 1 PAAR
17	1 058 878	1	STÜTZROLLE LINKS MONT. (HALTERUNG SEPARAT BESTELLEN!)
-	1 058 879	1	STÜTZROLLE RECHTS MONT. (HALTERUNG SEPARAT BESTELLEN!)
17.1	1 042 485	1	VERSTELLROHR MONT.
17.1.1	1 042 484	1	VERSTELLROHR KPL.
17.1.2	205 209 606	2	ROLLE 40MM PA 6,6 SCHWARZ
17.2	1 040 688	1	EINRASTFEDER
17.3	207 049 000	1	SPANNSTIFT 4 X 18 DIN 1481
17.4	1 058 877	1	SCHWENKROHR
17.5	206 309 100	1	ZUGFEDER Z-100 J
17.6	1 044 979	1	HÜLSE FEDERAUFNAHME
17.7	207 914 800	2	SPANNSTIFT 4 X 22 DIN 1481
17.8	1 044 978	1	FÜHRUNGSRÖHR
17.9	1 058 146	1	RANGIERROLLENAUFNAHME
a	207 300 400	1	SECHSKANTSCHR. M 6 X 45 DIN931 8.8
b	207 330 200	2	SCHEIBE DIN 125 B 6,4
c	207 320 100	1	SICHERUNGSMUTTER DIN 985/8 M6
d	205 047 400	1	RUNDSTOPFEN 22 SFL 22 X 1,5
e	1 055 240	2	SONDERSCHRAUBE M6X33 8.8 A3T
f	207 201 300	2	GEWINDESTIFT M 6 X 8 DIN 915



ST=Sitztiefe
SB=Sitzbreite

		SB 38	SB 40	SB 43	SB 46	SB 48	SB 50	SB 53
ST 40	3 cm	1046377	1046377	1006685	1006705	1046378	1046378	1049053
ST 43	3 cm	1006685	1006685	1006825	1015928	1046382	1046382	1049054
ST 46	3 cm	1006705	1006705	1015928	1015929	1046381	1046381	1049055

EUROCHAIR-VARIO / c
Baugruppe: Zubehör
U-Bg.: Zubehör

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Kleinteile
-	5 005 457	1	KLEINTEILESATZ (KUNSTSTOFFGLEITER)
			Umbausatz
-	5 006 281	1	UMBAUSATZ VON 651 AUF 706
-	1 061 553	4	HANDGRIFF FÜR ROHR D=22MM L=108 MM - EINSEITIG OFFEN
			Code 819; Passive Beleuchtung
-	1 047 486	1	PASSIVE BELEUCHTUNG
-	206 961 500	2	SPEICHENRÜCKSTRAHLER NR. 310
-	206 960 800	4	RÜCKSTRAHLER ROT (31,5X70)
			Code 822; Schuhanschnallriemen
-	1 054 378	1	SCHUHANSCHNALLRIEMEN CODE 822 1 PAAR
			Code 823; Fersenhalter
-	1 054 379	1	FERSENHALTER CODE 823 - 1 PAAR
-	1 058 120	1	FERSENHALTER CODE 805-823 1 PAAR
			Code 833; Sicherheitsgurt
-	1 041 414	1	HALTEGURT KPL. CODE 833
			Code 880; Radstandverlängerung 4cm
-	1 057 861	1	RADSTANDSVERLÄNGERUNG CODE 880 1 PAAR
-	1 057 860	2	DISTANZBUCHSE
			Code 912; Luftpumpe mit Halter
-	1 032 429	1	LUFTPUMPE MIT HALTER CODE 912
-	205 630 300	1	SCHLAUCHPUMPE SCHWARZ 1250300003 (2020) SCHRADER VE.
-	205 538 000	2	LUFTPUMPENHALTER

U-Bg.: Zubehör

Pos.	Artikel-Nr.	St.	Bezeichnung
			Code 917; Umbausatz Armlehnenhöhe stufig einstellbar
-	1 045 846	1	UMBAUSATZ FÜR HÖHENVERSTELLUNG ARMLEHNENPOLSTER CODE 917
			Code 929; Therapietisch aus Plexi - Glas, verstellbar
-	1 064 946	1	THERAPIETISCH MONT. CODE 929 SB 38 BIS 48 CM EINSTELLBAR
-	1 064 947	1	THERAPIETISCH MONT. CODE 929 SB 50 BIS 58 CM EINSTELLBAR
			Code 931; Halbseiten Therapietisch
-	205 651 600	1	HALBSEITENTISCH RECHTS CODE 931
-	205 651 500	1	HALBSEITENTISCH LINKS CODE 931
			Code 936; Rutschbrett
-	205 029 500	1	CODE 936 RUTSCHBRETT
			Code 946; Wadengurt geteilt (an Fußplatte)
-	5 005 608	2	BEINGURT KPL.
			Code 951; Zubehörnetz
-	205 538 400	1	ZUBEHÖRNETZ CODE 951
			Code 962; Rucksack "Life"
-	205 642 506	1	UNIVERSAL-RUCKSACK CODE 962
			Code 970; Stockhalter
-	1 063 168	1	STOCKHALTER KPL. -NACHRÜSTSATZ (CLIPS SCHRAUB-SET) 0684
			Code 986; Bremshebelverlängerung
-	1 045 844	1	BREMSHEBELVERLÄNGERUNG MONT. (WINKEL 30 GRAD)



Ihr Fachhändler

MEYRA-ORTOPEDIA
Vertriebsgesellschaft mbH
Meyra-Ring 2 • D-32689 Kalletal-Kalldorf

MEYRA®
ORTOPEDIA
Wir bewegen Menschen

Postfach 1703 • D-32591 Vlotho
Fon +49(0)5733 922-333
Fax +49(0)5733 922-9333
info@meyra.de • www.meyra.de
info@ortopedia.de • www.ortopedia.de

VIS III / Bestell-Nr. 205311200 Stand: 2007-10 Technische Änderungen vorbehalten.

