


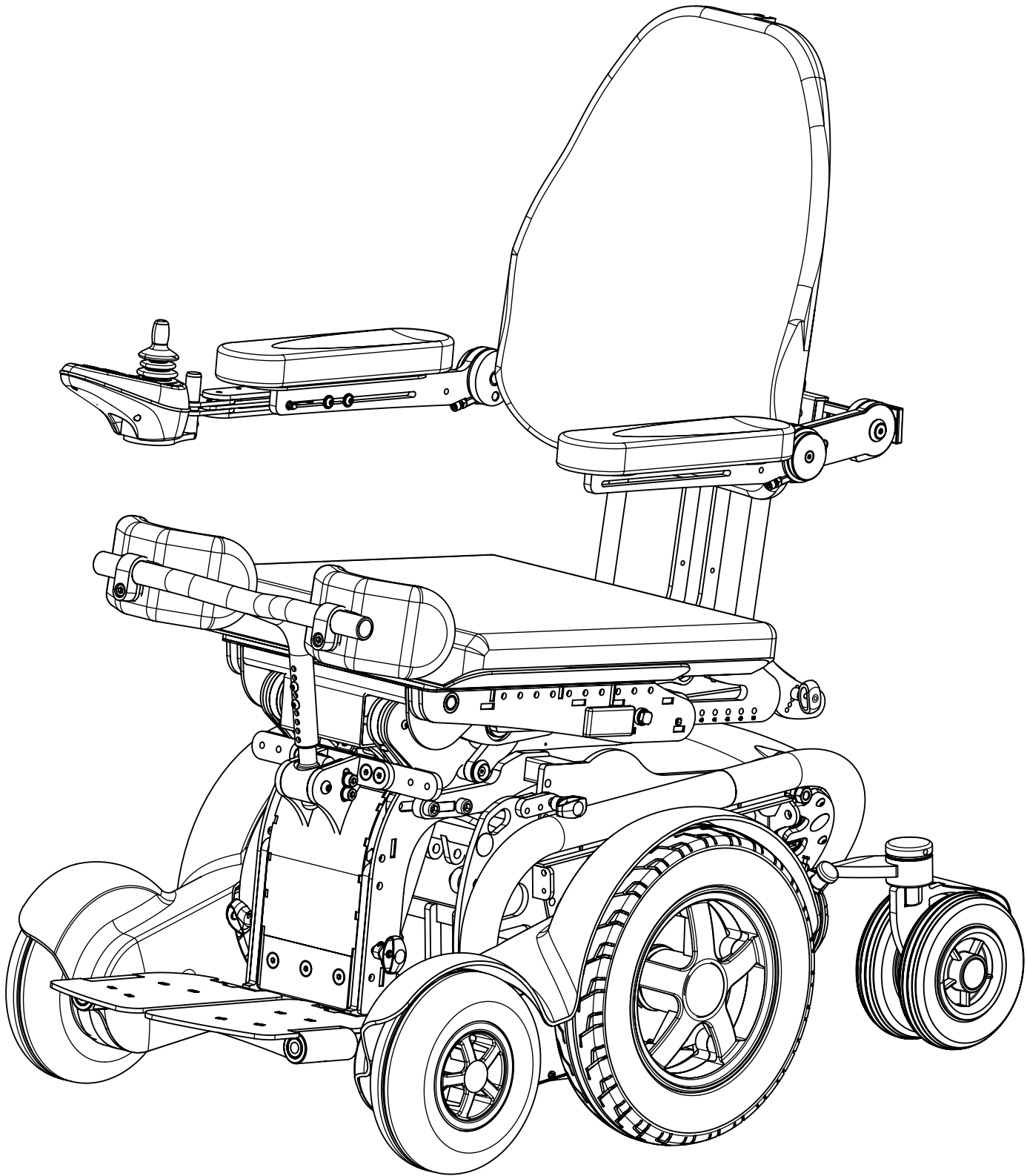


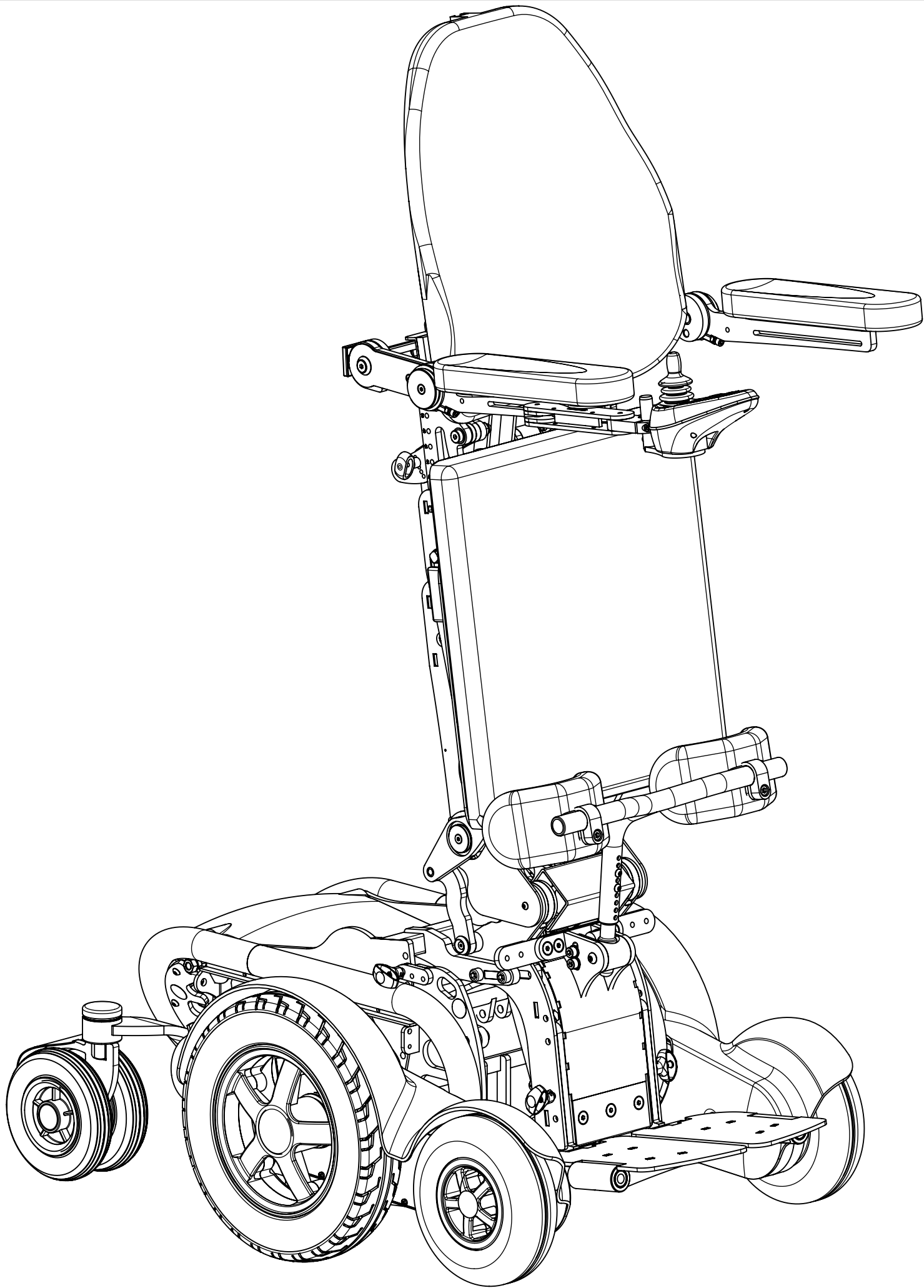

Erstellt <i>Prepared</i>	23.02.2009	PW	Benennung / <i>Description</i> C3			
Geändert <i>Modified</i>		-				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>		-				
Status <i>Status</i>						
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i>	
			C3	50.072.0000	1 / 1	
					Index / <i>Rev.</i>	

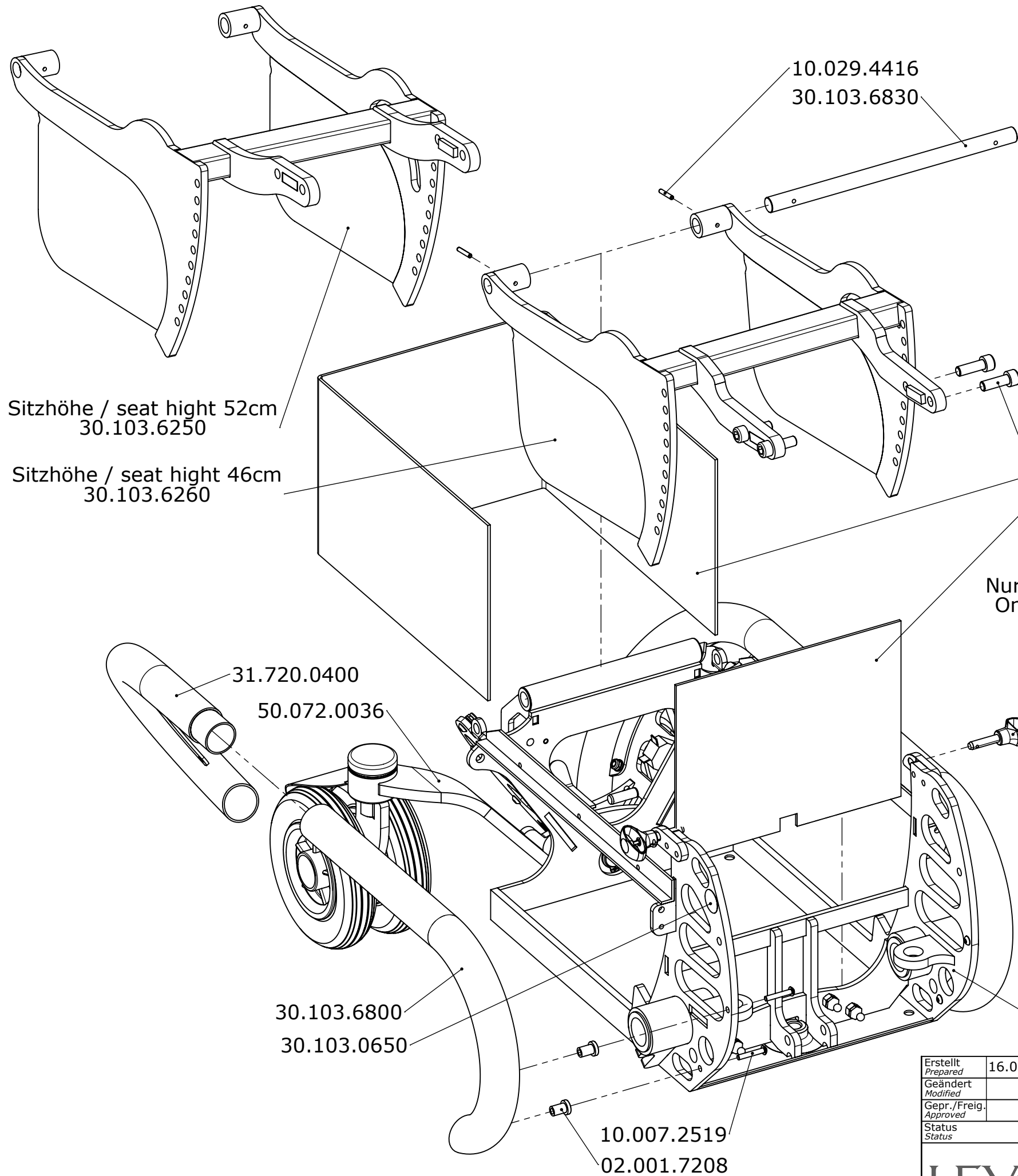


Tilt in Space

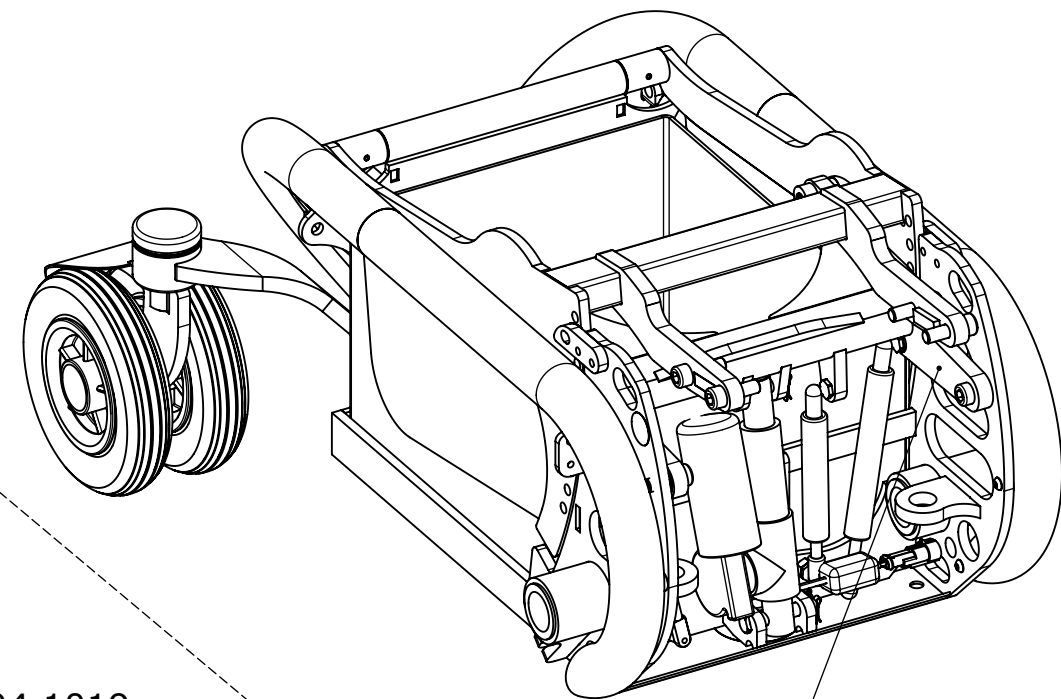


50.072.0020


Nur für Standard nicht für Tilt in Space!
Only for standard not for tilt in space!
02.001.7222

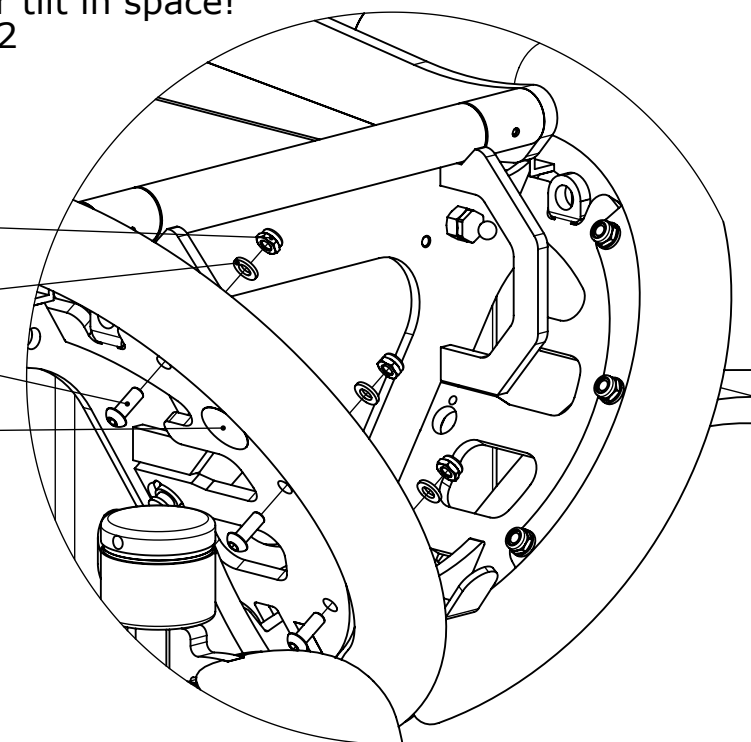


Erstellt <i>Prepared</i>	16.09.2008	PW	Benennung / <i>Description</i>		Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i>
Geändert <i>Modified</i>		-	Grundchassis komplett Base frame complete		
Gepr./Freig. <i>Approved</i>		-			
Status <i>Status</i>					
LEVO[®].<i>ch</i> THE EXPERTS IN STANDING			 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl <i>Wheelchair</i> C3	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.072.0010

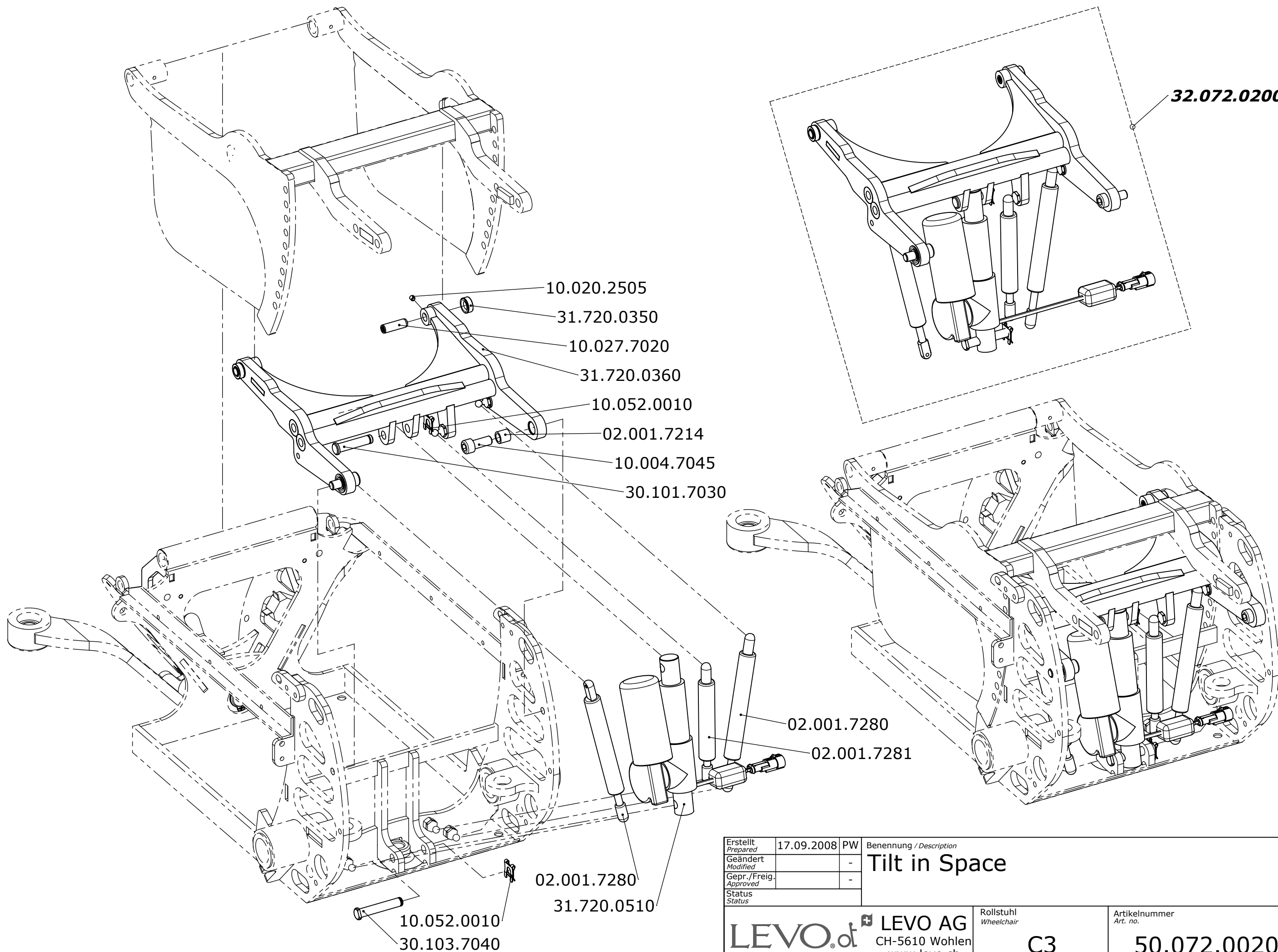


Erstellt <i>Prepared</i>	17.09.2008	PW	Benennung / <i>Description</i>		Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i>
Geändert <i>Modified</i>		-	Tilt in Space		
Gepr./Freig. <i>Approved</i>		-			
Status <i>Status</i>					
LEVO[®]._{dt} THE EXPERTS IN STANDING		 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl <i>Wheelchair</i> C3	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.072.0020	

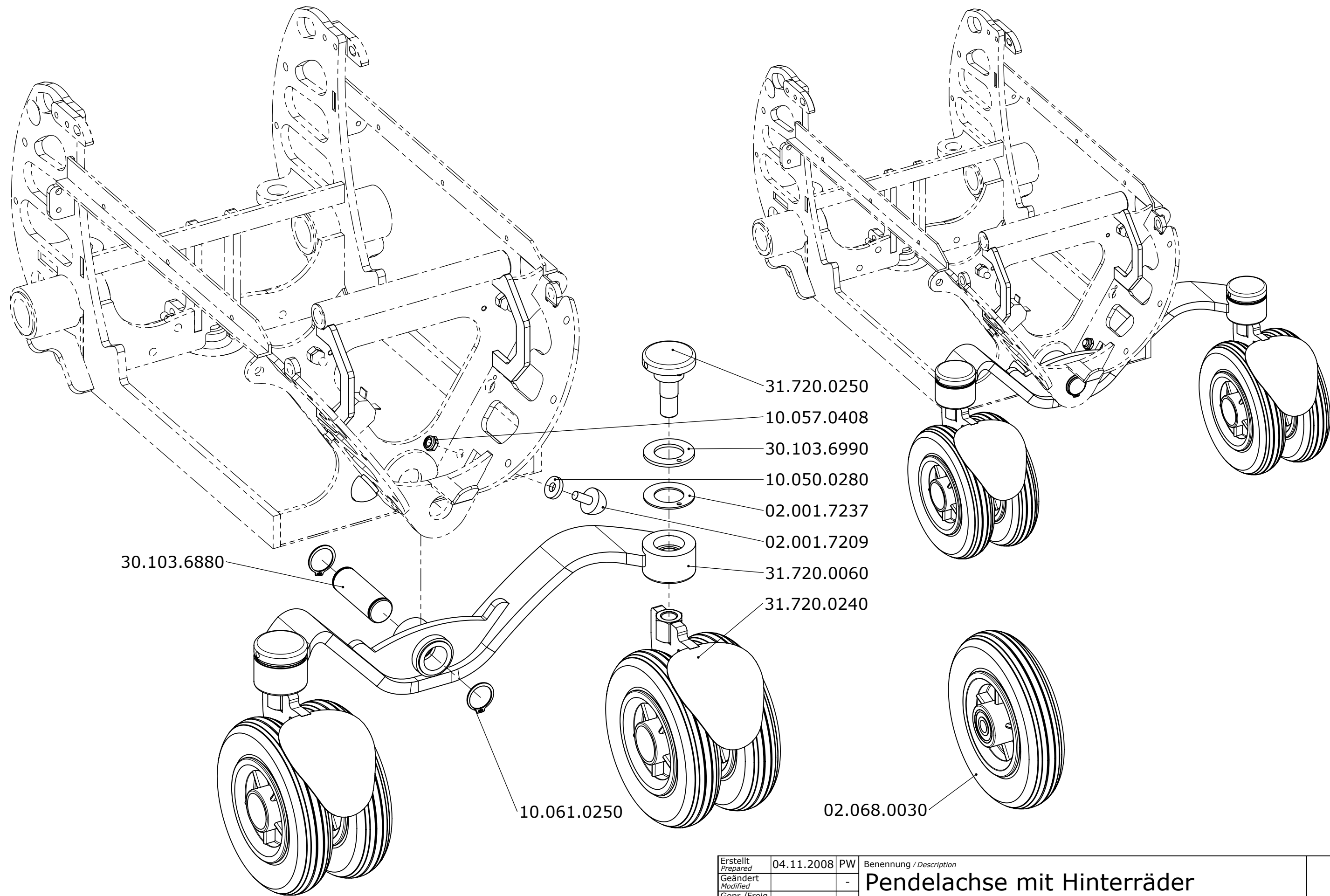


Erstellt Prepared	04.11.2008	PW	Benennung / Description Pendelachse mit Hinterräder Pendulum axle with rear wheel		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved		-			
Status Status					
LEVO ⁺ AG THE EXPERTS IN STANDING CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl Wheelchair C3	Artikelnummer Art. no. 50.072.0030	

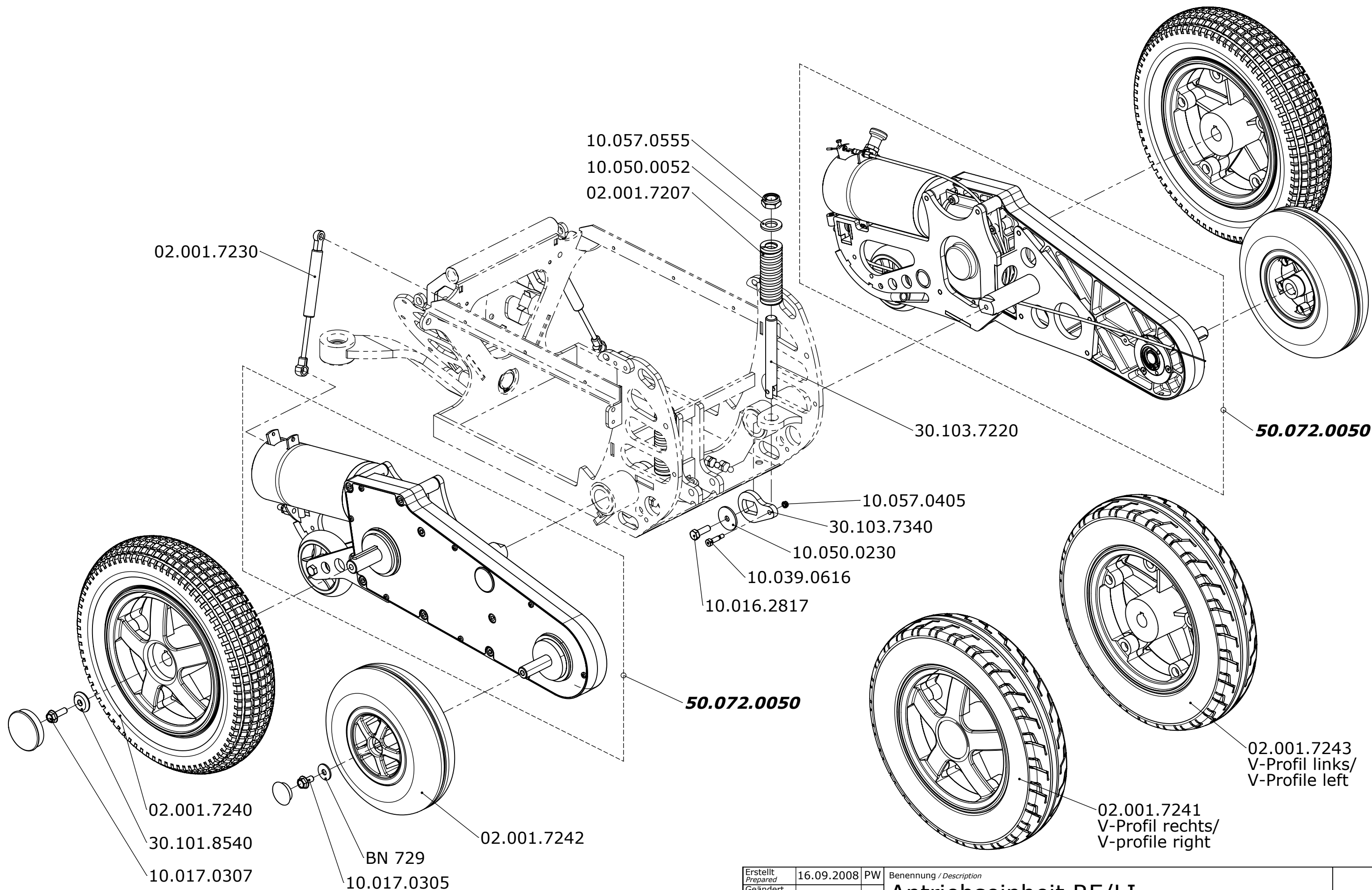

Erstellt Prepared	16.09.2008	PW	Benennung / Description Antriebseinheit RE/LI Drive mechanism r/l		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved		-			
Status Status					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl Wheelchair C3	Artikelnummer Art. no. 50.072.0040

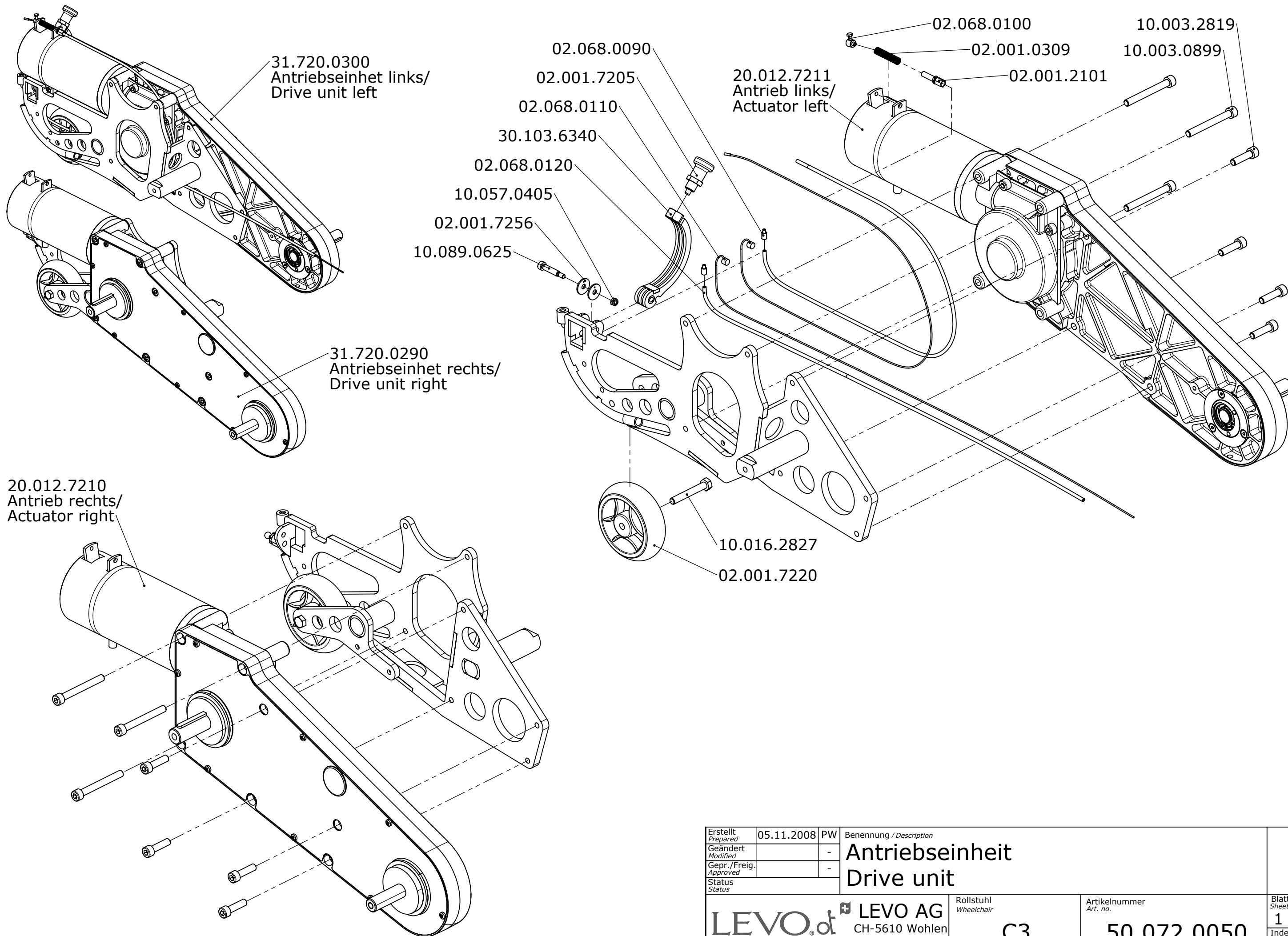

Erstellt Prepared	05.11.2008	PW	Benennung / Description Antriebseinheit Drive unit		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved		-			
Status Status					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl Wheelchair C3	Artikelnummer Art. no. 50.072.0050

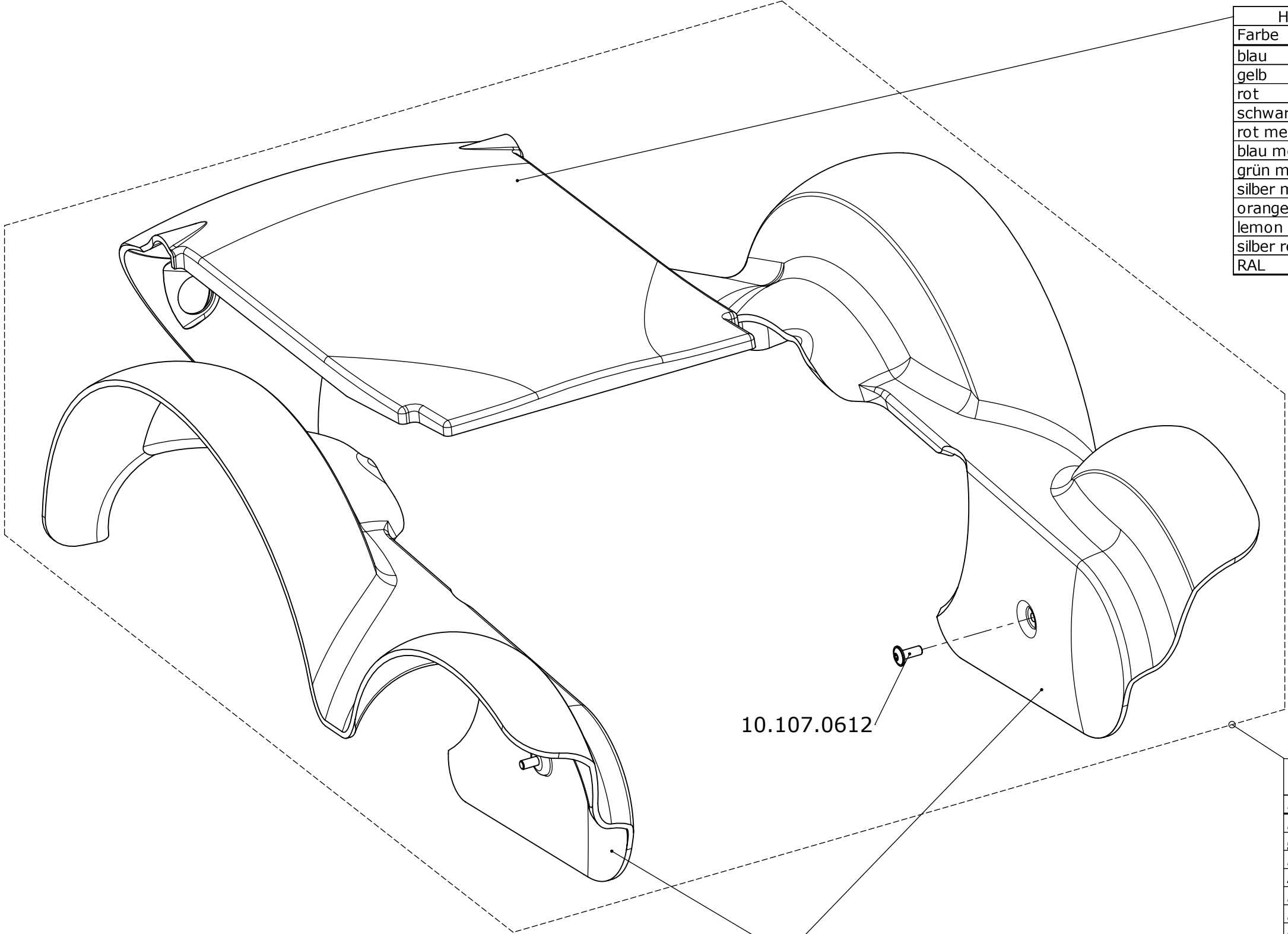


Heckabdeckung / tail cover		Artikelnummer /
Farbe	color	Article no.
blau	blue	30.103.6502
gelb	yellow	30.103.6503
rot	red	30.103.6504
schwarz	black	30.103.6505
rot metallic	red metallic	30.103.6506
blau metallic	blue metallic	30.103.6507
grün metallic	green metallic	30.103.6508
silber metallic	silver metallic	30.103.6509
orange reflex	orange reflex	30.903.6501
lemon reflex	lemon reflex	30.903.6503
silber reflex	silver reflex	30.903.6504
RAL	RAL	30.903.6502


Radabdeckung / Wheel cover		rechts/right	links/left
Farbe	color	Artikelnummer	Article no.
blau	blue	30.103.6512	30.103.6522
gelb	yellow	30.103.6513	30.103.6523
rot	red	30.103.6514	30.103.6524
schwarz	black	30.103.6515	30.103.6525
rot metallic	red metallic	30.103.6516	30.103.6526
blau metallic	blue metallic	30.103.6517	30.103.6527
grün metallic	green metallic	30.103.6518	30.103.6528
silber metallic	silver metallic	30.103.6519	30.103.6529
orange reflex	orange reflex	30.903.6511	30.903.6521
lemon reflex	lemon reflex	30.903.6513	30.903.6523
silber reflex	silver reflex	30.903.6514	30.903.6524
RAL	RAL	30.903.6512	30.903.6522

Abdeckung-Set / Cover-set		Artikelnummer /
Farbe	color	Article no.
blau	blue	32.072.0212
gelb	yellow	32.072.0213
rot	red	32.072.0214
schwarz	black	32.072.0215
rot metallic	red metallic	32.072.0216
blau metallic	blue metallic	32.072.0217
grün metallic	green metallic	32.072.0218
silber metallic	silver metallic	32.072.0219
orange reflex	orange reflex	32.072.0221
lemon reflex	lemon reflex	32.072.0222
silber reflex	silver reflex	32.072.0223
RAL	RAL	32.072.0224

Erstellt Prepared	16.09.2008	PW	Benennung / Description Abdeckungen Covers		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved		-			
Status Status					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl Wheelchair C3	Artikelnummer Art. no. 50.072.0060

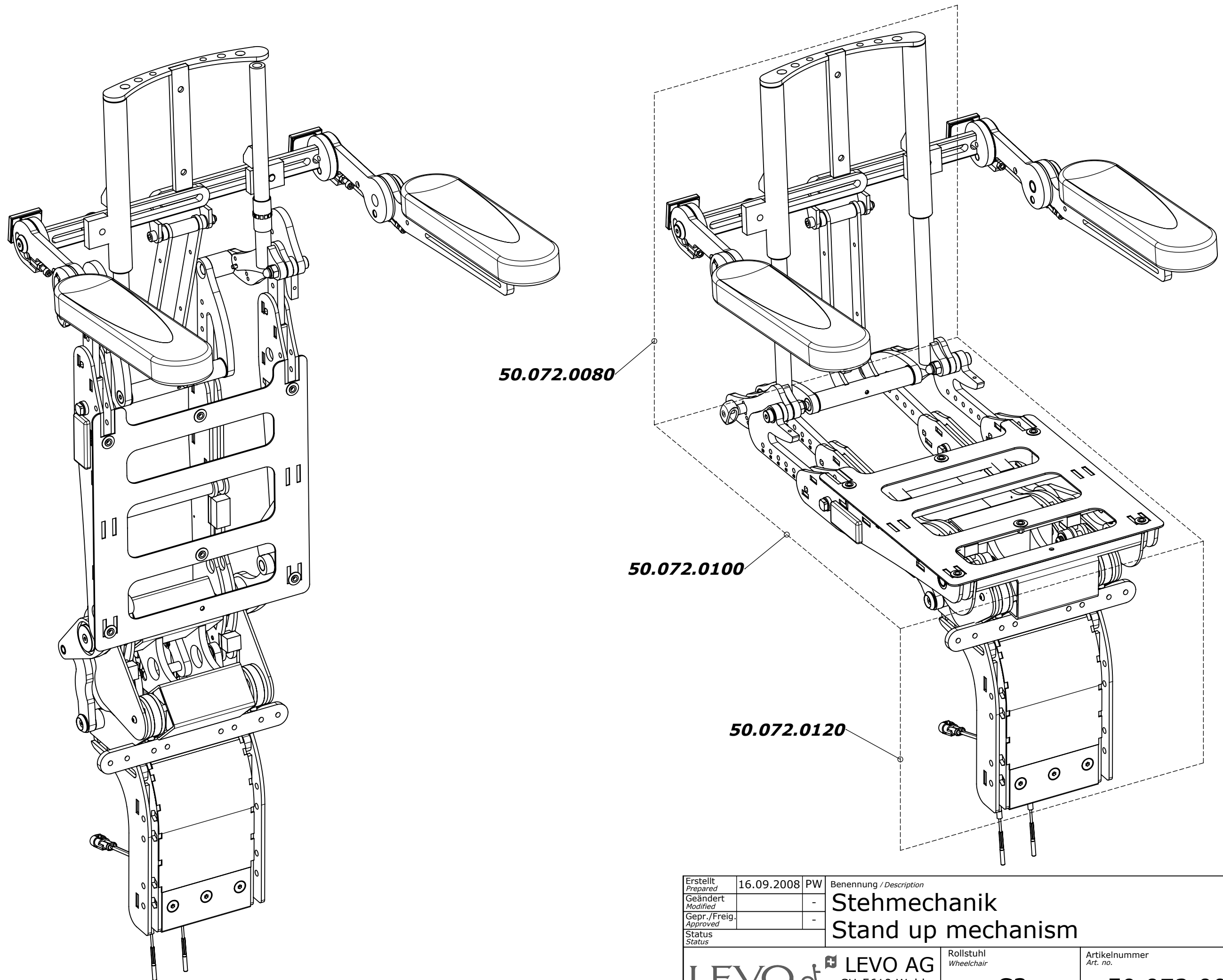


Erstellt <i>Prepared</i>	16.09.2008	PW	Benennung / Description Stehmechanik Stand up mechanism		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>		-			
Status <i>Status</i>					
LEVO  LEVO AG THE EXPERTS IN STANDING CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> C3	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.072.0070	

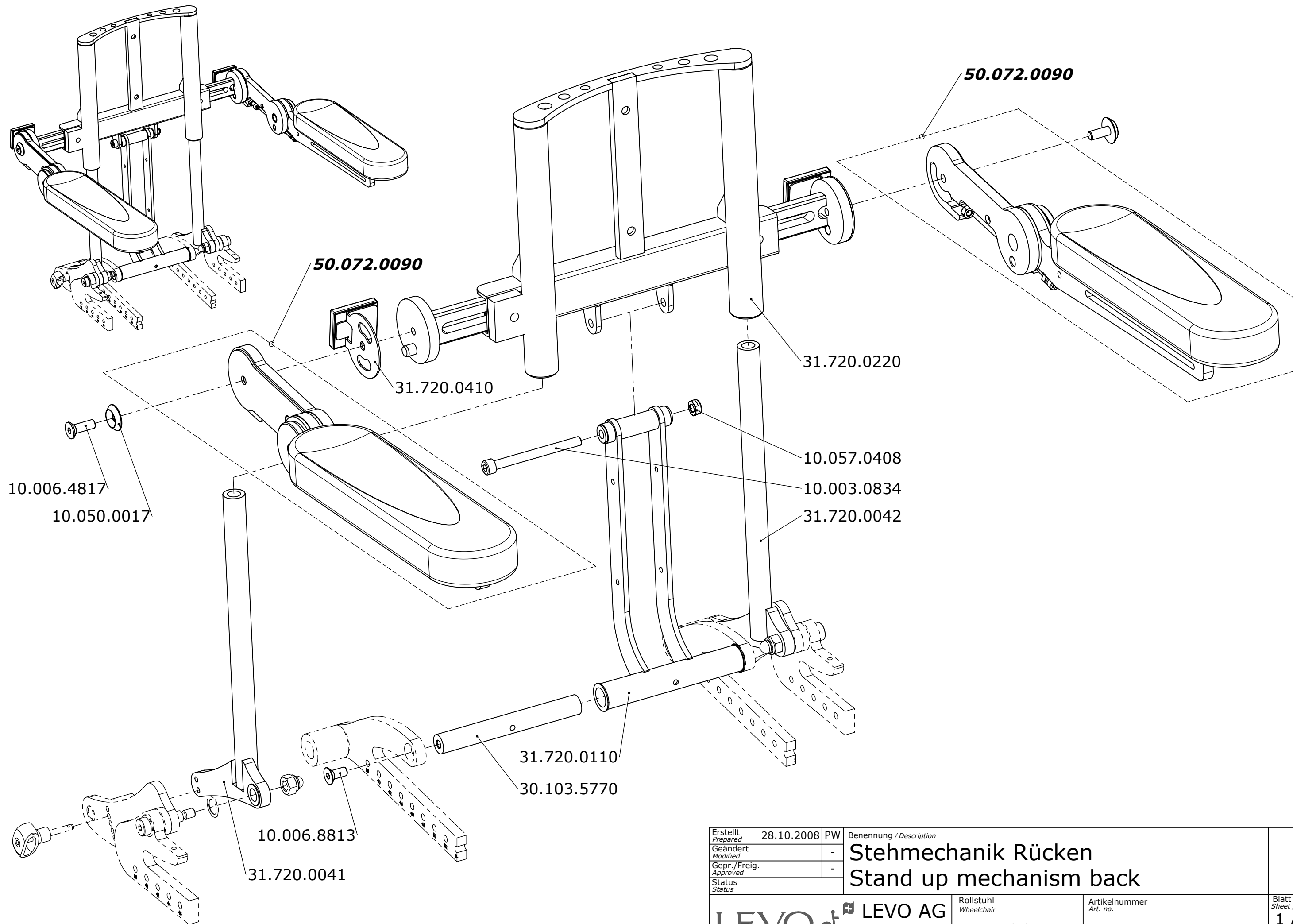


Erstellt Prepared	28.10.2008	PW	Benennung / Description Stehmechanik Rücken Stand up mechanism back		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved		-			
Status					
LEVO ⁺ AG THE EXPERTS IN STANDING			CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl Wheelchair C3	Artikelnummer Art. no. 50.072.0080


rechts / right

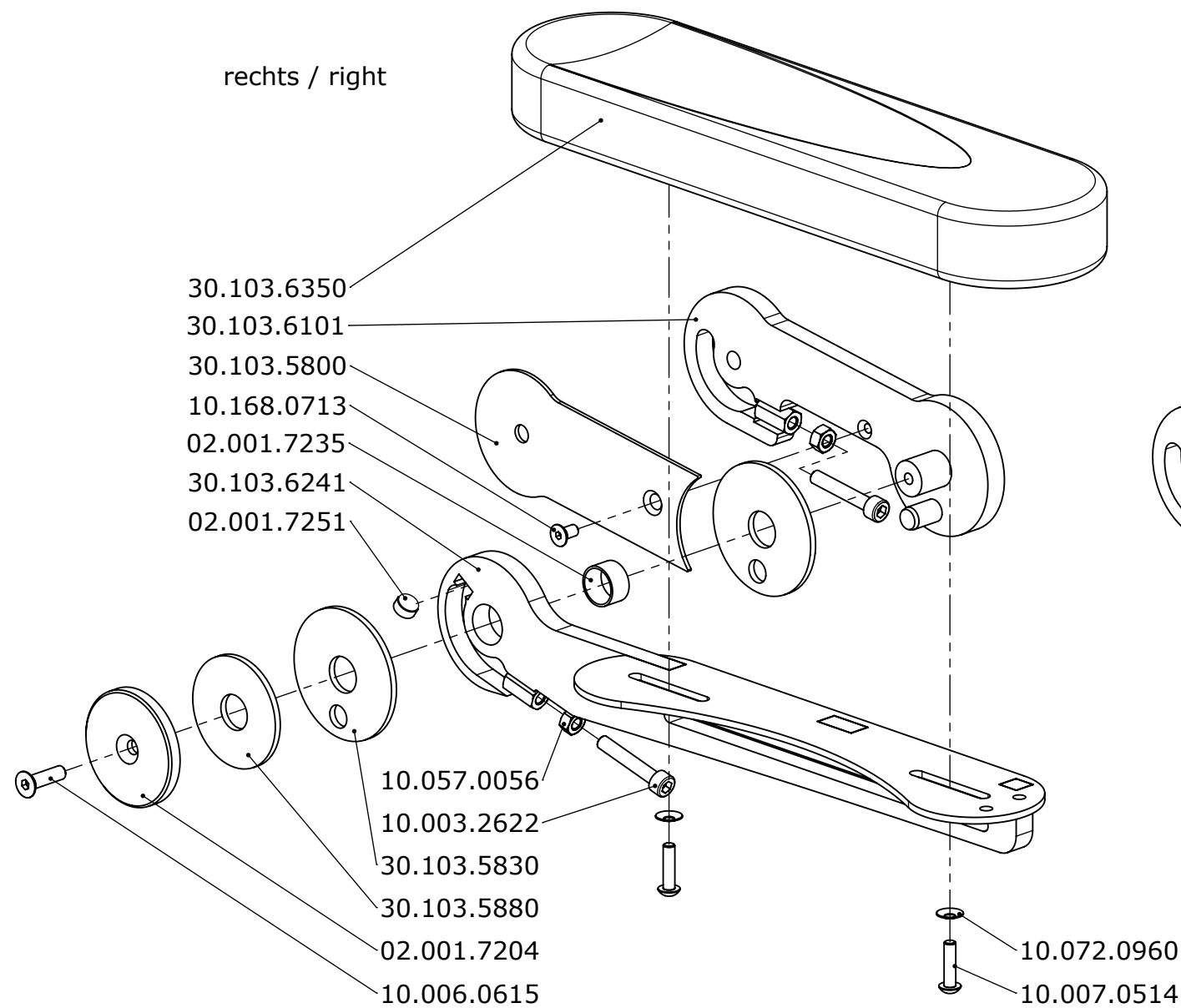


links / left

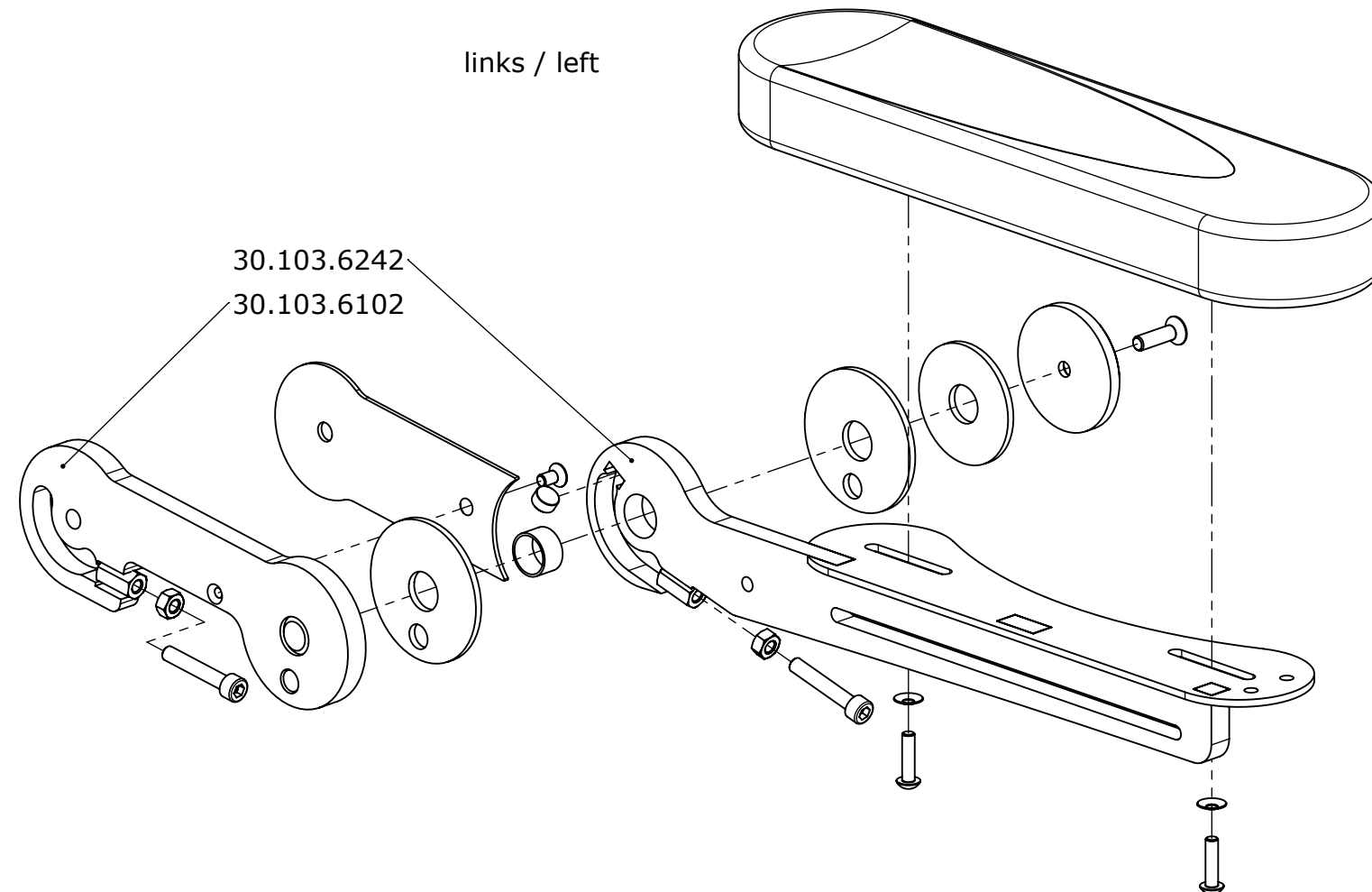


rechts / right

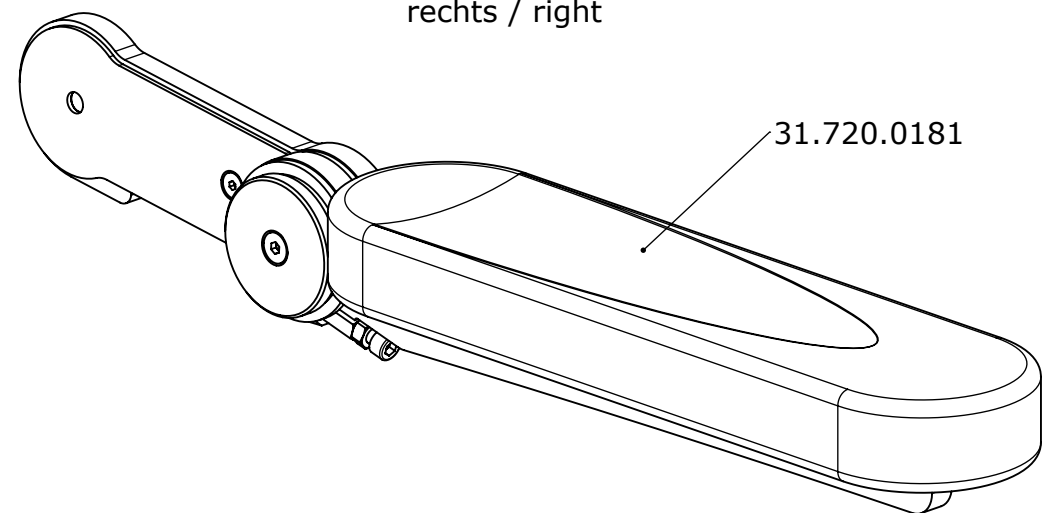


links / left

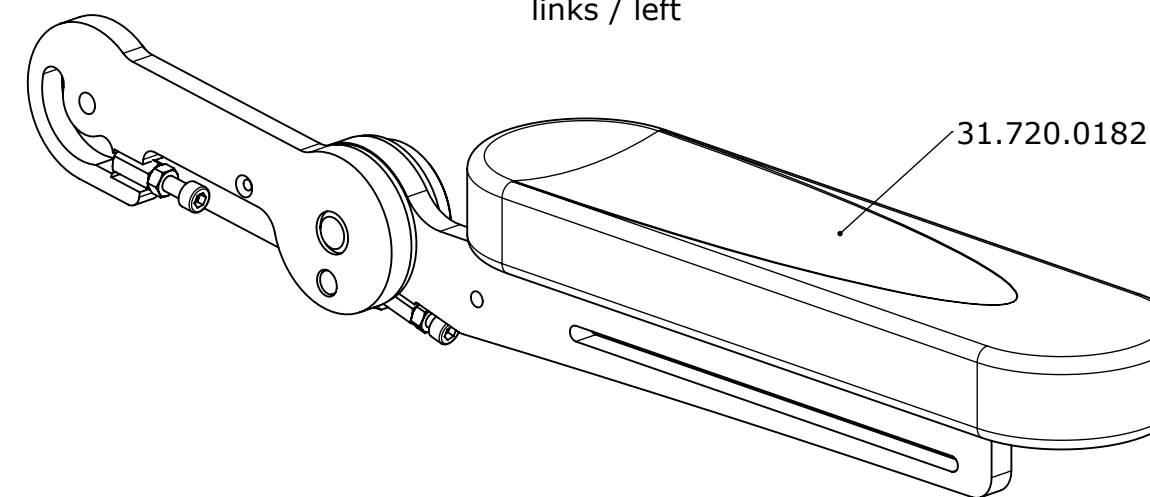

Erstellt Prepared	30.01.2009	PW	Benennung / Description		
Geändert Modified			Armlehnen Arm rests		
Gepr./Freig. Approved		-			
Status					
LEVO AG			Rollstuhl Wheelchair	Artikelnummer Art. no.	Blatt / Anz. Sheet / no. of
CH-5610 Wohlen www.levo.ch			C3	50.072.0090	1 / 1
THE EXPERTS IN STANDING					Index / Rev.

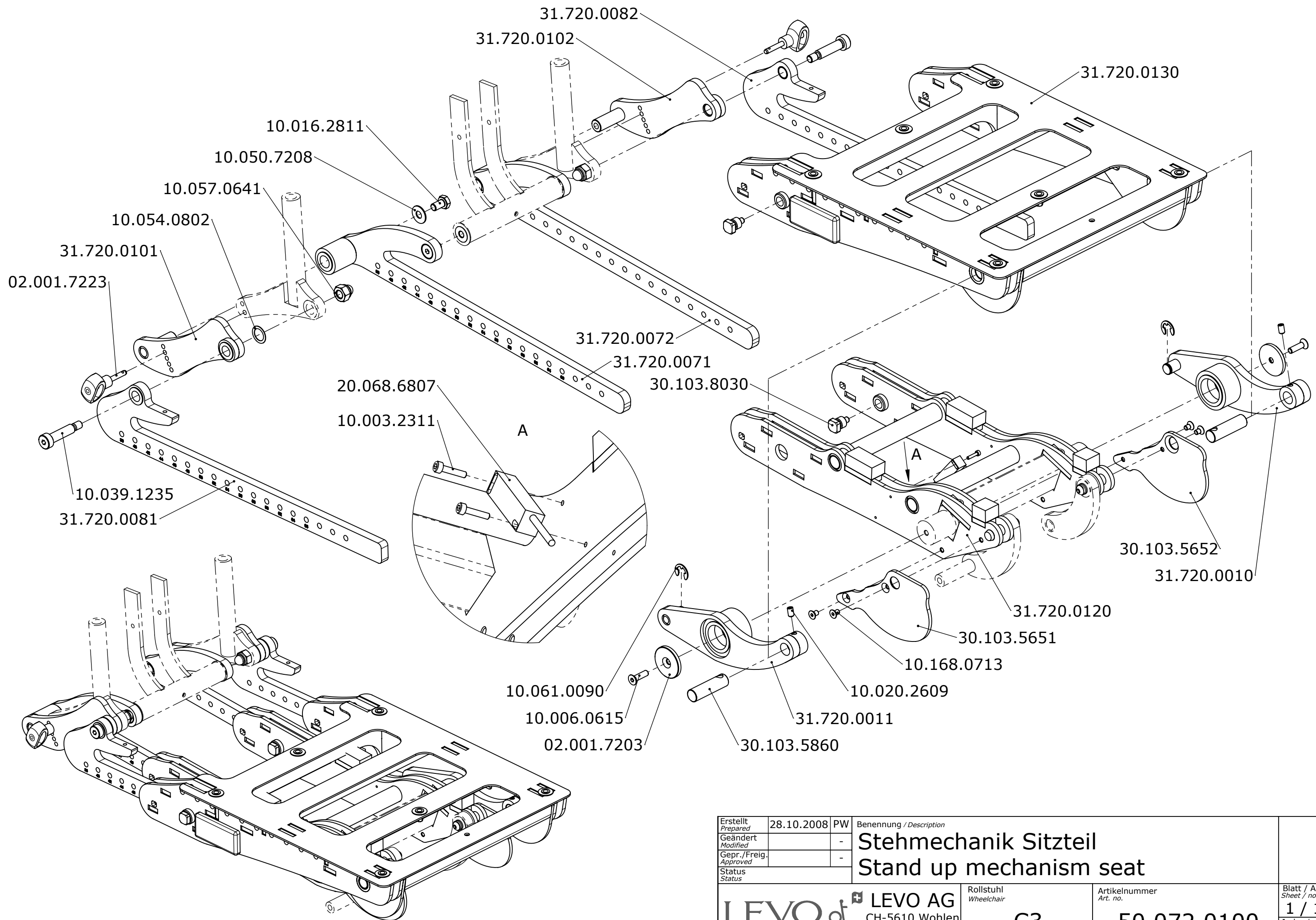


Erstellt Prepared	28.10.2008	PW	Benennung / Description Stehmechanik Sitzteil Stand up mechanism seat		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved		-			
Status					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl Wheelchair C3	Artikelnummer Art. no. 50.072.0100

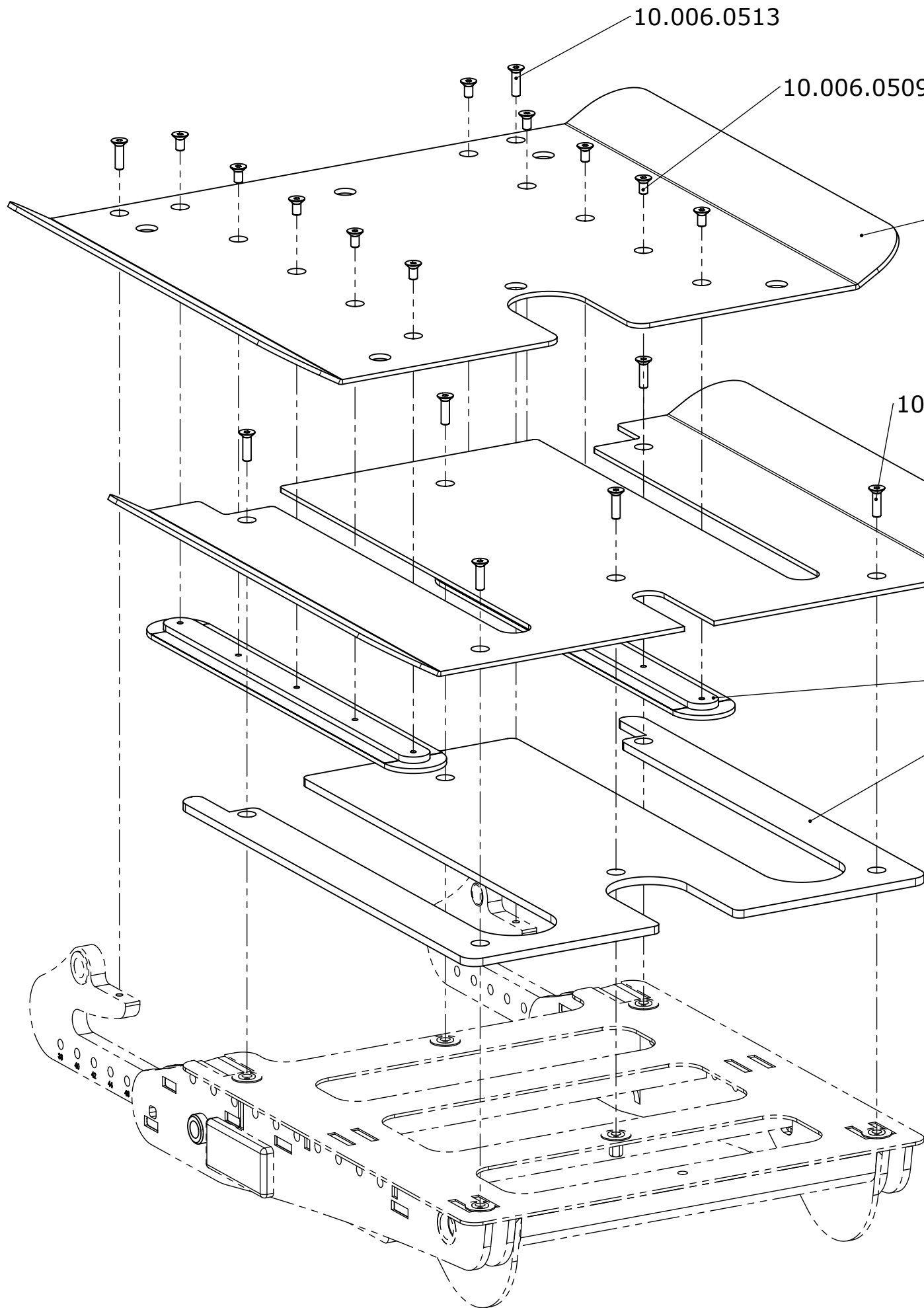


Sitzblech hinten / Seat plate back	
Sitzbreite / Seat width	Artikelnummer / Article no.
32	30.103.5511
36	30.103.5512
40	30.103.5513
44	30.103.5514
48	30.103.5515
52	30.103.5516

Sitzblech vorne / Seat plate front	
Sitzbreite / Seat width	Artikelnummer / Article no.
32	30.103.5521
36	30.103.5522
40	30.103.5523
44	30.103.5524
48	30.103.5525
52	30.103.5526


Sitzblech-Set / Seat plate set	
Sitzbreite / Seat width	Artikelnummer / Article no.
32	32.072.0171
36	32.072.0172
40	32.072.0173
44	32.072.0174
48	32.072.0175
52	32.072.0176

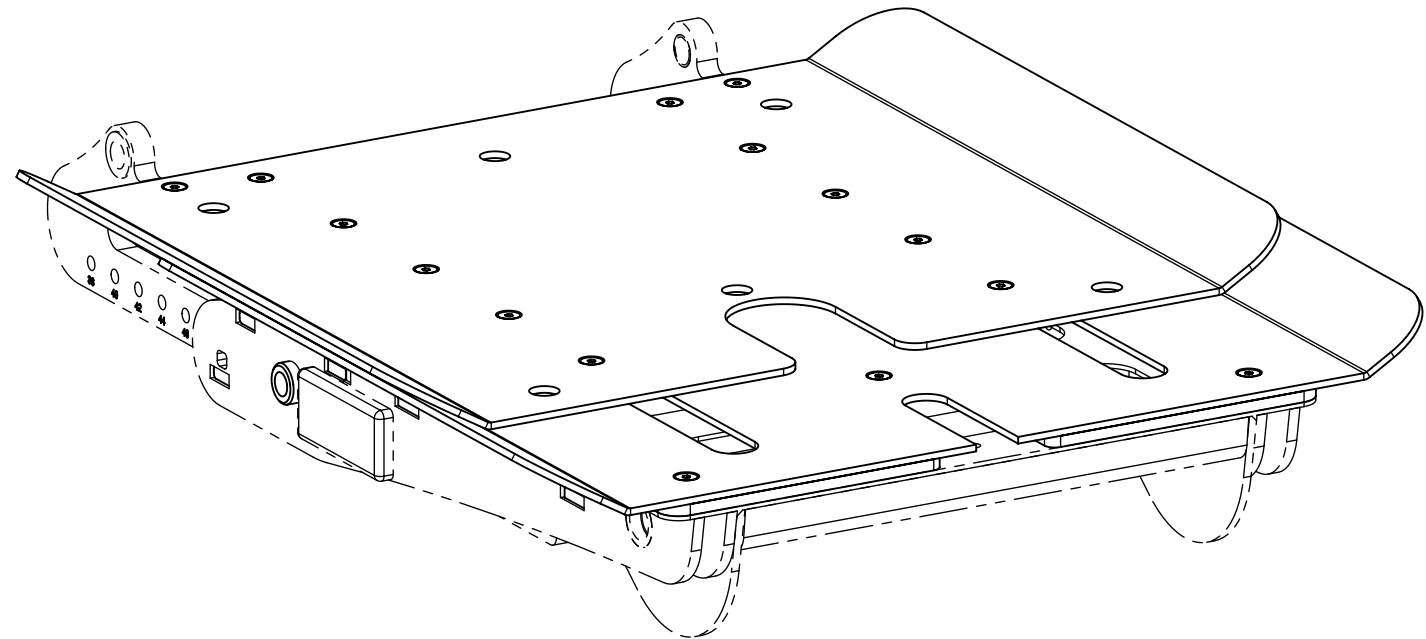


Erstellt <i>Prepared</i>	29.10.2008	PW	Benennung / <i>Description</i>		
Geändert <i>Modified</i>		-	Sitzblech Seat plate		
Gepr./Freig. <i>Approved</i>		-			
Status <i>Status</i>					
LEVO[®]  LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i>
			C3	50.072.0110	

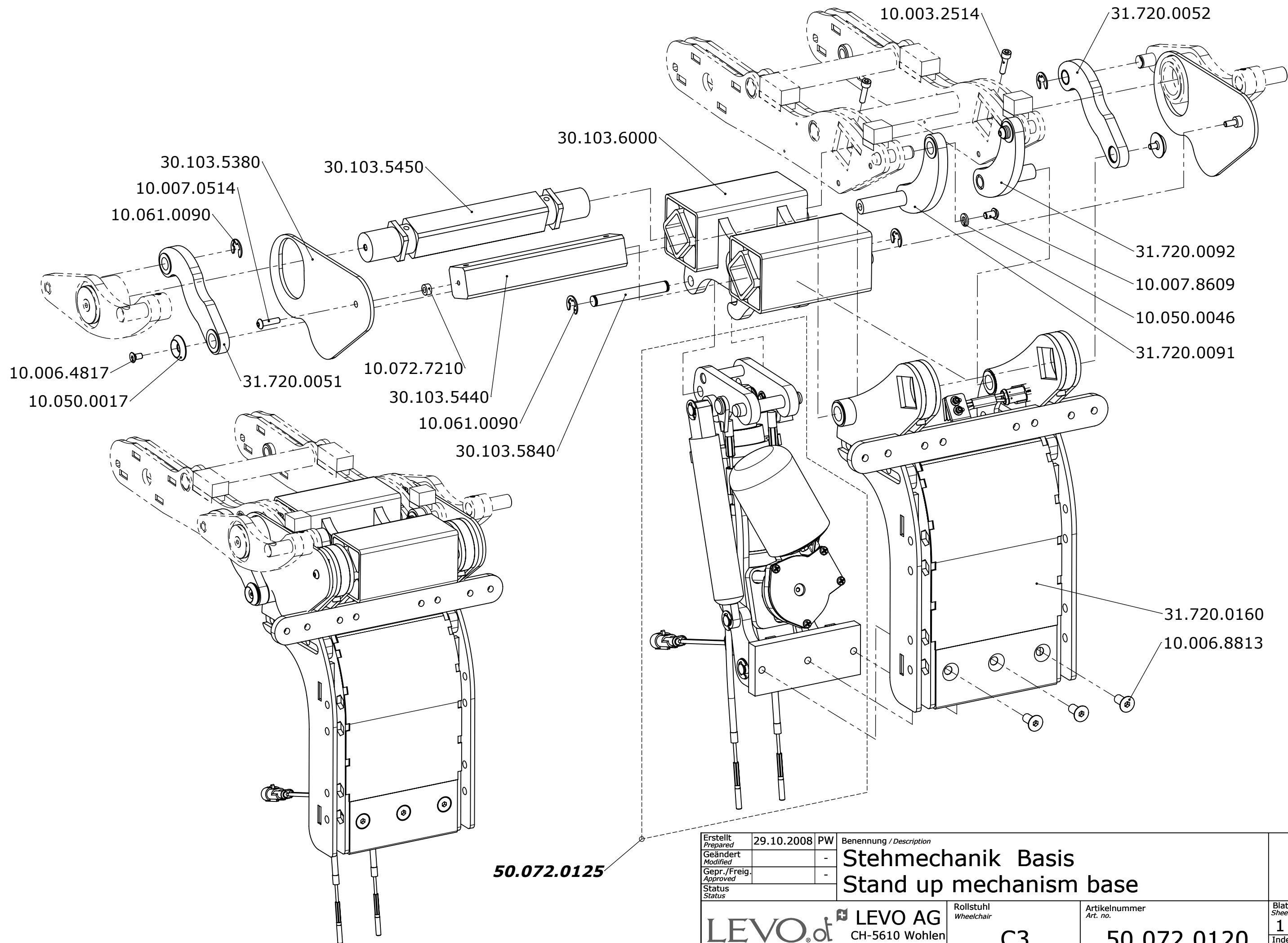


Erstellt Prepared	29.10.2008	PW	Benennung / Description Stehmechanik Basis Stand up mechanism base		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved		-			
Status Status					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl Wheelchair C3	Artikelnummer Art. no. 50.072.0120

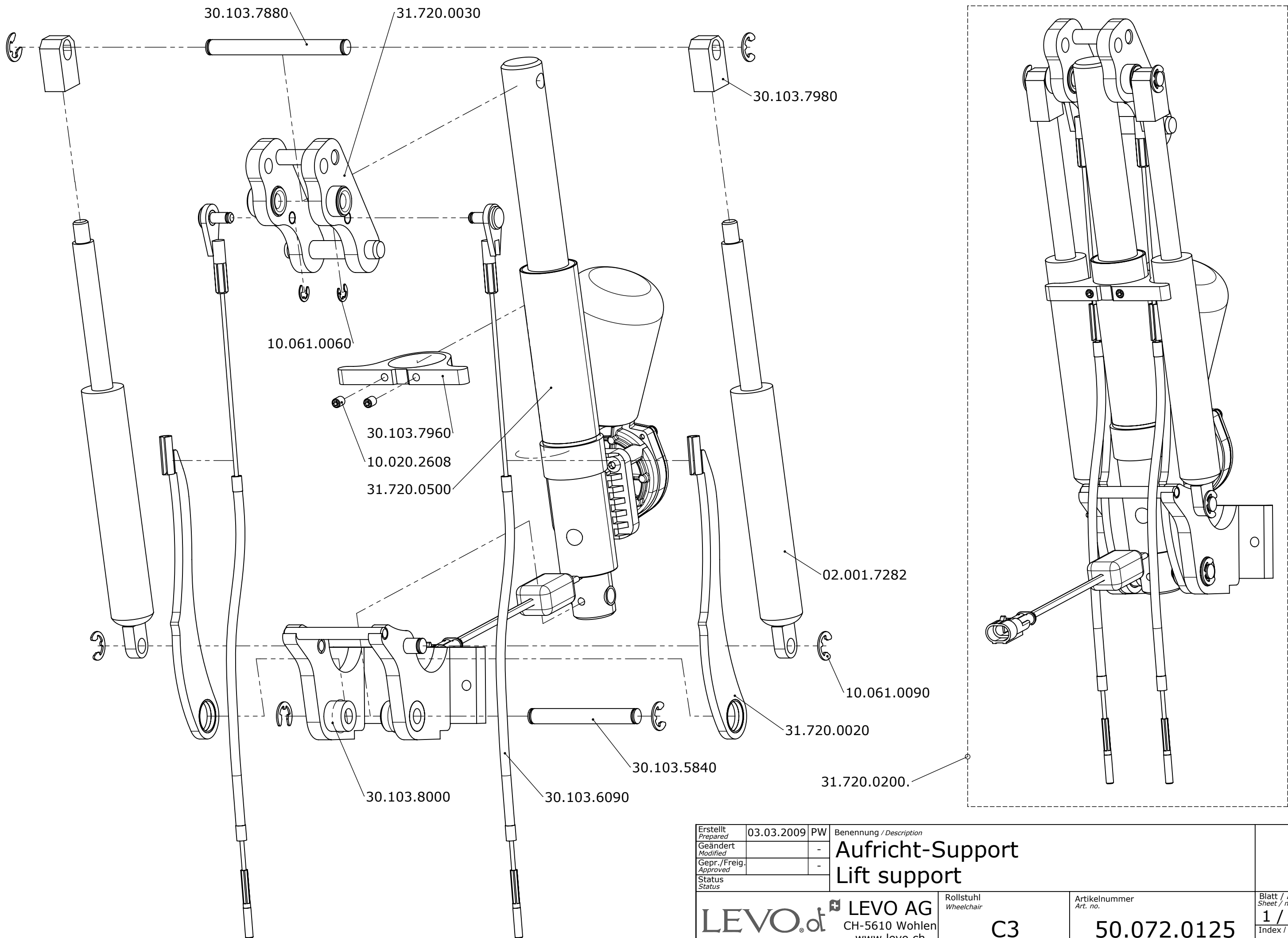

Erstellt Prepared	03.03.2009	PW	Benennung / Description Aufricht-Support Lift support		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved		-			
Status Status					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl Wheelchair C3	Artikelnummer Art. no. 50.072.0125

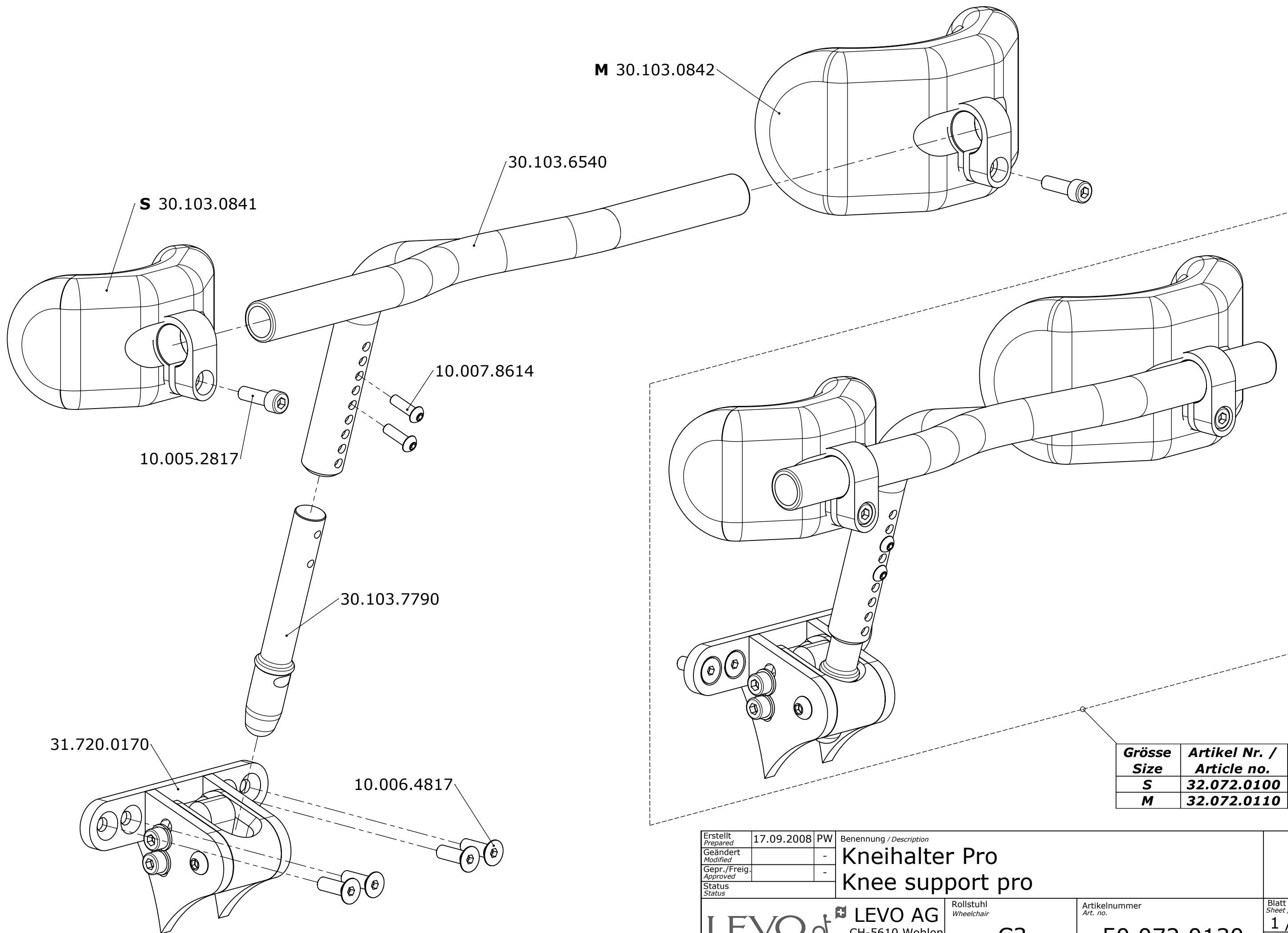


Erstellt Prepared	17.09.2008	PW	Benennung / Description	
Geändert Modified		-	Kneihalter Pro	
Gepr./Freig. Approved		-	Knee support pro	
Status				
LEVO AG			Rollstuhl Wheelchair	Blatt / Anz. Sheet / no. of
CH-5610 Wohlen			Artikelnummer Art. no.	1 / 1
www.levo.ch			C3	Index / Rev.
			50.072.0130	

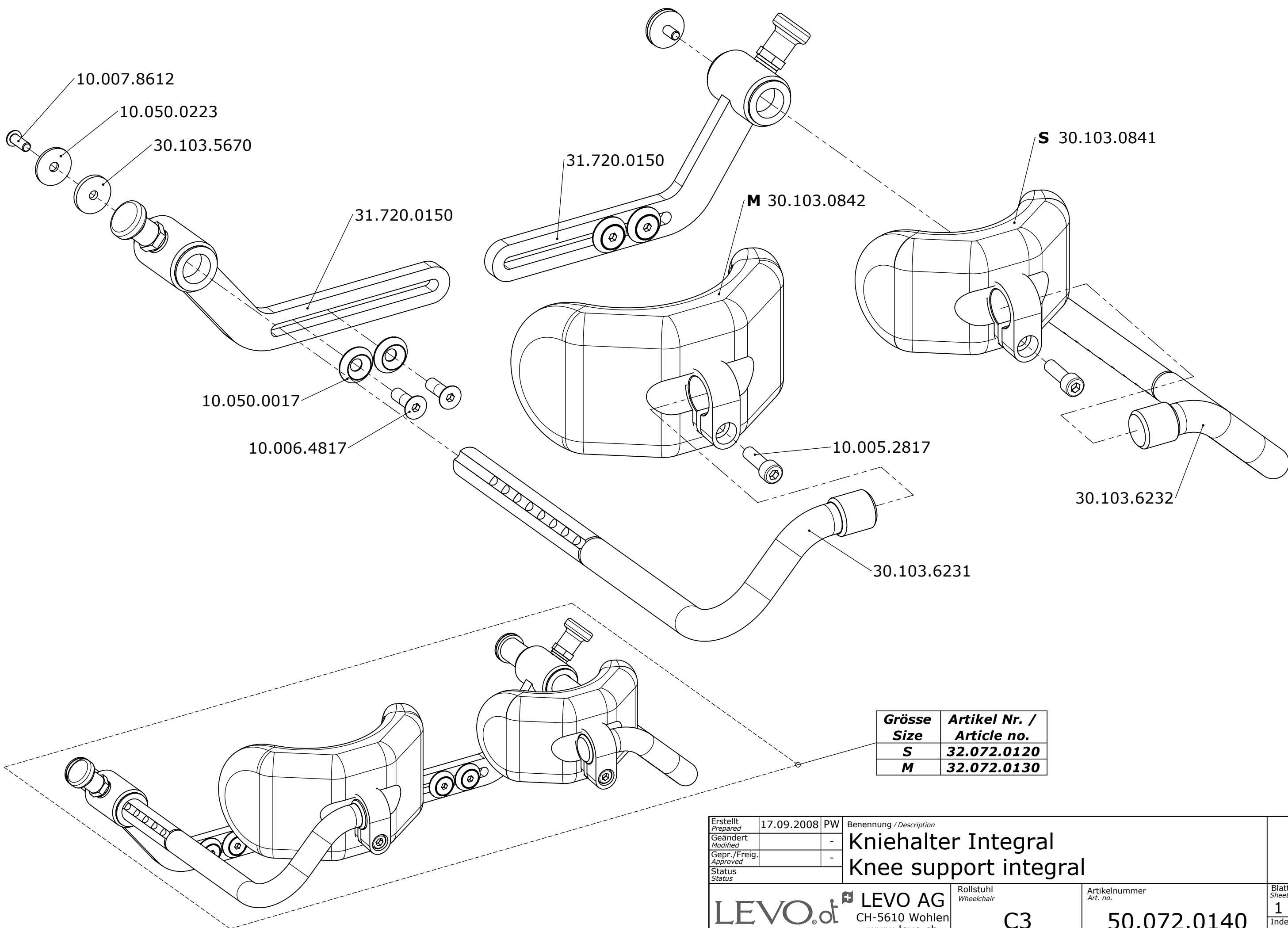

Grösse	Artikel Nr. /
Size	Article no.
S	32.072.0120
M	32.072.0130

Erstellt Prepared	17.09.2008	PW	Benennung / Description Kniehalter Integral Knee support integral		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr. / Freig. Approved		-			
Status					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl Wheelchair C3	Artikelnummer Art. no. 50.072.0140

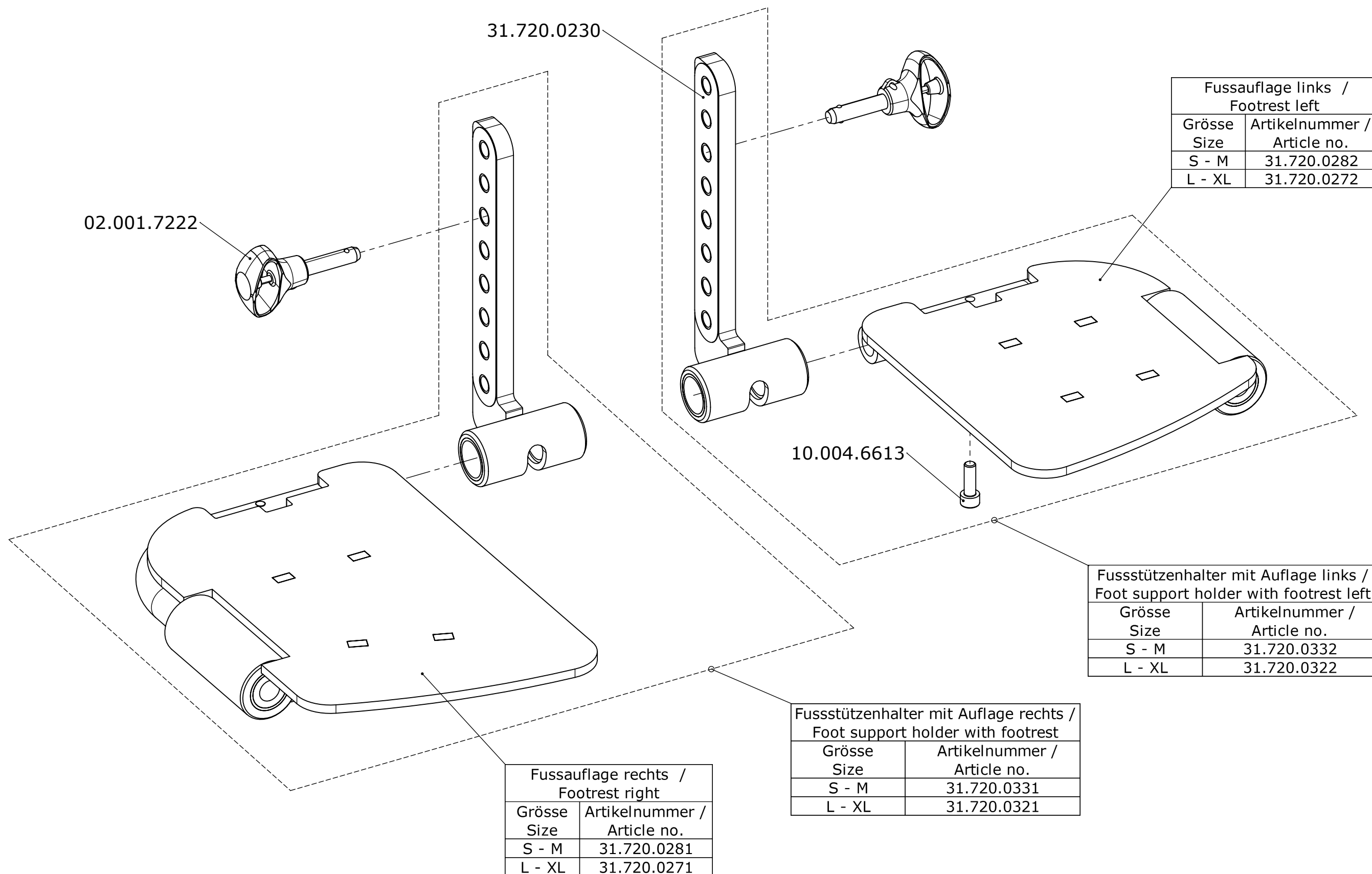


Fussauflage links / Footrest left	
Grösse Size	Artikelnummer / Article no.
S - M	31.720.0282
L - XL	31.720.0272

Fussstützenhalter mit Auflage links / Foot support holder with footrest left	
Grösse Size	Artikelnummer / Article no.
S - M	31.720.0332
L - XL	31.720.0322


Fussstützenhalter mit Auflage rechts / Foot support holder with footrest	
Grösse Size	Artikelnummer / Article no.
S - M	31.720.0331
L - XL	31.720.0321

Fussauflage rechts / Footrest right	
Grösse Size	Artikelnummer / Article no.
S - M	31.720.0281
L - XL	31.720.0271


Erstellt <i>Prepared</i>	17.09.2008	PW	Benennung / <i>Description</i> Fussauflagen Footrest			
Geändert <i>Modified</i>		-				
Gepr./Freig. <i>Approved</i>		-				
Status <i>Status</i>						
  LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch Rollstuhl <i>Wheelchair</i> C3 Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.072.0150 Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i>						

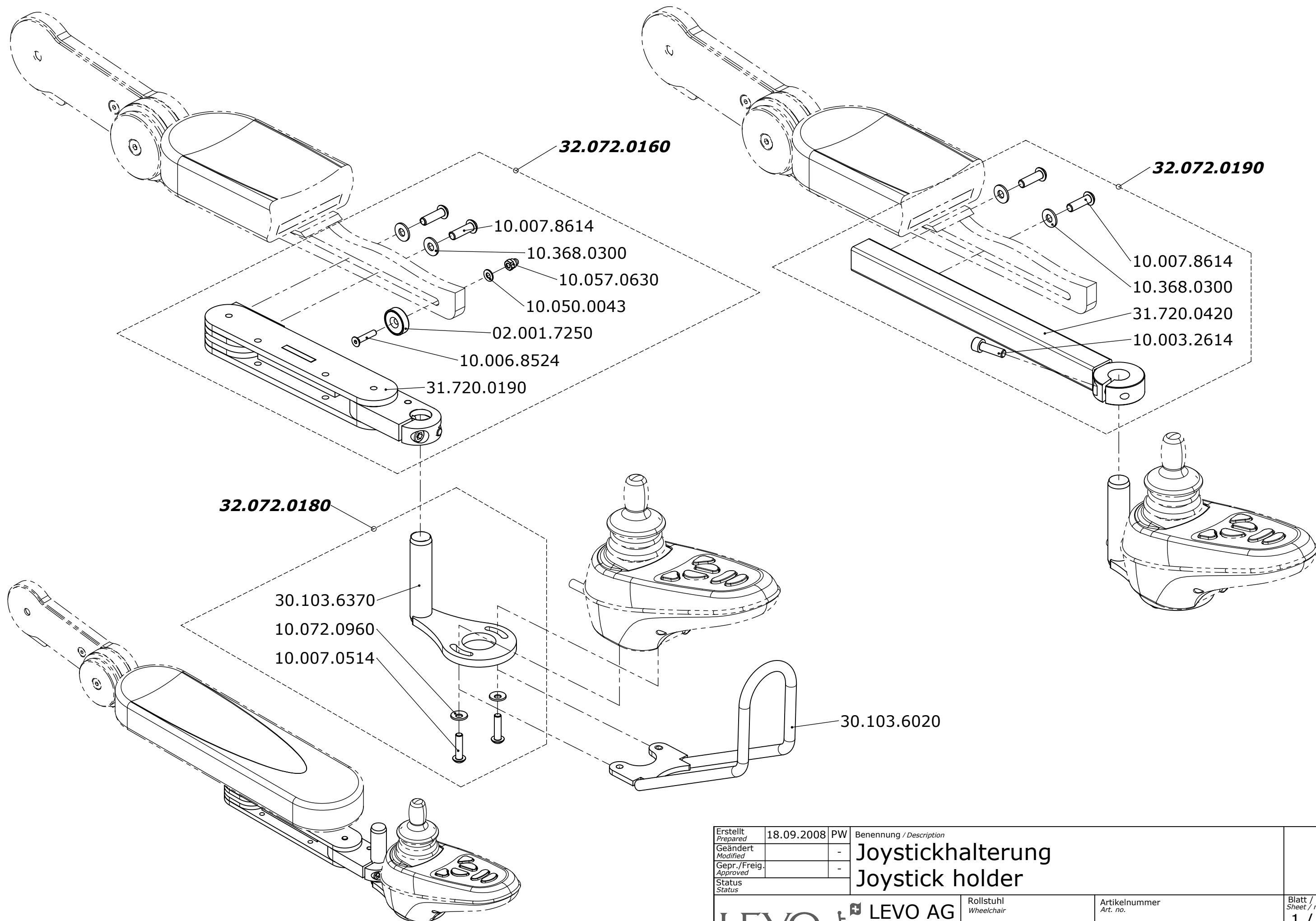


Erstellt Prepared	18.09.2008	PW	Benennung / Description Joystickhalterung Joystick holder		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved		-			
Status					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl Wheelchair C3	Artikelnummer Art. no. 50.072.0160

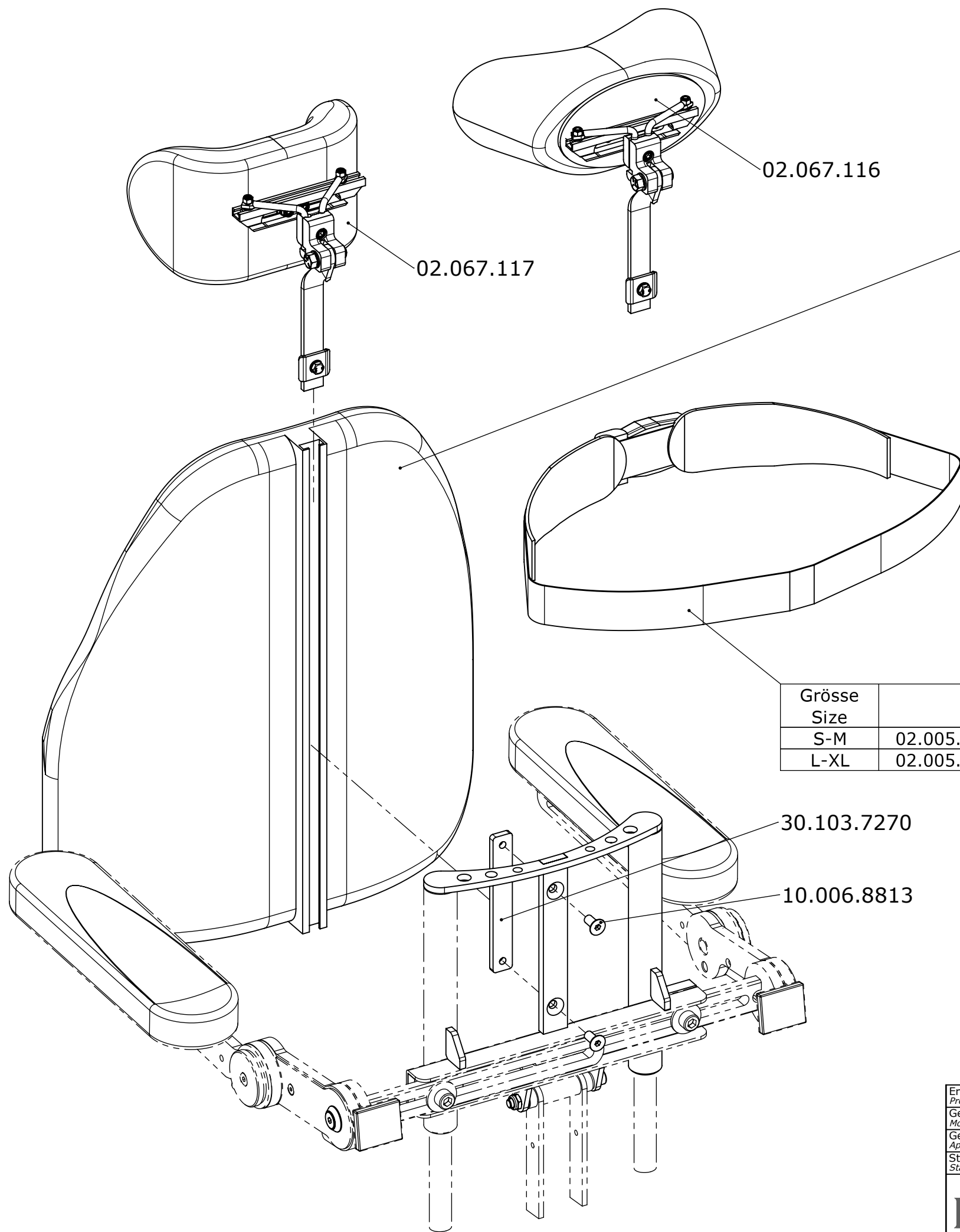


Sitzbreite Seat width	Artikel-Nr. Article no.	Bezeichnung	Description
32/36	02.009.0101	V-Trak AXXIS Niedriger Rücken M	V-Trak AXXIS Low Backrest M
40/44	02.009.0102	V-Trak AXXIS Niedriger Rücken L	V-Trak AXXIS Low Backrest L
48/52	02.009.0103	V-Trak AXXIS Niedriger Rücken XL	V-Trak AXXIS Low Backrest XL
32/36	02.009.0110	V-Trak AXXIS Hoher Rücken M	V-Trak AXXIS High Backrest M
40/44	02.009.0111	V-Trak AXXIS Hoher Rücken L	V-Trak AXXIS High Backrest L
48/52	02.009.0112	V-Trak AXXIS Hoher Rücken XL	V-Trak AXXIS High Backrest XL
32/36	02.009.0116	V-Trak AXXIS Reduzierter Rücken M	V-Trak AXXIS reduced Backrest M
40/44	02.009.0117	V-Trak AXXIS Reduzierter Rücken L	V-Trak AXXIS reduced Backrest L
48/52	02.009.0118	V-Trak AXXIS Reduzierter Rücken XL	V-Trak AXXIS reduced Backrest XL

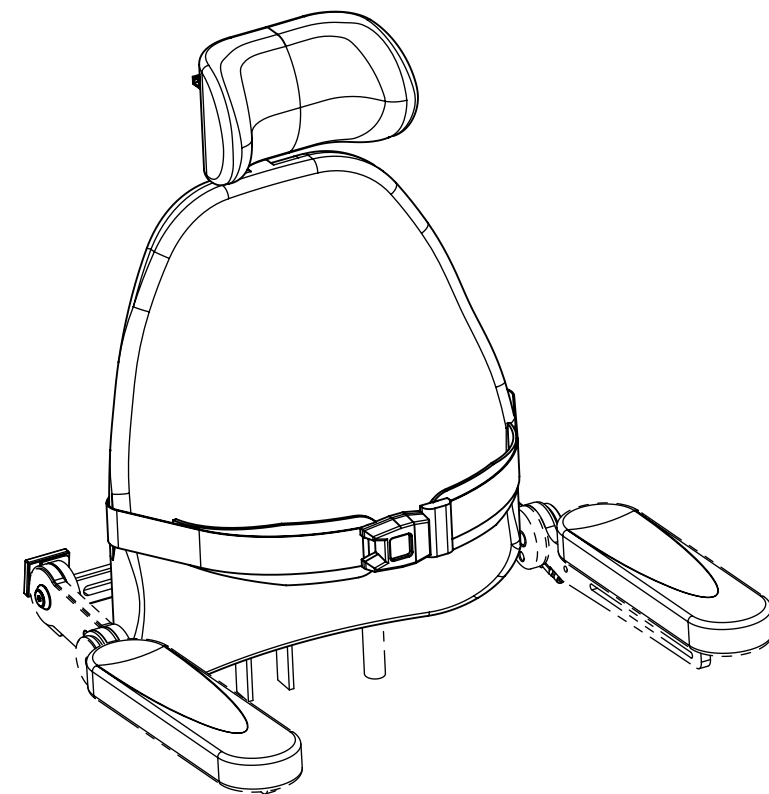


Erstellt <i>Prepared</i>	17.02.2009	PW	Benennung / <i>Description</i>		
Geändert <i>Modified</i>		-	Rücken Backrest		
Gepr./Freig. <i>Approved</i>		-			
Status <i>Status</i>					
LEVO[®].ch THE EXPERTS IN STANDING			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>		Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i>
			CH-5610 Wohlen www.levo.ch		1 / 1
			C3		Index / Rev.
			Artikelnummer <i>Art. no.</i>	50.072.0170	

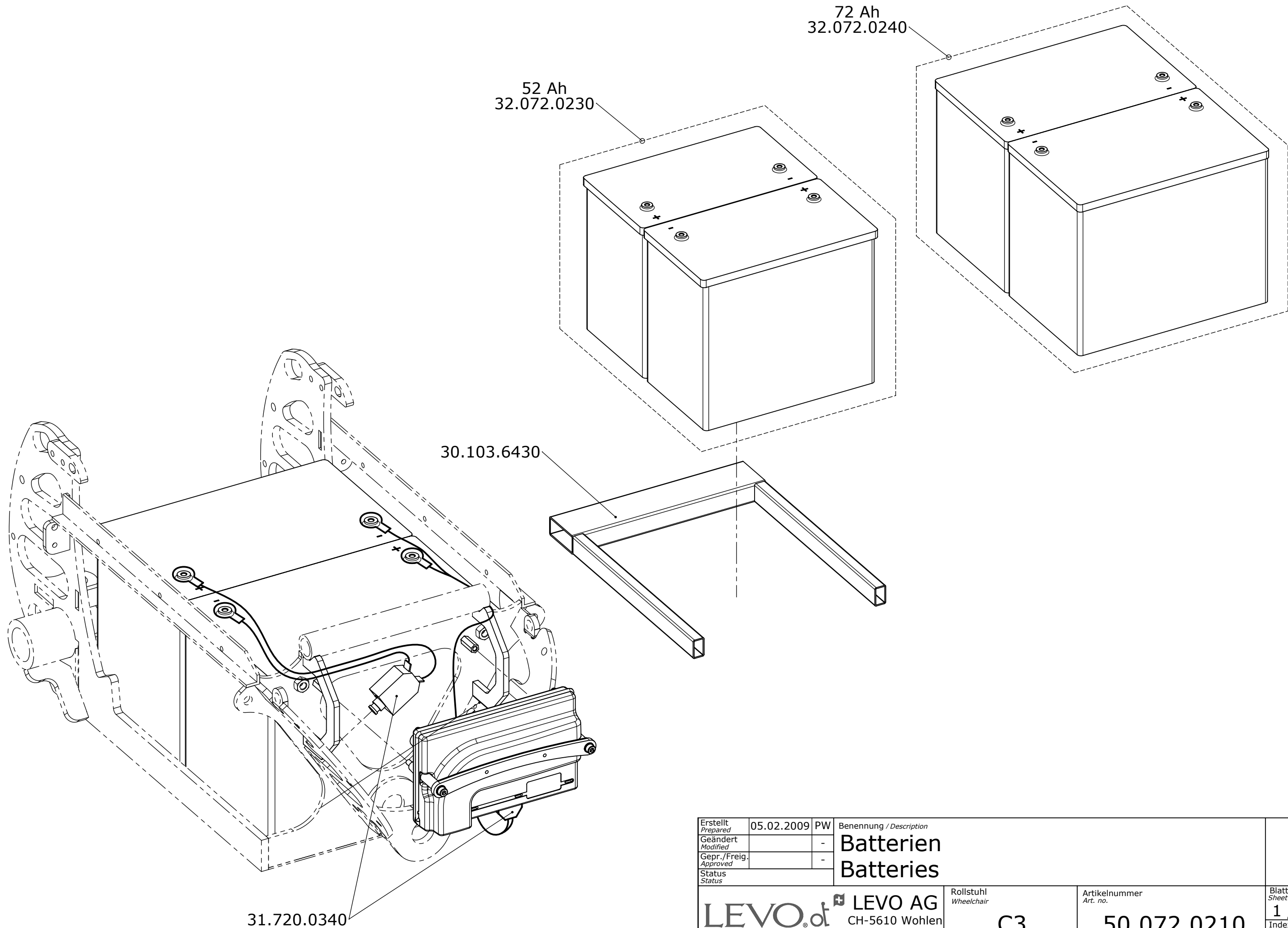


Erstellt <i>Prepared</i>	05.02.2009	PW	Benennung / Description Batterien Batteries		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>		-			
Status <i>Status</i>					
LEVO  LEVO AG THE EXPERTS IN STANDING CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> C3	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.072.0210	


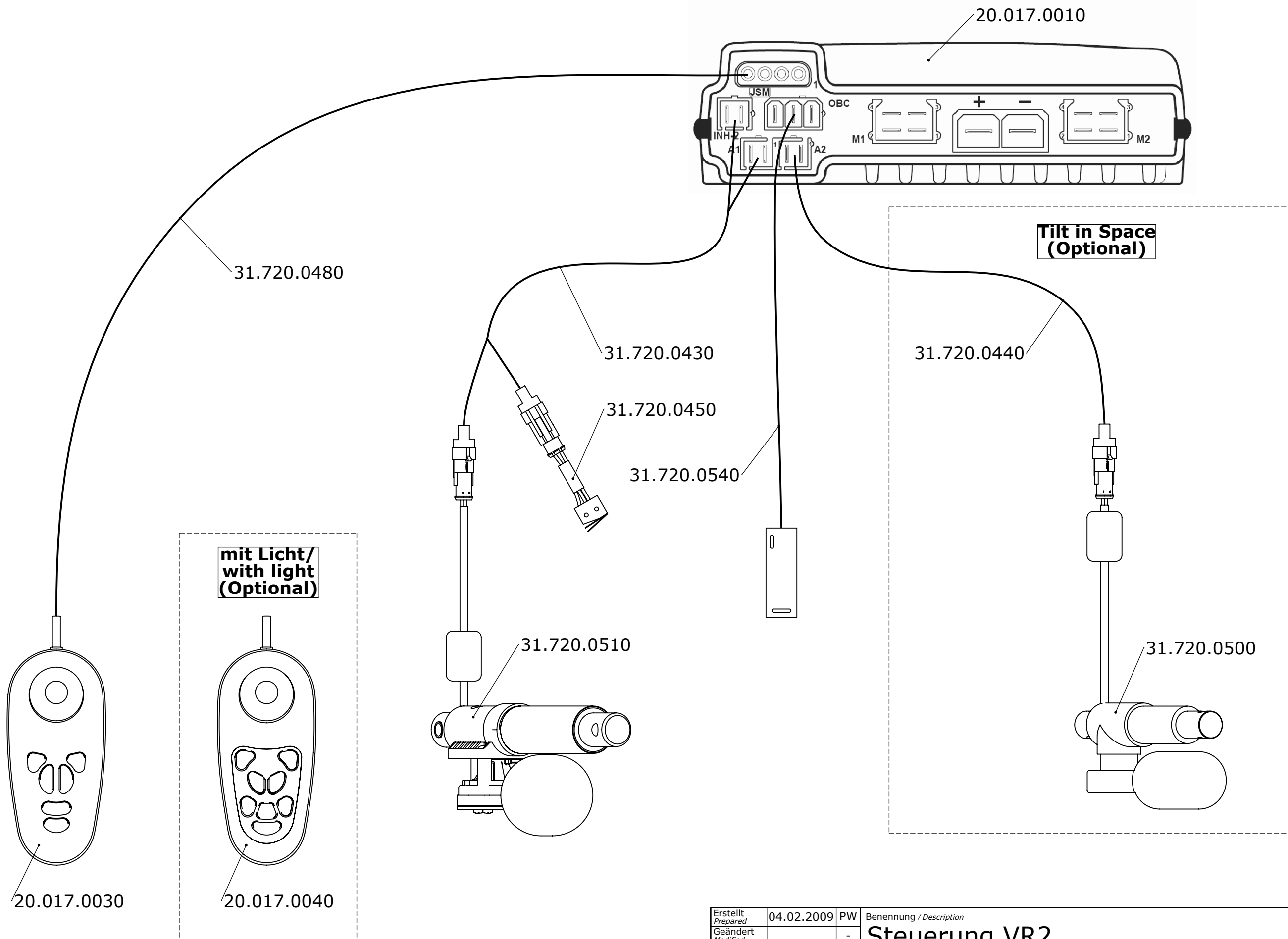


Erstellt Prepared	04.02.2009	PW	Benennung / Description Steuerung VR2 Control system VR2		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved		-			
Status Status					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl Wheelchair C3	Artikelnummer Art. no. 50.072.0220

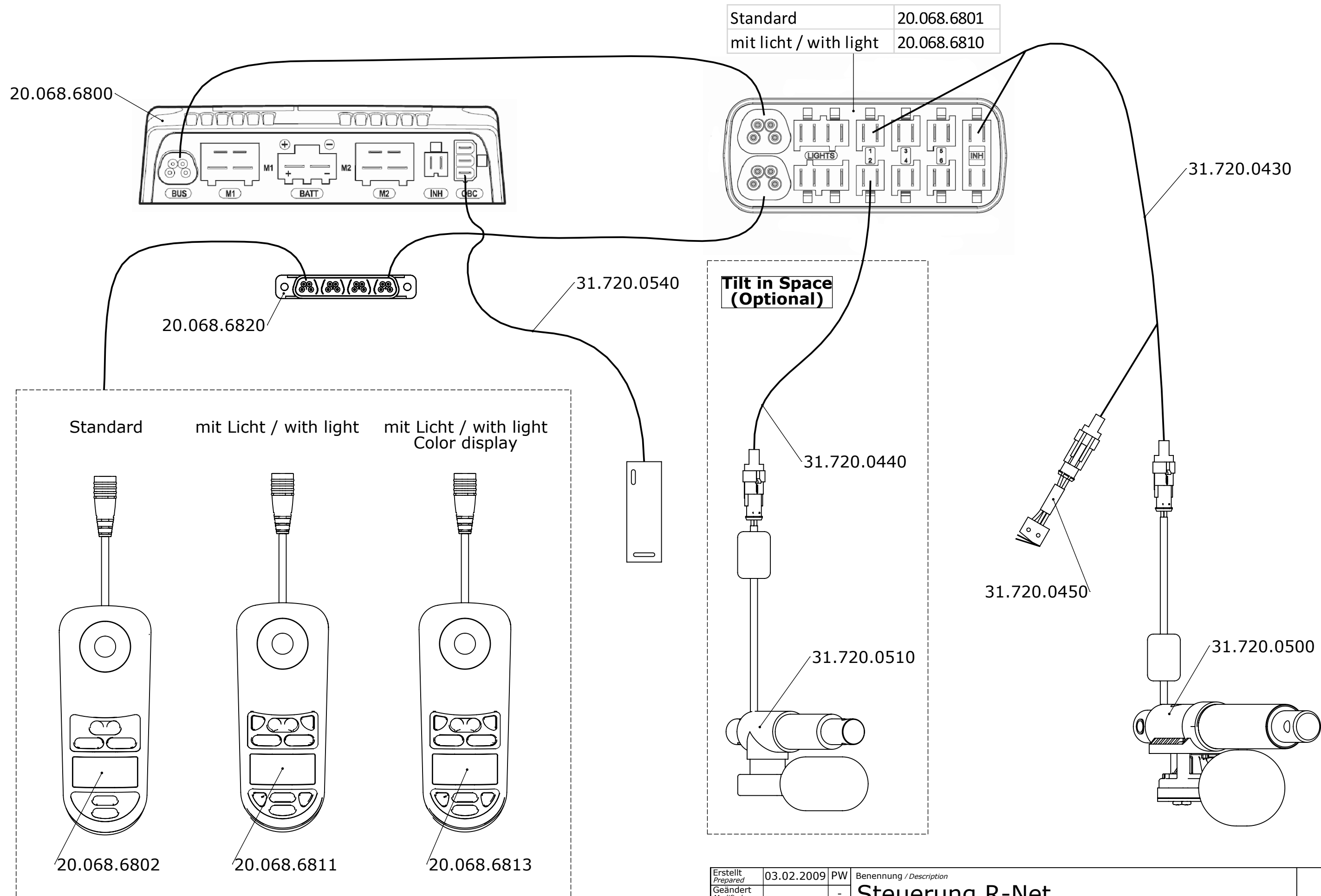


Erstellt Prepared	03.02.2009	PW	Benennung / Description Steuerung R-Net Control system R-Net		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved		-			
Status Status					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl Wheelchair C3	Artikelnummer Art. no. 50.072.0230

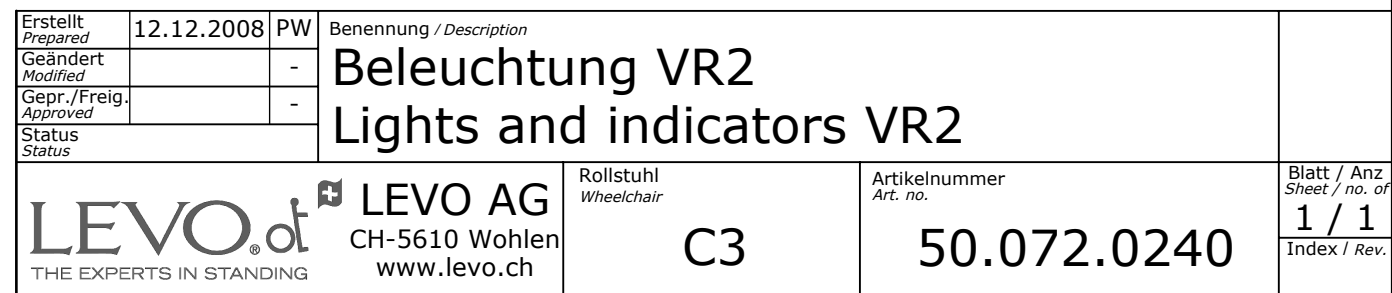

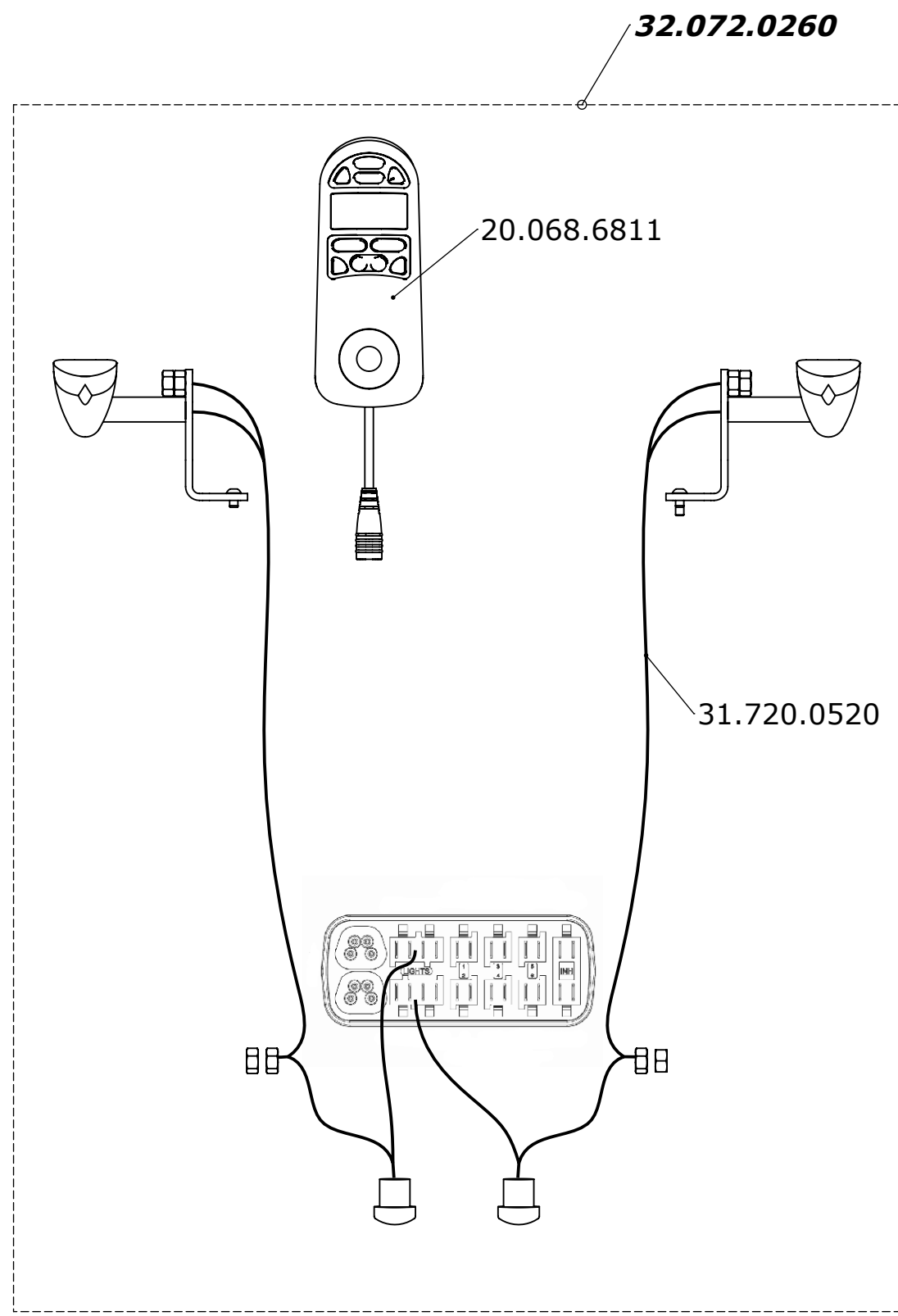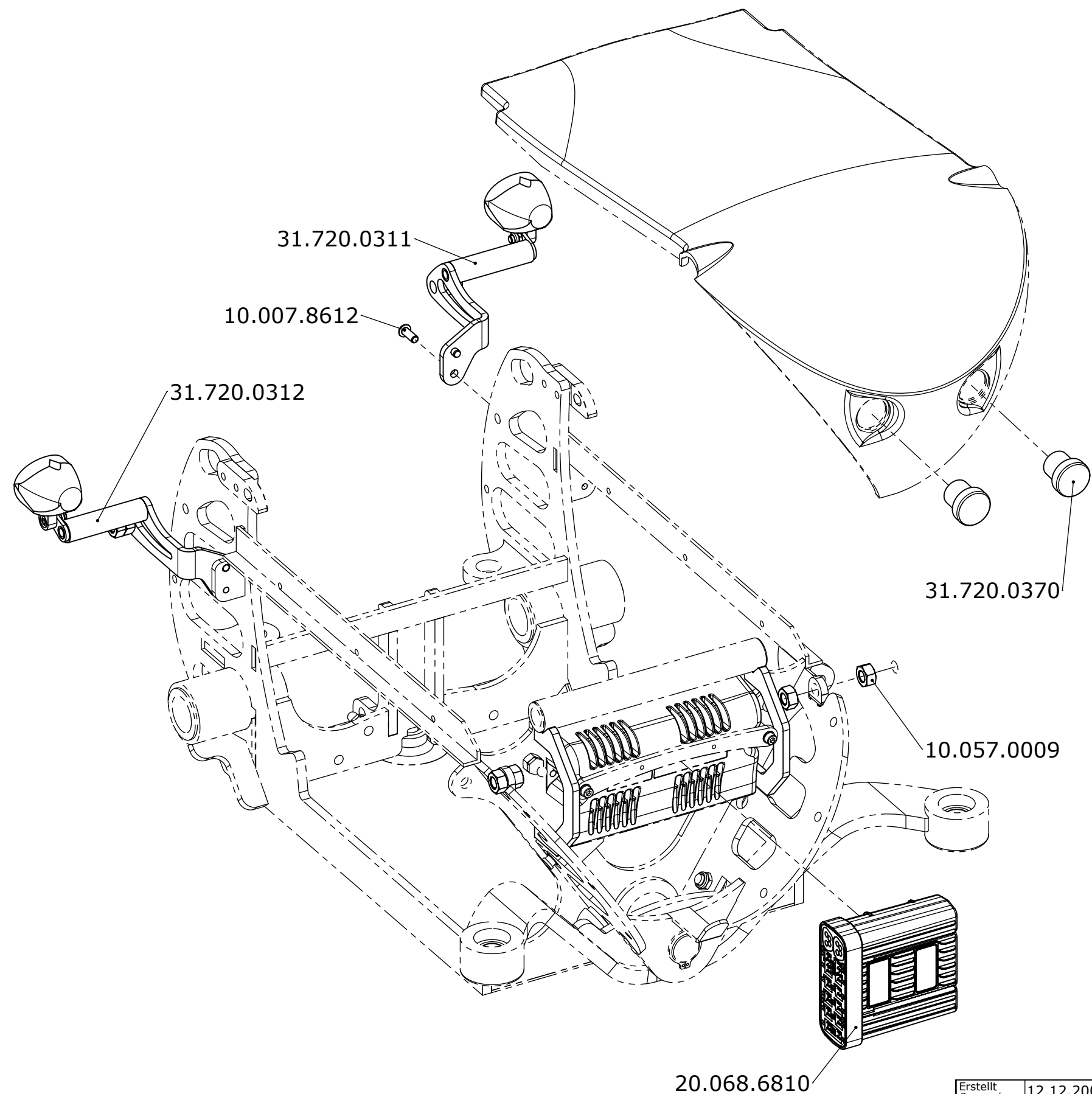


Erstellt Prepared	12.12.2008	PW	Benennung / Description Beleuchtung R-Net Lights and indicators R-Net		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved		-			
Status Status					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl Wheelchair C3	Artikelnummer Art. no. 50.072.0250


50.072.0310

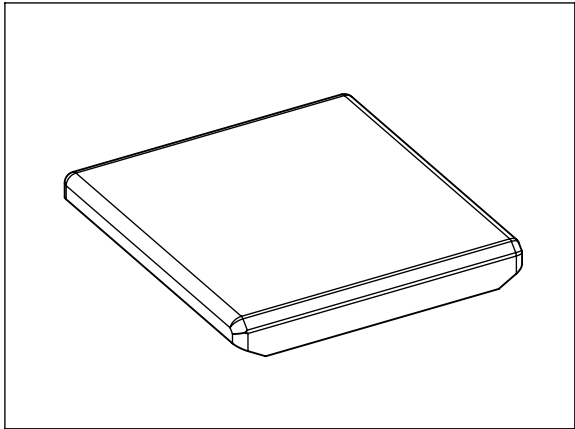


50.072.0320

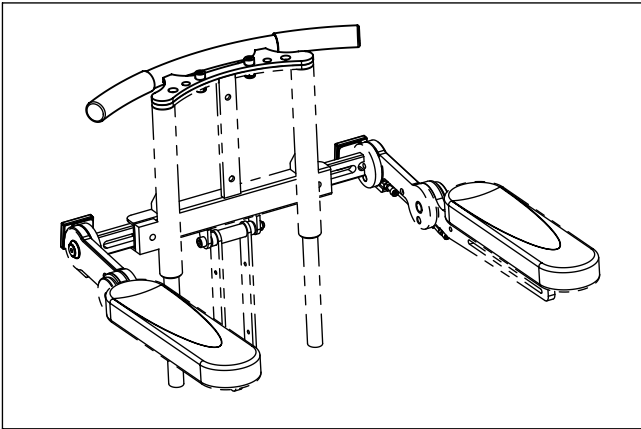


50.072.0330

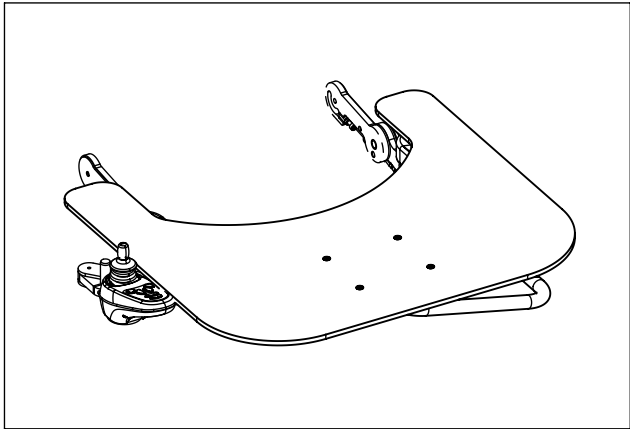


50.072.0350

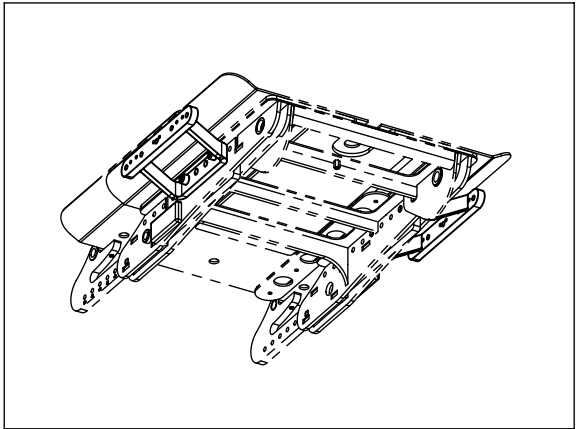


50.072.0360

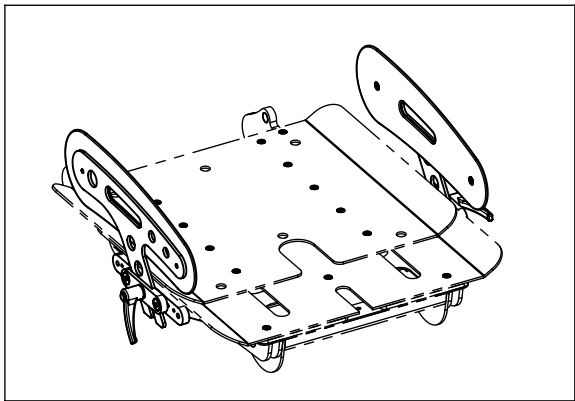


50.072.0370

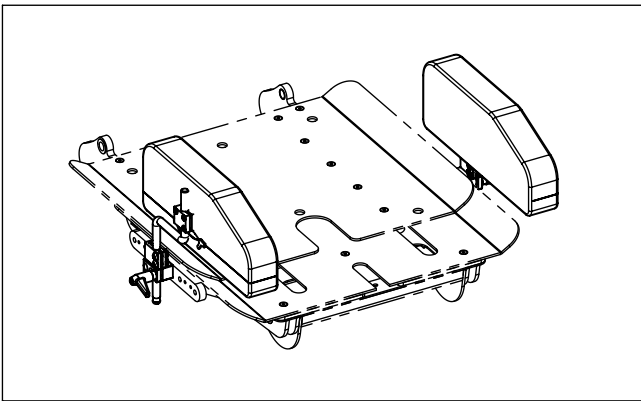


50.072.0380

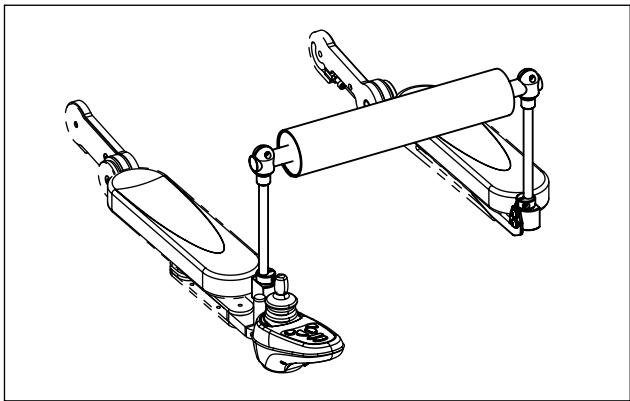


50.072.0390

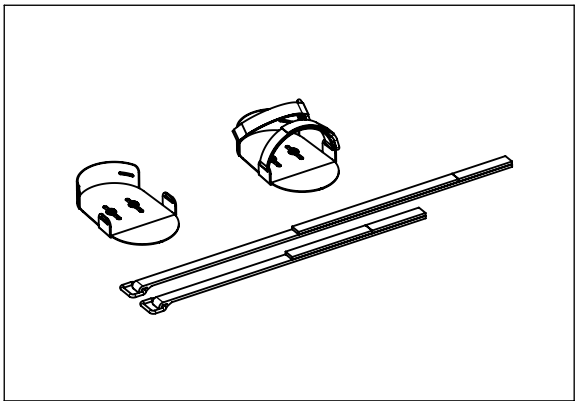


50.072.0400

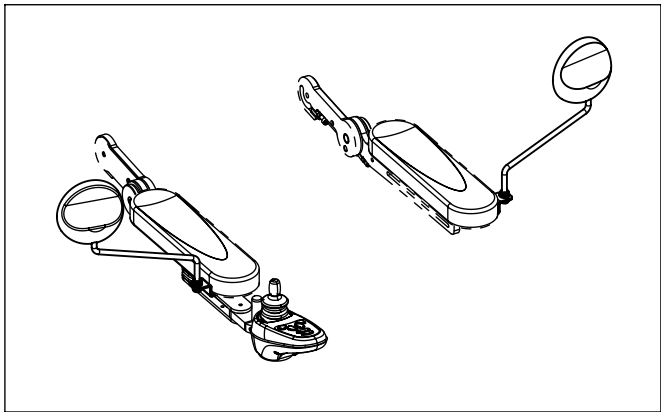


50.072.0410

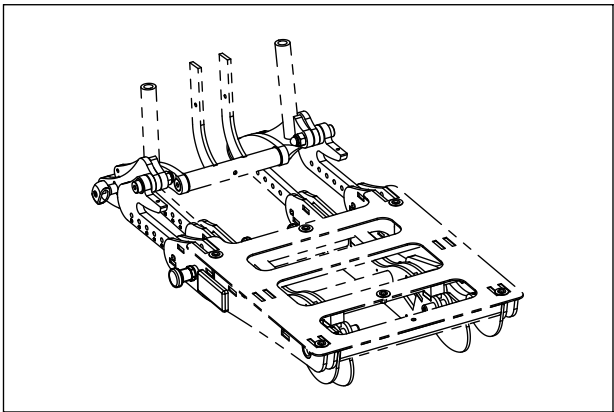


VR2 50.072.0420
R-Net 50.072.0430

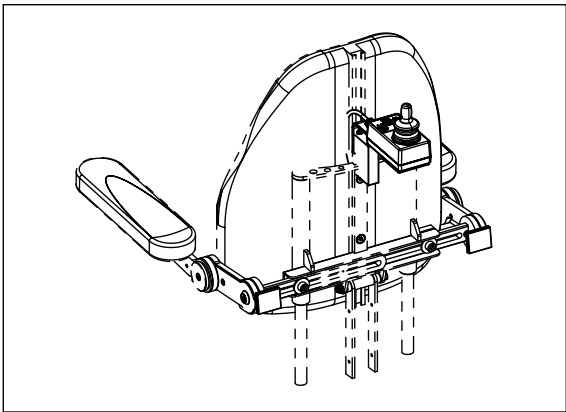

50.072.0440

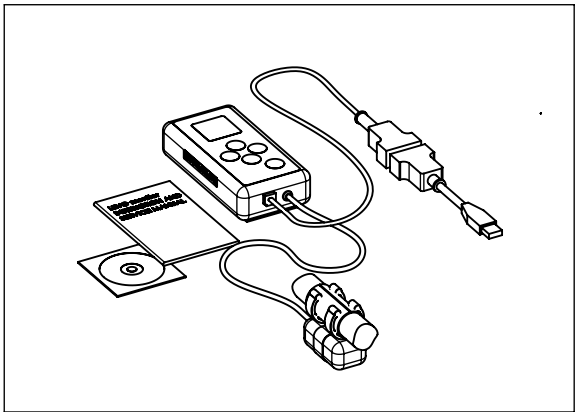


Erstellt Prepared	24.02.2009	PW	Benennung / Description Optionen & Zubehör Options & Accessories		Blatt / Anz Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved		-			
Status Status					
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl Wheelchair C3	Artikelnummer Art. no. 50.072.0300	

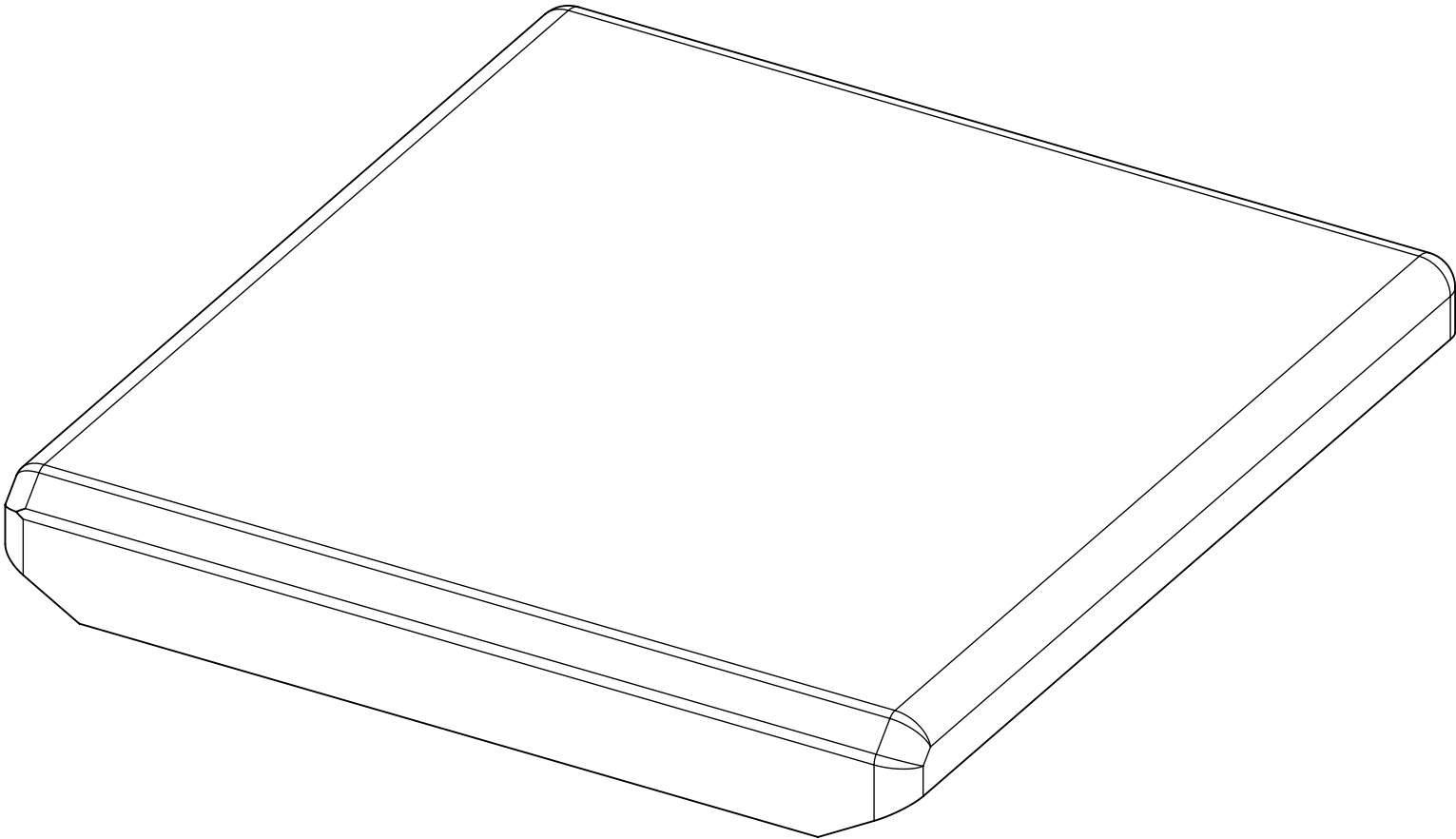


Sitzbreite Seat width	Sitztiefe Seat depth	Sitzkissen Seat cushion	Ersatzbezug Spare cover
32	35cm 37cm 39cm	30.103.5531	30.103.6211
	41cm 43cm 45cm	30.903.5532	30.903.6212
	47cm 49cm 51cm	30.903.5533	30.903.6213
36	35cm 37cm 39cm	30.103.5532	30.103.6212
	41cm 43cm 45cm	30.103.5533	30.103.6213
	47cm 49cm 51cm	30.103.5535	30.103.6215
	53cm 55cm 57cm	30.903.5534	30.903.6214
40	35cm 37cm 39cm	30.903.5535	30.903.6215
	41cm 43cm 45cm	30.103.5534	30.103.6214
	47cm 49cm 51cm	30.103.5536	30.103.6216
	53cm 55cm 57cm	30.103.5537	30.103.6217
	59cm 61cm 63cm	30.103.5538	30.103.6218
44	35cm 37cm 39cm	30.903.5531	30.903.6211
	41cm 43cm 45cm	30.103.5539	30.103.6219
	47cm 49cm 51cm	30.103.5541	30.103.6221
	53cm 55cm 57cm	30.103.5543	30.103.6223
	59cm 61cm 63cm	30.103.5546	30.103.6226
48	41cm 43cm 45cm	30.103.5545	30.103.6235
	47cm 49cm 51cm	30.103.5542	30.103.6222
	53cm 55cm 57cm	30.103.5544	30.103.6224
	59cm 61cm 63cm	30.103.5547	30.103.6227
52	47cm 49cm 51cm	30.103.5549	30.103.6229
	53cm 55cm 57cm	30.103.5545	30.103.6225
	59cm 61cm 63cm	30.103.5548	30.103.6228

Erstellt <i>Prepared</i>	06.11.2008	PW	Benennung / Description Sitzkissen Seat cushion		Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / Rev.
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>		-			
Status <i>Status</i>					
LEVO [®]  LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> C3	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.072.0310	

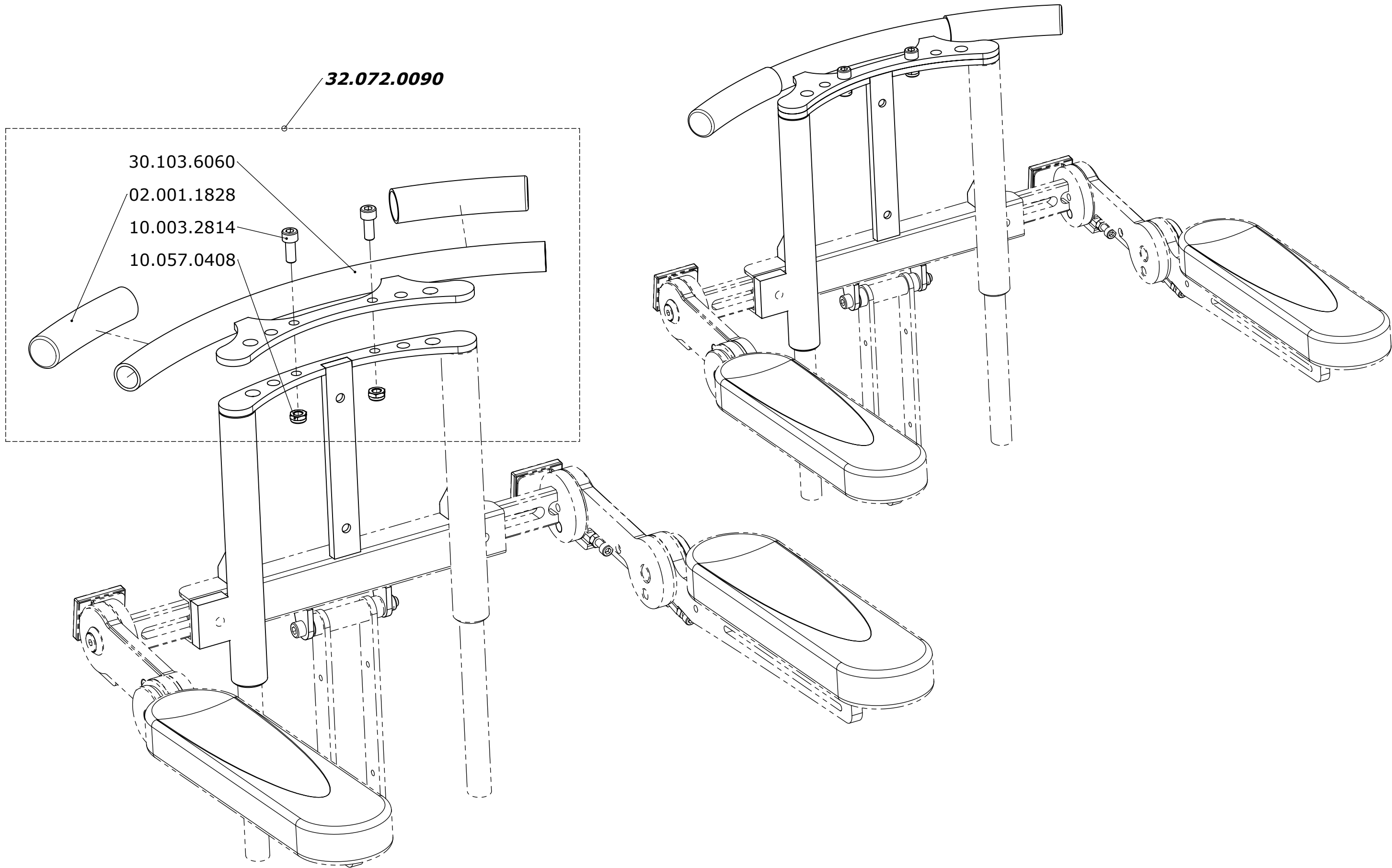


Erstellt <i>Prepared</i>	10.11.2008	PW	Benennung / Description Schiebebügel Stroller handle		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>		-			
Status <i>Status</i>					
LEVO  LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i> C3	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.072.0320	

Set	
Breite / width	Artikelnummer / Article no.
32-40	32.072.0011
44-52	32.072.0012

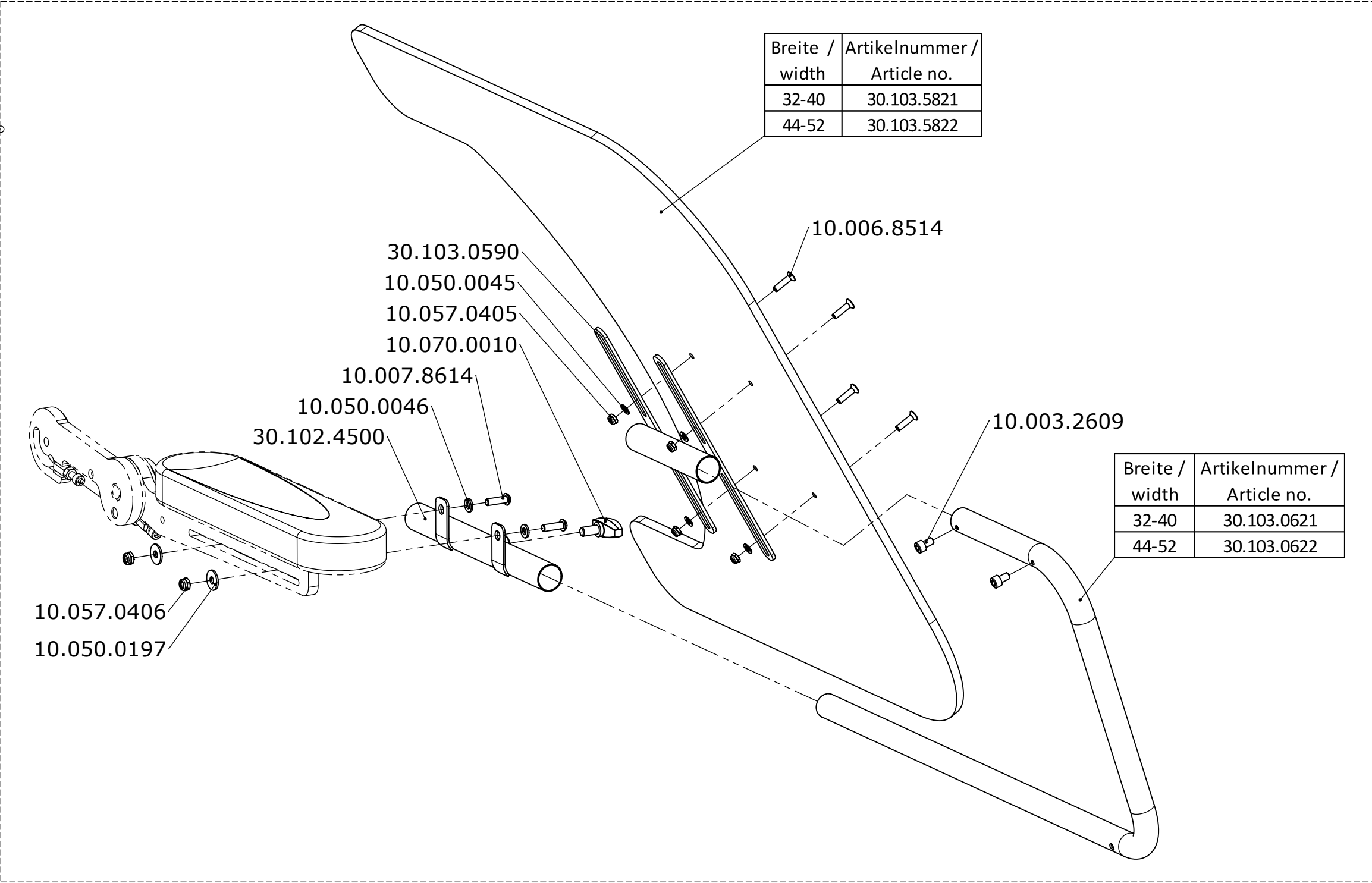

Breite / width	Artikelnummer / Article no.
32-40	30.103.5821
44-52	30.103.5822


Breite / width	Artikelnummer / Article no.
32-40	30.103.0621
44-52	30.103.0622

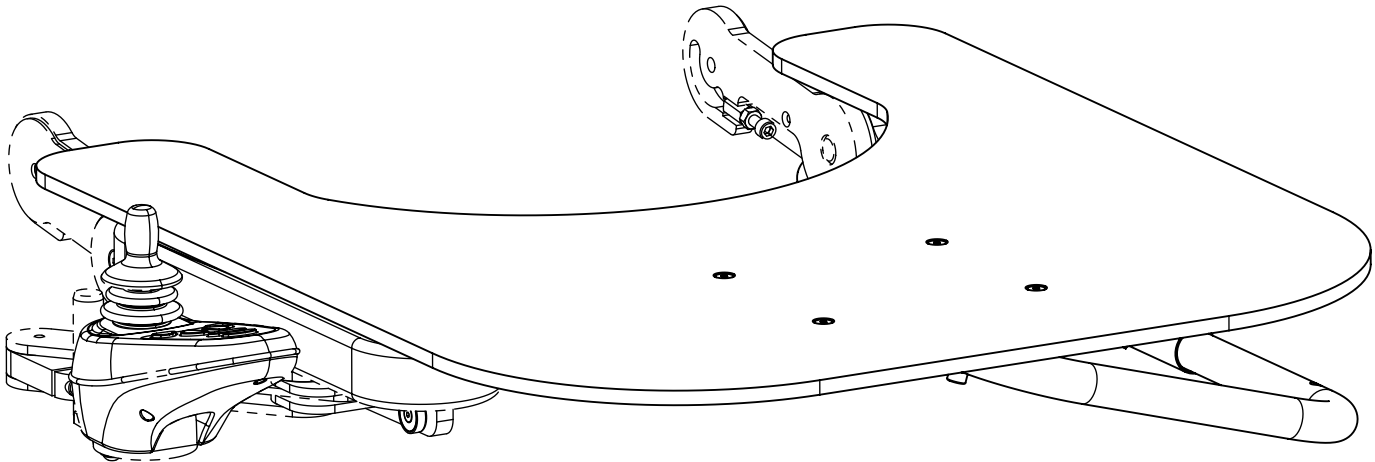

Erstellt Prepared	10.11.2008	PW	Benennung / Description Anstecktisch abschwenkbar Swig away table tray		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved		-			
Status					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch		Rollstuhl Wheelchair
			C3		Artikelnummer Art. no. 50.072.0330

Breite / width	Artikelnummer / Article no.
32	10.006.0824
36	M8 x 45 ?


Breite / width	Artikelnummer / Article no.
32	30.103.7601
36	30.103.7602

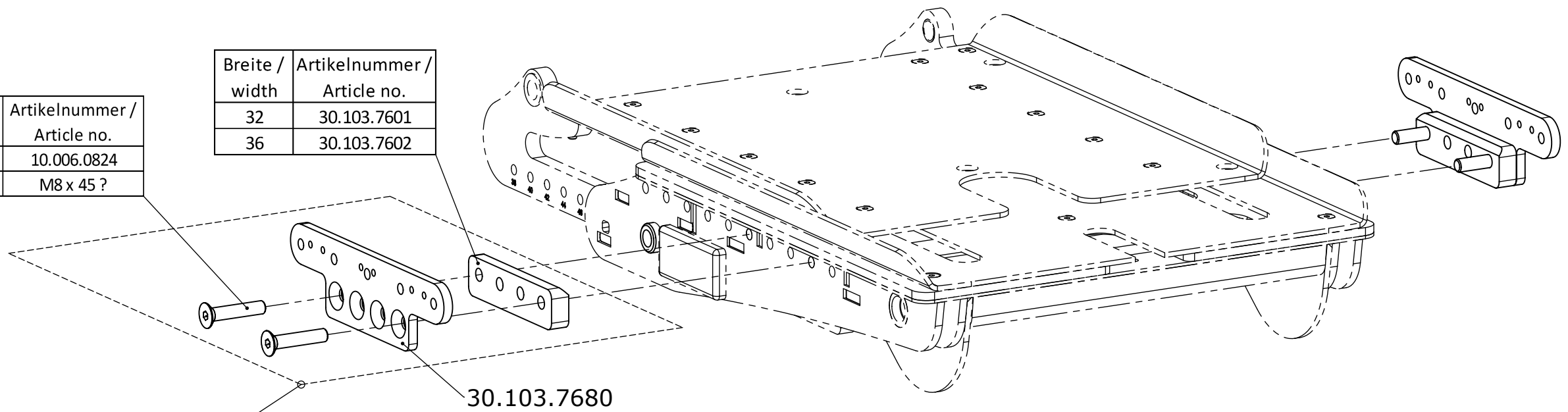

30.103.7680

Halterung für Kleiderschutz und Oberschenkelsupport / Holder for skirt guard and upper leg support	
Breite / width	Artikelnummer / Article no.
32	32.072.0151
36	32.072.0152


Breite / width	Artikelnummer / Article no.
40	30.103.6491
44	30.103.6492
48	30.103.6493
52	30.103.6494

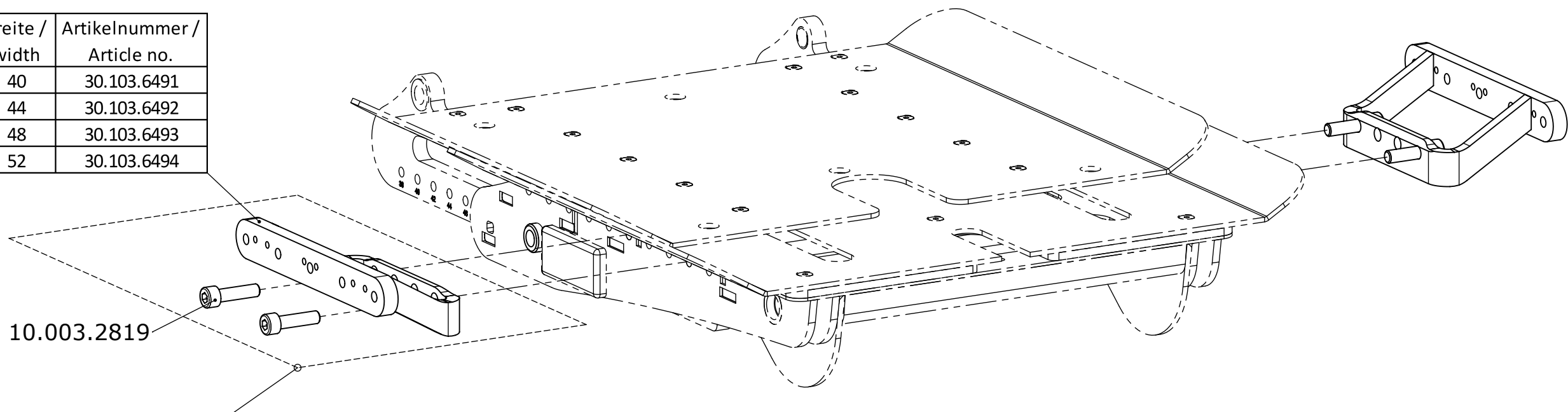


10.003.2819

Halterung für Kleiderschutz und Oberschenkelsupport / Holder for skirt guard and upper leg support	
Breite / width	Artikelnummer / Article no.
40	32.072.0153
44	32.072.0154
48	32.072.0155
52	32.072.0156

Erstellt <i>Prepared</i>	06.11.2008	PW	Benennung / <i>Description</i>		
Geändert <i>Modified</i>		-	Halterung für Kleiderschutz und Oberschenkelsupport Holder for skirt guard and upper leg support		
Gepr./Freig. <i>Approved</i>		-			
Status <i>Status</i>					
LEVO[®]  THE EXPERTS IN STANDING			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i>
			C3	50.072.0350	1 / 1
					Index / <i>Rev.</i>

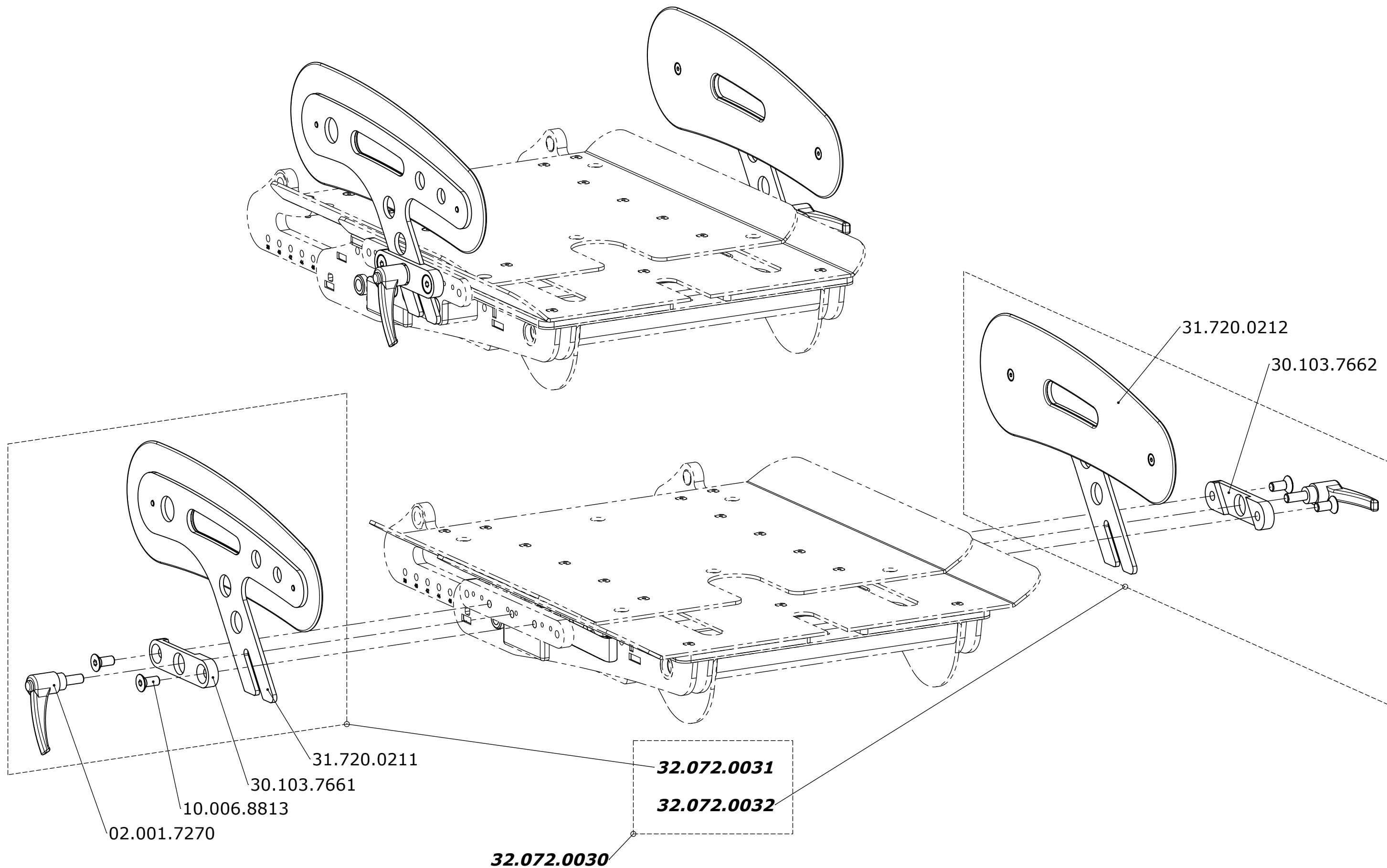

Erstellt <i>Prepared</i>	06.11.2008	PW	Benennung / Description Kleiderschutz Skirt guard		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>		-			
Status <i>Status</i>					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl <i>Wheelchair</i> C3	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.072.0360

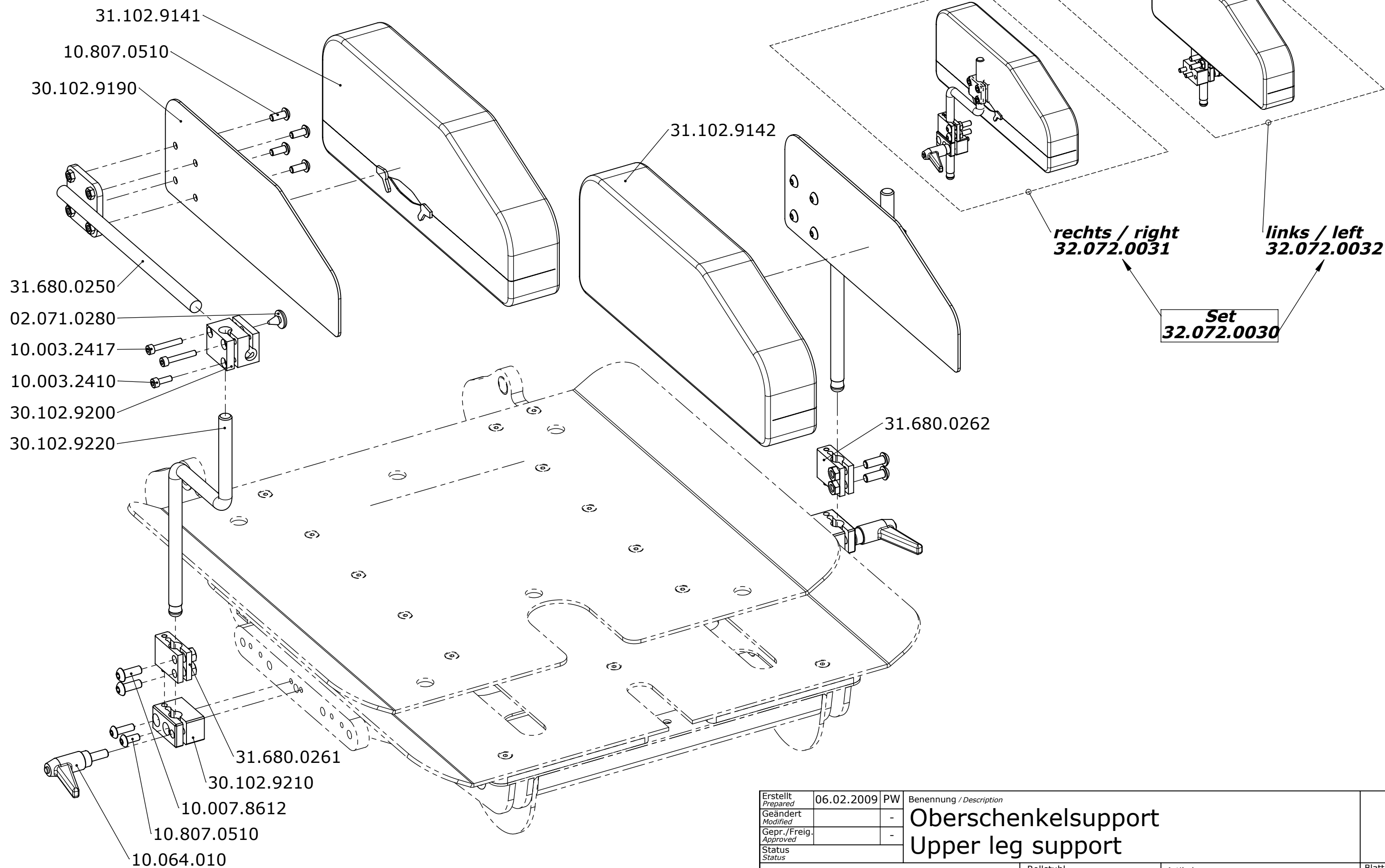


Erstellt Prepared	06.02.2009	PW	Benennung / Description Oberschenkelsupport Upper leg support		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved		-			
Status Status					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl Wheelchair C3	Artikelnummer Art. no. 50.072.0370

Sitzbreite / seat width	Länge (mm) / length	Artikel-Nr. / Article no.
32	325	30.102.9414
36	385	30.102.9411
40	445	30.102.9412
44		
48	505	30.102.9413
52		


Sitzbreite / seat width	Länge (mm) / length	Artikel-Nr. / Article no.
32	322	30.102.9404
36	382	30.102.9401
40	442	30.102.9402
44		
48	502	30.102.9403
52		

Sitzbreite / seat width	Länge (mm) / length	Artikel-Nr. / Article no.
32	395	30.103.6151
36	435	30.102.9392
40	475	30.102.9393
44	515	30.103.6154
48	555	30.102.9398
52	595	30.103.6156

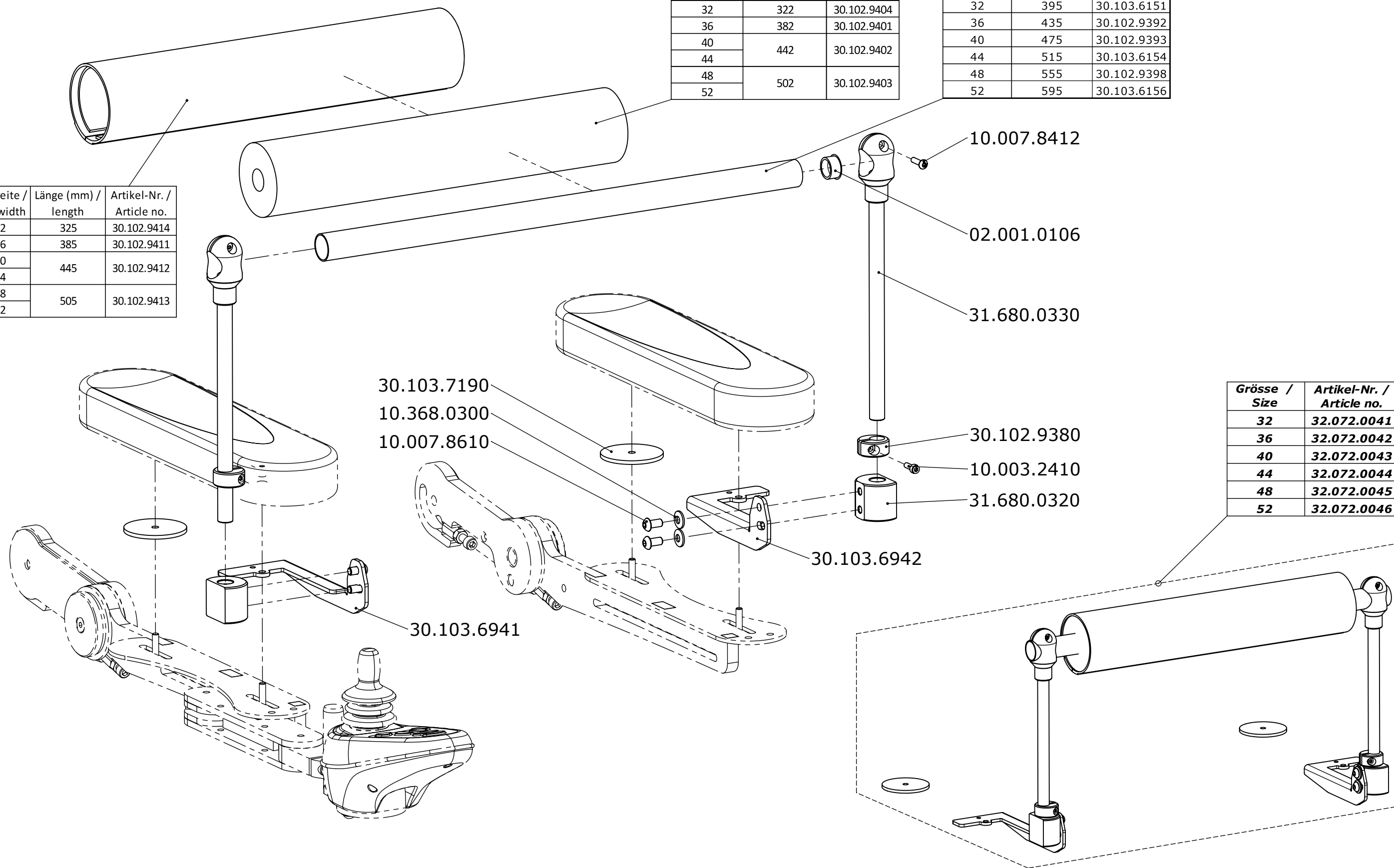


Grösse / Size	Artikel-Nr. / Article no.
32	32.072.0041
36	32.072.0042
40	32.072.0043
44	32.072.0044
48	32.072.0045
52	32.072.0046


Erstellt Prepared	28.01.2009	PW	Benennung / Description	
Geändert Modified		-	Brustrolle	
Gepr./Freig. Approved		-	Chest role	
Status Status				
LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl Wheelchair	Artikelnummer Art. no.
			C3	50.072.0380
				Blatt / Anz. Sheet / no. of
				1 / 1
				Index / Rev.

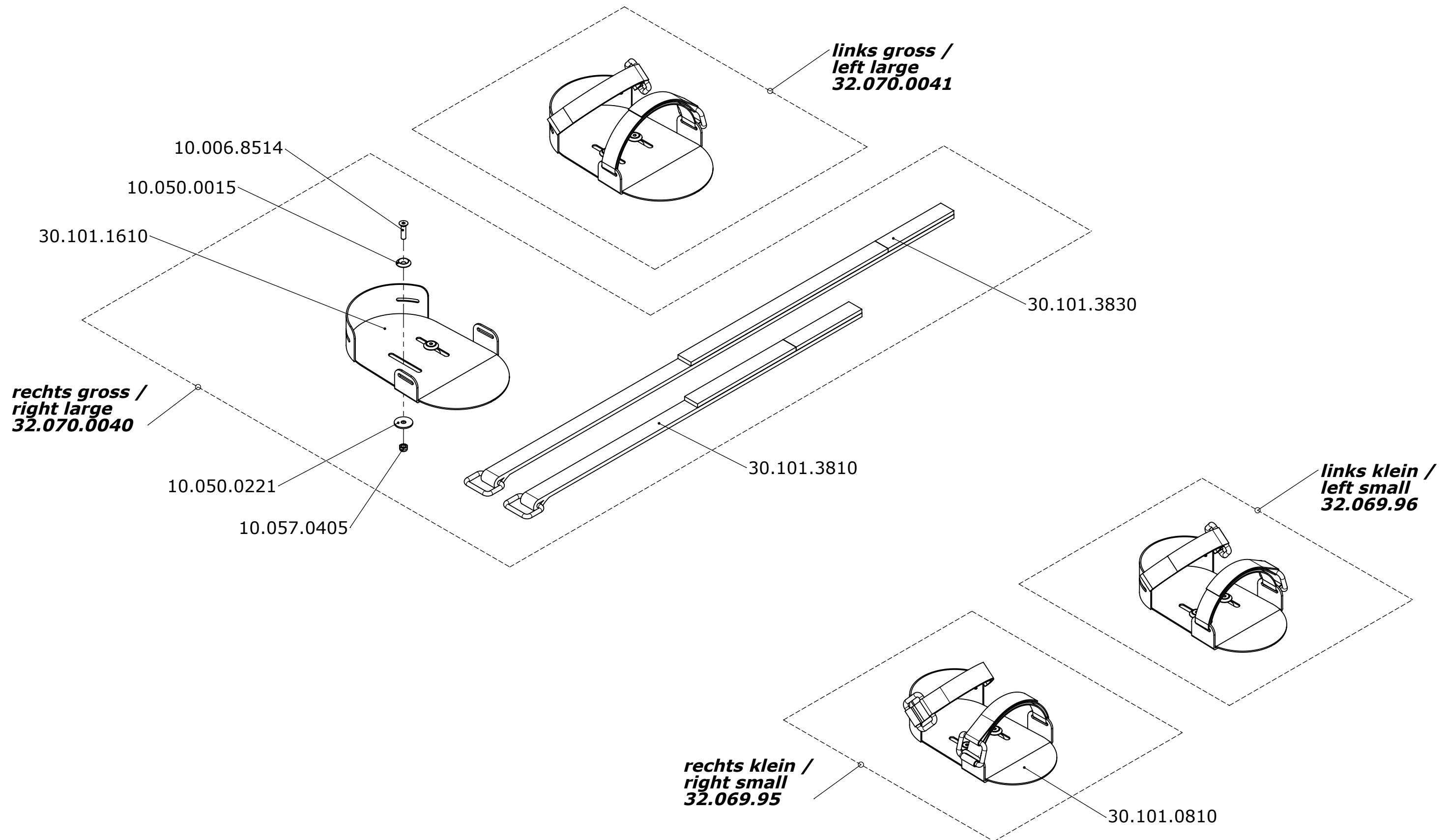

Erstellt <i>Prepared</i>	12.02.2009	PW	Benennung / <i>Description</i> Fussführung Foot guide		Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / <i>Rev.</i>
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>		-			
Status <i>Status</i>					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl <i>Wheelchair</i> C3	Artikelnummer <i>Art. no.</i> 50.072.0390

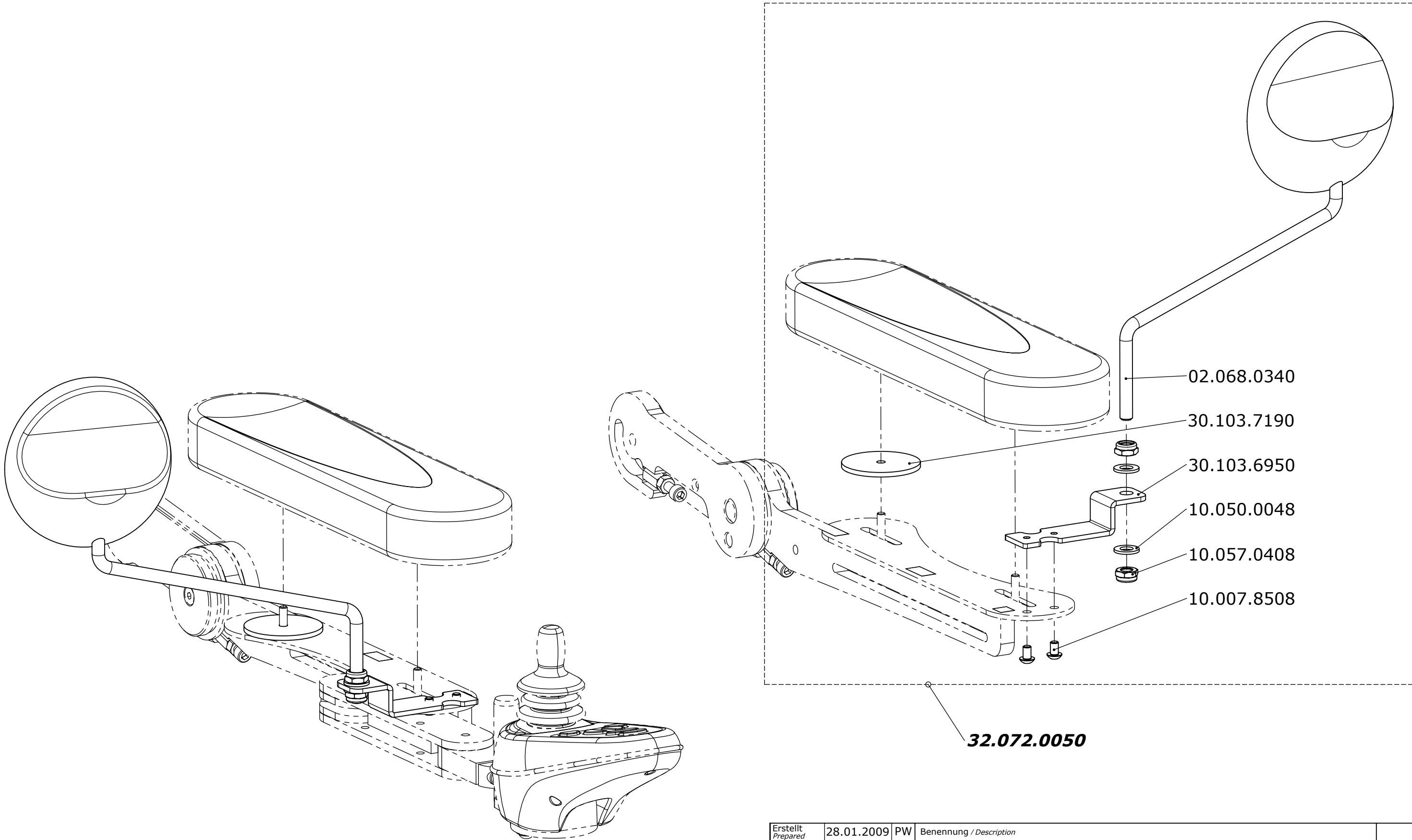



Erstellt <i>Prepared</i>	28.01.2009	PW	Benennung / <i>Description</i>			
Geändert <i>Modified</i>		-	Rückspiegel Rear view mirror			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>		-				
Status <i>Status</i>						
 LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch			Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	Blatt / Anz <i>Sheet / no. of</i>	
			C3	50.072.0400	1 / 1 Index / Rev.	

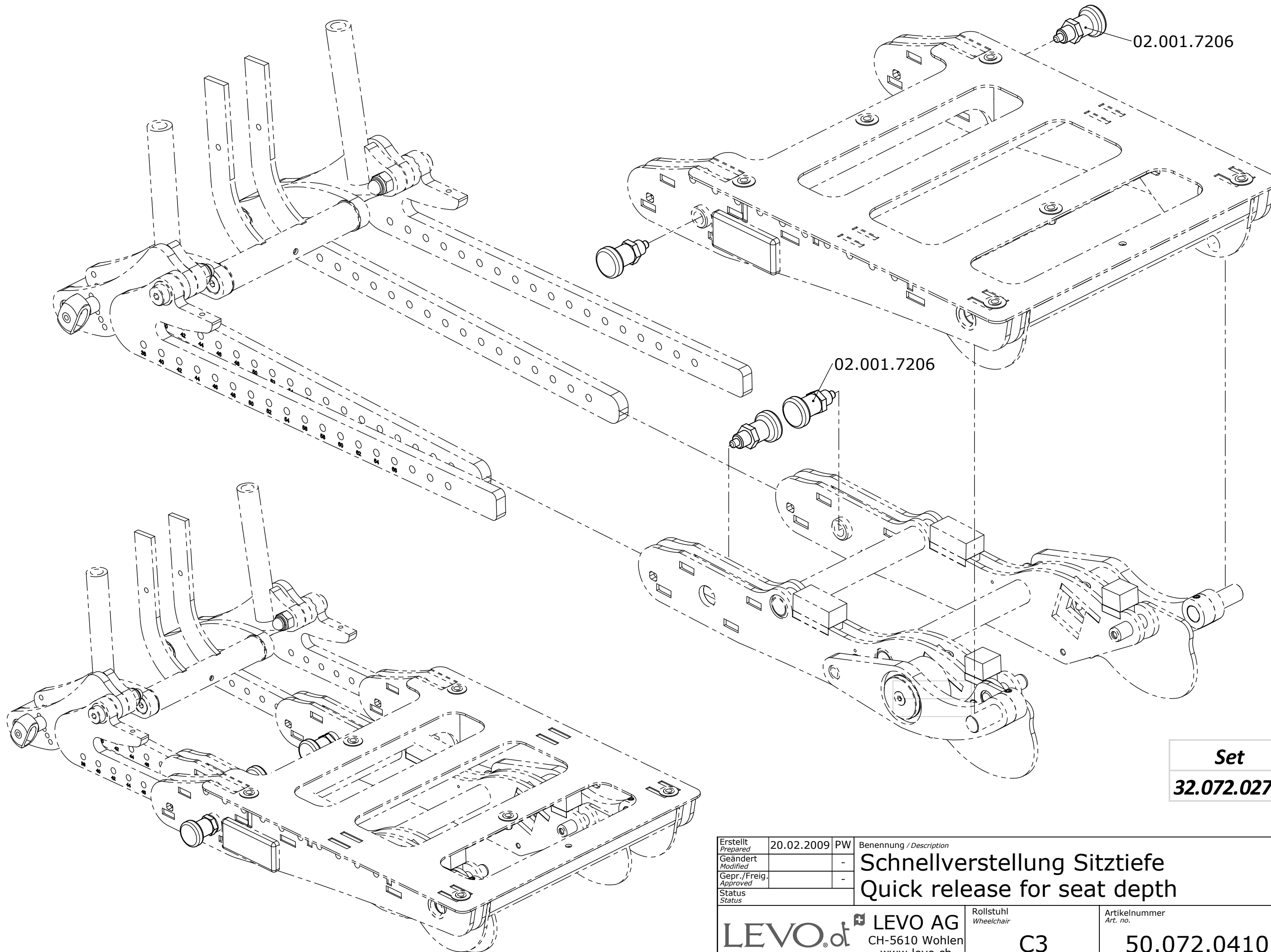


Set
32.072.0270

Erstellt Prepared	20.02.2009	PW	Benennung / Description Schnellverstellung Sitztiefe Quick release for seat depth		Blatt / Anz. Sheet / no. of 1 / 1 Index / Rev.
Geändert Modified		-			
Gepr./Freig. Approved		-			
Status					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl Wheelchair C3	Artikelnummer Art. no. 50.072.0410

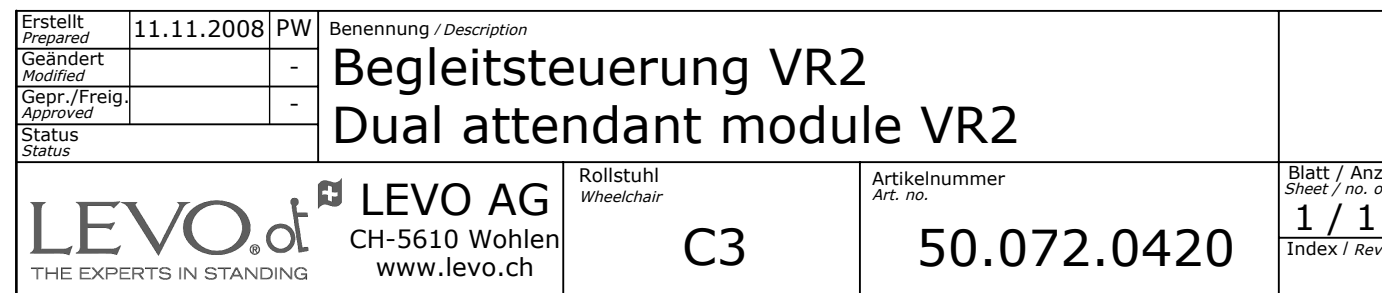

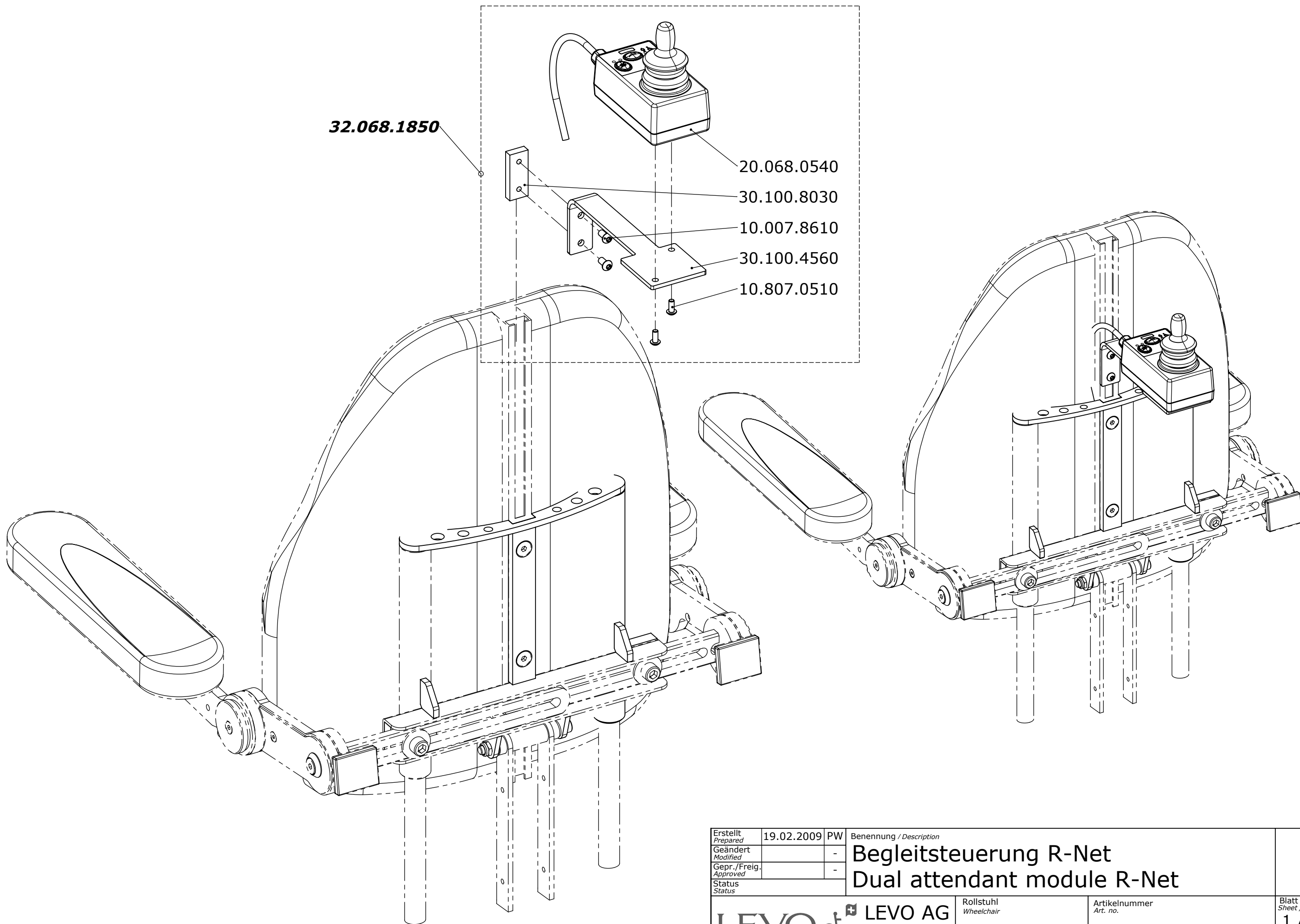

Erstellt <i>Prepared</i>	19.02.2009	PW	Benennung / <i>Description</i>						
Geändert <i>Modified</i>		-	Begleitsteuerung R-Net Dual attendant module R-Net						
Gepr./Freig. <i>Approved</i>		-							
Status <i>Status</i>									
LEVO[®].ch THE EXPERTS IN STANDING			CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	C3	Artikelnummer <i>Art. no.</i>	50.072.0430	Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i>	1 / 1
								Index / <i>Rev.</i>	

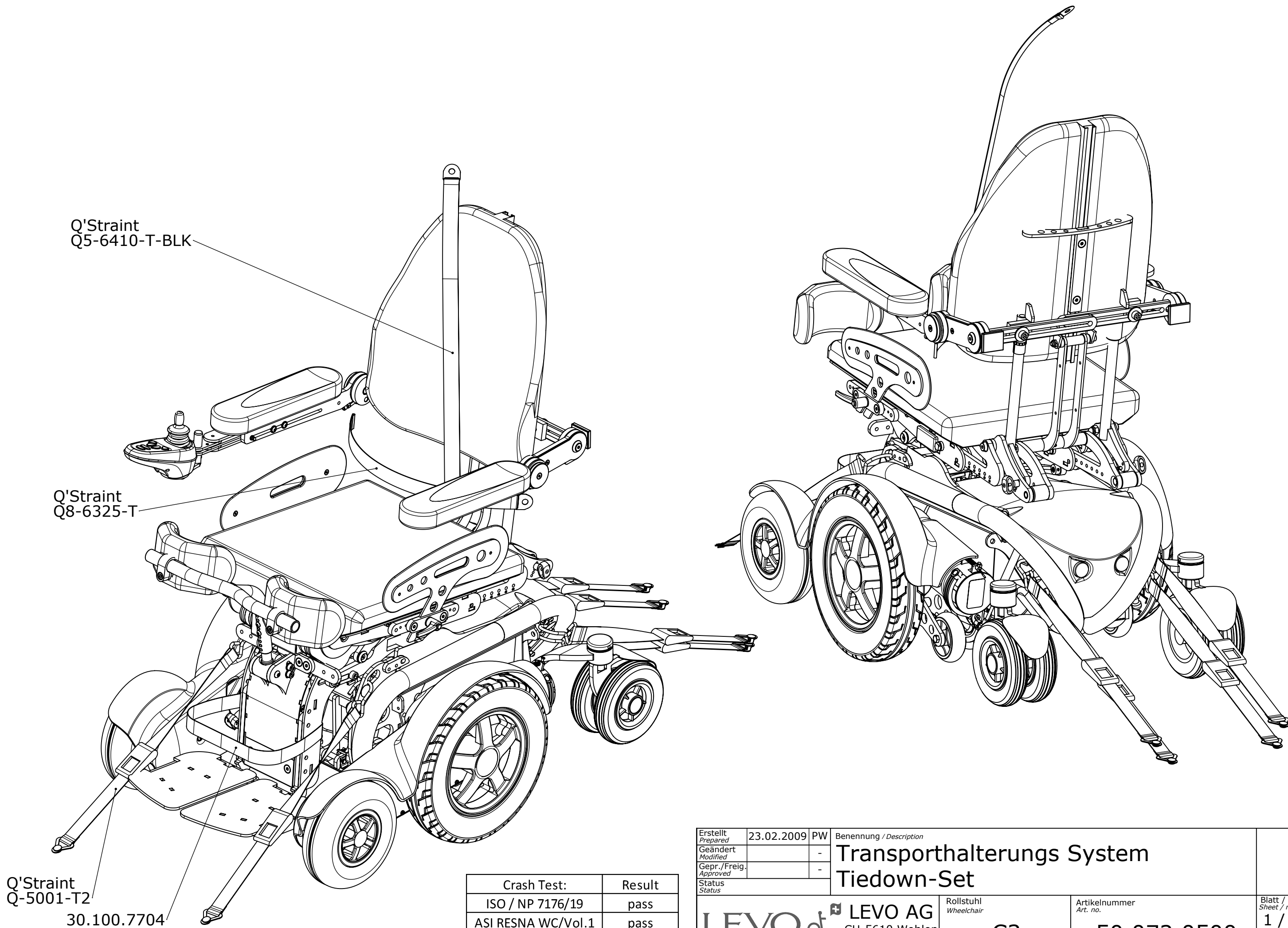

Crash Test:	Result
ISO / NP 7176/19	pass
ASI RESNA WC/Vol.1	pass

Erstellt <i>Prepared</i>	23.02.2009	PW	Benennung / Description Transporthalterungs System Tiedown-Set		
Geändert <i>Modified</i>		-			
Gepr./Freig. <i>Approved</i>		-			
Status <i>Status</i>					
LEVO THE EXPERTS IN STANDING			LEVO AG CH-5610 Wohlen www.levo.ch	Rollstuhl <i>Wheelchair</i>	Artikelnummer <i>Art. no.</i>
				C3	50.072.0500
					Blatt / Anz. <i>Sheet / no. of</i> 1 / 1 Index / Rev.